


BBCセレクション シリーズ

BBC Selection Series

# Parallel Guide

パラレルガイド

オーバードンチャーでアタッチメントの角度制限が必要な場合、  
ワンピースインプラント植立で平行なドリル形成が必要な場合に役立ちます。

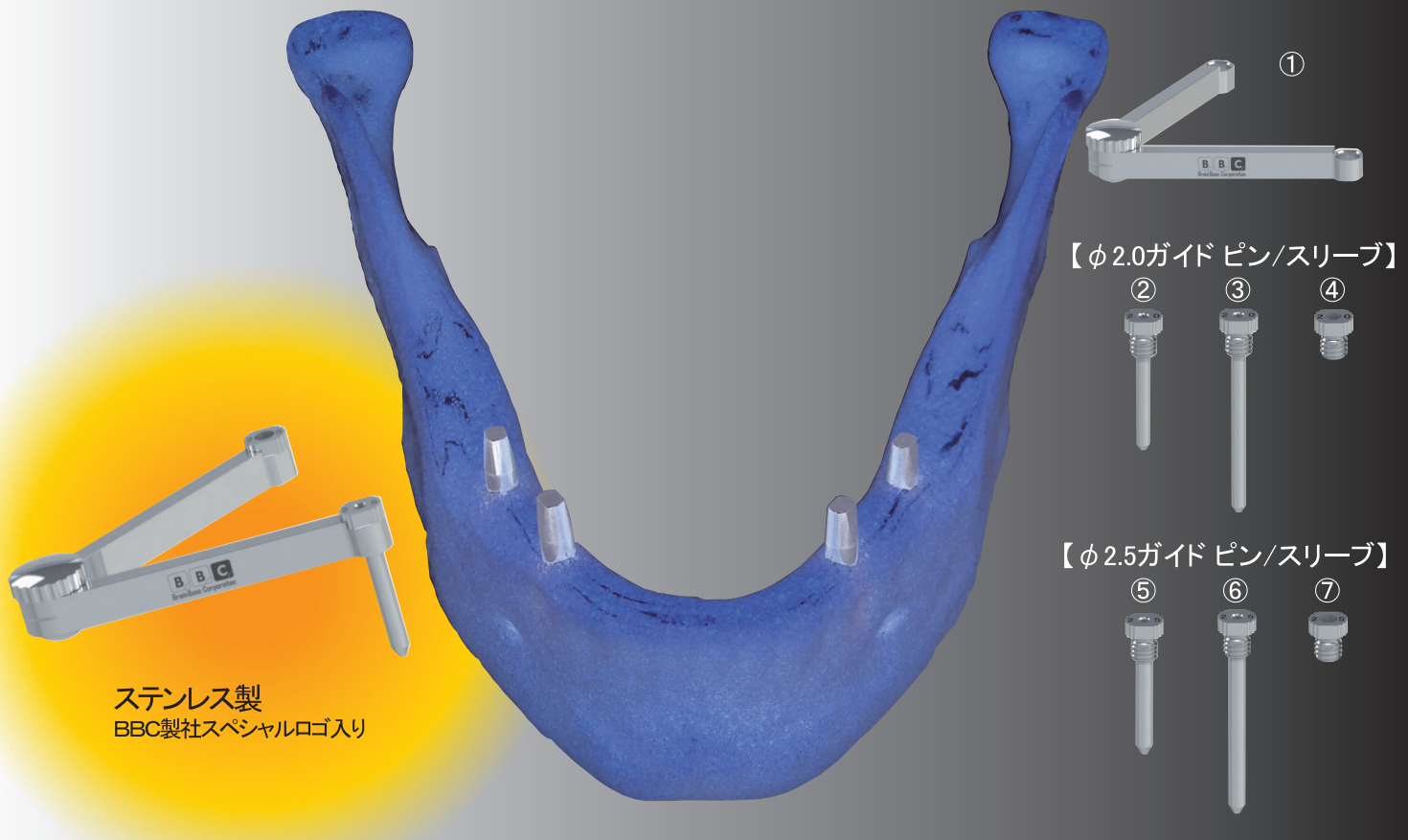

ステンレス製  
BBC製社スペシャルロゴ入り

## ■パラレルガイド セット

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ①パラレルガイド本体       | ⑤パラレルガイドピンφ2.5S  |
| ②パラレルガイドピンφ2.0S  | ⑥パラレルガイドピンφ2.5L  |
| ③パラレルガイドピンφ2.0L  | ⑦パラレルガイドスリーブφ2.5 |
| ④パラレルガイドスリーブφ2.0 |                  |

【使用方法】 【使用上の注意】は添付文書をご確認ください。

販売名：パラレルガイド  
一般的名称：歯科用インプラント手術器具  
クラス分類：一般医療機器  
製造販売業者：株式会社社会社ブレンベース  
医療機器製造販売届出番号：13B1X00145000018

# パラレルガイド 操作方法

## ■サージカルプロトコール



①通法に従い、φ2.0mmのドリルまでガイドホールを形成してください。  
※このケースは左側を基準に形成をしています。



②パラレルガイド本体、左側にパラレルガイドピンφ2.0mmを装着し、右側にパラレルガイドスリーブφ2.0を装着します。  
※本体のネジは緩めておいてください。



③左側のガイドホールに左側に②で装着したガイドピンを嵌め入れます。次に右側の位置が定まりましたら、本体のネジを締め込み固定してください。



④右側のパラレルガイドの位置がずれないようにφ2.0mmのドリルで右側のガイドホール形成を行ってください。  
※複数の形成がある場合にはこの時点で必要な箇所をガイドホール形成を行ってください。



⑤両側φ2.0mmのガイドホール形成が終わりましたら、右側のガイドスリーブをφ2.5に嵌め替えてください。



⑥装着後、φ2.5mmのドリルで右側のガイドホール形成を行ってください。



⑦右側のガイドスリーブφ2.5を左側に嵌め替え、右側にパラレルガイドピンφ2.5を嵌め込んでください。





⑧装着後、左側のガイドホール形成をφ2.5mmのドリルで行ってください。この時点でφ2.5mmの平行なガイドホール形成が行えたか確認してください。  
※残りのホール形成は各メーカーのプロトコールに従ってください。

## 注 意

## 分解・洗浄・組立て



本体ネジがきつい場合には●部分を持ち、矢印の方向へ広げ、本体ネジを緩めてください。

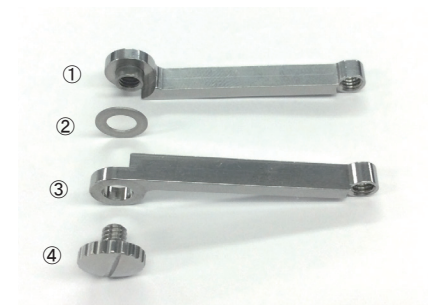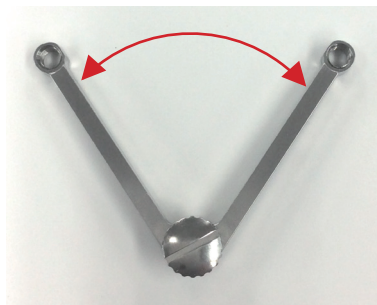

術後、血液・組織などが乾燥しないうちに洗浄を行ってください。また、パラレルガイド本体は4つの部品から構成されています。分解後、洗浄を行ってください。上記の順番で組み立ててください。