

Mytis

Arrow Implant

Product
Catalogue
Vol.5

System



Mytis ArrowImplant System

Mytis

Arrow Implant

Product
Catalogue
Vol.5

System

患者様の
クオリティオブライフ向上を
目指して

インプラントを中心とした骨治療の統合システム

CONTENTS

保証	2
Mytis Arrow Implantとは…	3
品質保証	4
マイティスアローインプラントシステム	5
インプラント&アバットメントの嵌合	7
アバットメント仕様について	8
■ 1回法ノーマルタイプ B-type	9
■ 1回法ノーマルタイプ BS-type	11
■ 1回法ノーマルタイプ E-type	13
■ 2回法ノーマルタイプ C-type	15
■ 2回法ノーマルタイプ St/Me-type	17
マルチピースアバットメント	19
■ 1回法ワイドタイプ BW/EW-type	21
■ 1回法ワンピースタイプ AII-type	23
補綴&技工パーツ	25
インプラントレベル印象	27
試適用アバットメント	37
Drills&Tools	38
Others ーインプラント周辺製品ー	42
注文書	44
製品名索引	45

保証

- ▶株式会社ブレンベースは自社の製品保証基準に基づいて、製品を保証します。従って本製品の保証は日本国内で保証する材質及び製造工程での不良品以外には適用できません。又、この保証は購入者本人に限定させていただきます。
- ▶不良品につきましては製品返却前に弊社までご一報ください。状況に応じて、修理・交換・代金返金のいずれかの対応をさせていただきます。
- ▶弊社は製品の改良、開発に日夜努力しております。そのために事前の予告なしに製品の変更や中止、価格の変更をすることがありますので予めご了承ください。
- ▶お買い上げ製品の返却は原則としてお受けしておりません。但し、発送日より 30 日以内で未開封の製品に限り、返品をお受けいたします。返品時の送料は、お客様にご負担いただいております。
- ▶製品交換に関しては発送日より 90 日以内で未開封の製品とさせていただきます。返送時の送料はお客様にご負担いただいております。返送された製品を確認しだい交換品を発送します。その際、交換発送手数料をご負担いただいております。
- ▶尚、製品を「着払い」でご返送された場合、その送料をご請求させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

ご使用に際しては、以下の注意事項をよくお読みください。

1. 当製品の使用にあたっては、弊社の外科術式マニュアルに従い、適切に行ってください。
2. インプラント手術を行うにあたっては、インプラント講習会及び当社と提携するインプラント講習会を受講されることをお勧めします。
3. この製品は厚生労働省の承認等をうけたものであり、原則として歯科医師免許の取得者のみに販売いたします。
4. インプラント手術を行うにあたり、患者の口腔内及び全身健康状態がインプラント手術に適さない場合には、使用しないでください。
5. 口腔衛生が保てない患者、リコールに応じない患者等には使用しないでください。(術後管理ができないことがあります。)
6. 製品に損傷をあたえないように保管の際は十分にご注意ください。また、高温・多湿の場所は避け、汚染防止のために使用前にパッケージから取り出してお使いください。

製品のお届けについて

- 午後 3 時までにはいただきましたご注文につきましては、当日発送いたします。また、午後 3 時以降のご注文は、翌日の発送（ご注文が日曜・祝日の前日午後3時以降及び、日曜・祝日のご注文に関しましては翌営業日の発送）となりますのでご了承ください。
- お申し込み後に製品の品切れが出た場合、また、ご注文が集中して製品が遅れる場合は事前にお電話または FAX にてご連絡させていただきます。
- お届けの製品が破損している場合に限り返品受付いたしますが、先ずは弊社へご一報ください。

配送費について

- 1 回のご注文金額の合計が ¥10,000（税込）に満たない場合には梱包発送手数料を別途いただきます。（全国一律 ¥1,000）
1 回のご注文金額の合計が ¥10,000（税込）を超える場合は、送料無料。
- タイムサービス便をご利用の場合には、別途追加料金（一律 ¥500）をご請求させていただきます。但し、タイムサービス便をご利用いただけない地域もございますのでご了承ください。

ご注文の方法

ご注文はフリーダイヤル（FAX又はメール）にてご注文くださいますようお願いいたします。

ヨ ク ツ ク ミ ナ
フリー
ダイヤル
FAX **0120-4929-37**
メール
アドレス **mail@brain-base.com**

製品のお届けについて

請求書は、当月末日締めで、送付させていただきます。お支払いにつきましては、翌月末日までに右記の銀行口座にお振込みください。銀行振込手数料につきましては、貴院でご負担くださいますようお願いいたします。なお、銀行振込の領収印をもって、弊社領収書の代わりとさせていただきます。

振込銀行

三菱UFJ 銀行	大井支店	普通預金No.0851240
みずほ銀行	大井町支店	普通預金No.1676279

Mytis ArrowImplant とは…

ベーシックインプラントデザイン

鏡面仕上

バレル研磨加工にて $1\mu\text{m}$ 以下の鏡面加工を行い、歯肉との密着・封鎖性能を確保し、術後の感染を防止します。

ネジ山形状

ネジピッチ 0.8 mm、ネジ山高さ 0.25 mm、先端部分の形状は R 形状と日本人の骨強度に最も合った形状です。

先端部形状

9° テーパー設計によって埋入時、骨からの抵抗が少なくぶれないため、安全に埋入できます。

8° モーステーパー・HEX 嵌合

世界的に多くのインプラントシステムで使用され、長期かつ周期的な応力で疲労に対する強度が実証されている 8° モーステーパーを採用。さらに内部六角 (HEX) が施されています。

材質・表面処理加工技術

材質 フルハードトップチタン (JIS2種) 純チタン製

(引張り強さ) 750 ~ 900Mpa

【特徴】

- 純度が高い
- 冷間加工により強度は JIS4種同等レベル

H	O	N	Fe	C	Ti
0.013% Max.	0.20% Max.	0.03% Max.	0.25% Max.	0.08% Max.	残部

ブラスト材

自社で製造した骨伝導能を持つ生体親和性に優れた純粋な化学合成材料、水酸アパタイト (HAP) を含む β -リン酸三カルシウム (β -TCP) 共晶体です。



ブラスト材

ABS表面処理

骨伝導能を有する水酸アパタイト (HAP) を含む β -リン酸三カルシウム (β -TCP) の共晶体でブラスト処理を行い、チタン表面にマイクロラフネスが生成されオッセオインテグレーションが獲得できます。

品質保証

品質管理

最新の生産技術を整え、国際品質管理基準（ISO13485）に合格した生産工程で、自社の厳しい品質基準を設け、基準に合格した製品だけを販売しています。



2006 年 ISO13485 認証取得

2006 年 マイティスアローインプラント FDA 認証取得

2007 年 β パウダー（歯面研磨材）FDA 認証取得

2009 年 ArrowBone- β （骨補填材）FDA 認証取得



ISO13485とは

医療機器産業向けの品質マネジメント規格です。品質保証と安全管理を行っています。

FDAとは

アメリカ食品医薬品局（Food and Drug Administration）の略
アメリカ合衆国保健福祉省配下で連邦食品・医薬品・化粧品法を根拠とし、
医療品規制、食の安全を責務とする政府機関。

製造販売後の安全管理について

弊社関連製品に関し、市販後管理を徹底し、常に安全管理情報の収集を行っています。不具合発生時には、速やかに自主回収を行い、原因の徹底解明や改善に取り組みます。

カルテ用シールについて

マイティスアローインプラントでは、インプラント・アバットメント製品にはカルテ用シールが添付されています。術後、必ずカルテ用シールをカルテもしくは臨床管理カードに貼付して、ご使用いただき、ロット番号の管理をお願いしています。

純国産品

マイティスアローインプラントは、日本国内で生産しています。弊社の製品は、世界が認める日本の工業・技術力（チタン・精密 NC 施盤など）の最先端技術で製造しています。
日本製品として海外 17カ国に輸出しています。



<輸出先>（順不同）


台湾、韓国、香港、中国、インドネシア、トルコ、米国
シンガポール、タイ、ベトナム、ミャンマー、イラン、
レバノン、クウェート、ヨルダン、UAE、サウジアラビア

1 回法ノーマルタイプ

B-type

B33 ~ 46 × × Sf

φ 3.3mm、φ 3.7mm、φ 4.0mm、φ 4.3mm、φ 4.6mm
プラットフォーム（最大直径部）：4.8mm

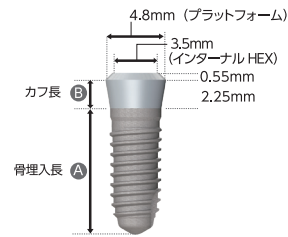


P.9~

1 回法ノーマルタイプ

BS-type

BS37 ~ 46 × × Sf

φ 3.7mm、φ 4.0mm、φ 4.3mm、φ 4.6mm
プラットフォーム（最大直径部）：4.8mm

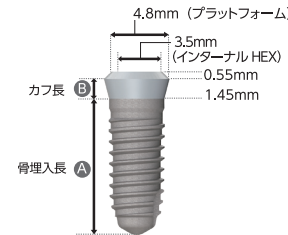


P.11~

1 回法ノーマルタイプ

E-type

E33 ~ 46 × × Sf

φ 3.3mm、φ 3.7mm、φ 4.0mm、φ 4.3mm、φ 4.6mm
プラットフォーム（最大直径部）：E33 × × Sf、E37 × × Sf、E40 × × Sf、⇒ 4.3mm
E43 × × Sf、E46 × × Sf ⇒ 4.8mm

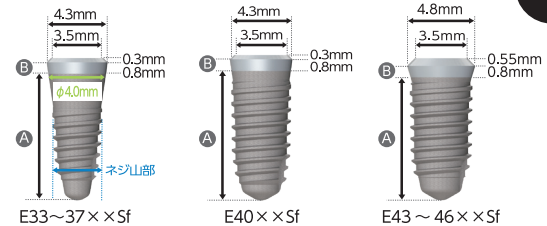

P.13~

※E33 と E37 はネジ山部の径がそれぞれφ3.3mm・φ3.7mmで、表面処理部最大径はφ4.0mmになります。


※E-type は、全長表記になっています。実際の埋入長（プラスト部）は、E33 ~ 40 × × Sf はマイナス 1.1mm、E43 ~ E46 × × Sf ⇒ マイナス 1.35mm となります。例えば、E3310 の埋入長は、8.9mm となります。

2 回法ノーマルタイプ

C-type

C37 ~ 46 × × Sf

φ 3.7mm、φ 4.0mm、φ 4.3mm、φ 4.6mm
プラットフォーム（最大直径部）：C37 × × Sf ⇒ 3.7mm C40 × × Sf ⇒ 4.0mm
C43 × × Sf ⇒ 4.3mm C46 × × Sf ⇒ 4.6mm

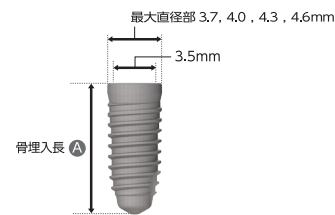


P.15~

2 回法ノーマルタイプ

St-type


St40 ~ 50 × × Sf

φ 4.0mm、φ 4.3mm、φ 5.0mm

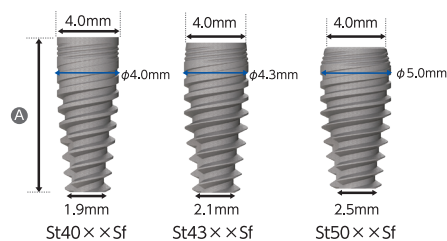


P.17~


Bタイプ

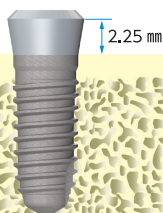


BSタイプ

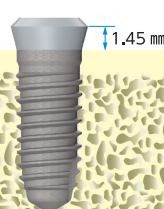

Eタイプ

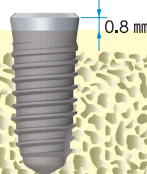

Cタイプ

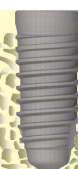

Stタイプ



2.25mmの歯肉貫通部を設けたインプラントです。インプラント頭部が歯肉から露出しているため、オッセointegration後、2次外科手術を行わずアパットメントの装着が可能です。

1.45mmの歯肉貫通部を設けたインプラントです。B-typeの歯肉貫通部 2.25mm より0.8mm 短いタイプです。インプラント頭部が、歯肉貫通部から露出するため、オッセointegration後、2次外科手術を行わずアパットメントの装着が可能です。

0.8mmの歯肉貫通部を設けたインプラントです。上顎、下顎ともに前歯部から小臼歯部の症例に適しています。歯肉が薄い症例の場合、インプラント頭部が歯肉部から露出しているため、オッセointegration後、2次外科手術を行わずアパットメントの装着が可能です。またインプラントを深めに埋入すると2回法としての使用も可能です。

歯肉貫通部を持たないインプラントです。前歯部・小臼歯部の審美性を重視する症例に適しています。歯槽骨頂よりも深めの植立が可能のため、植立直後のインプラント周囲への負荷は歯槽骨頂で受けることになり、インプラントはほぼ完全な静置状態に置かれます。そのため、骨質のよくない症例やGBRなどの症例に適しています。

先端はしっかりと皮質骨をとらえるファインエッジがあり、歯冠側頸部にはリバーブスパー、プラットフォームチェンジング形態が付与されているため審美性に優れています。軟らかい骨でも優れた初期固定が期待できます。


2 回法ノーマルタイプ

P.17~

Me-type

Me40~50×Sf

φ 4.0mm、φ 4.3mm、φ 5.0mm

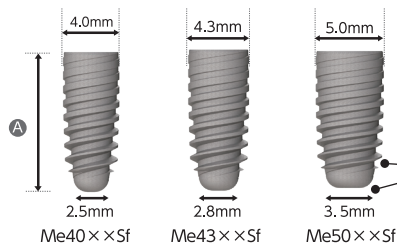

特許登録済
ファーストレッドラウンド
ボトムラウンド

インプラント体歯根側先端部と歯根側の
第一スレッド側面に粘膜に優しいラウ
ンド形態が付与されています。

1 回法ワイドタイプ


P.21~

BW-type

BW47×Sf

φ 4.7mm

プラットフォーム（最大直径部）：5.6mm

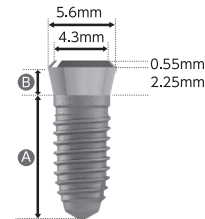

1 回法ワイドタイプ


P.21~

EW-type

EW50~70×Sf

φ 5.0mm、φ 6.0mm、φ 7.0mm

プラットフォーム（最大直径部）：EW50×Sf⇒5.6mm EW60×Sf⇒6.0mm
EW70×Sf⇒7.0mm

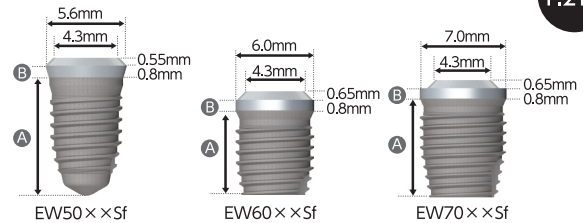


1 回法ワンピースタイプ

P.23

AⅡ-type

AⅡ30~50××

φ 3.0mm、φ 4.0mm、φ 5.0mm

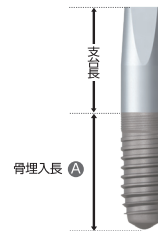


※ AⅡ-Type 表面処理上部にネジピッチ 0.2mm の
マイクロスレッド形状になっております。

Me タイプ



BWタイプ

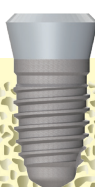

2.25 mm

EWタイプ



0.8 mm

AⅡタイプ



歯根側先端部と歯根側の第1
スレッド側面に粘膜に優しい
ラウンド形態が付与されてい
ます。歯冠側には埋入時に高
トルクが出るネックロック形
態を付与。また下顎での骨形
成高もセルフタッパがなく安
全な埋入が出来ます。




Bタイプのワイドタイプです。
大臼歯部や単独植立、臼歯部
などに適しています。細めのイ
ンプラントを選択し植立を行っ
た際、初期固定が得られない
状況でのバックアップ用や抜
歯窩などの大きな骨欠損部へ
の植立にも対応可能です。

Eタイプのワイドタイプです。
大臼歯部や単独植立、臼歯部
などに適しています。細めの
インプラントを選択し植立を
行った際、初期固定が得られ
ない状況でのバックアップ用
や抜歯窩などの大きな骨欠
損部に植立可能なインプラ
ントです。

1ピースタイプのインプラ
ントです。支台部に2面カットを
付与しています。また、歯肉貫
通部との境界部にはマイクロ
スレッドを設けています。

インプラント&アバットメントの嵌合

◆ 1 回法インプラント（嵌合ショルダー部）

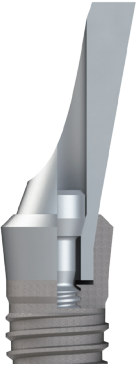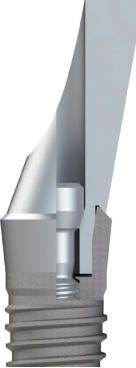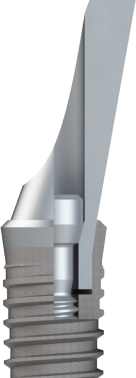	(a)：覆わない		(b)：半分覆う		(c)：全部覆う	
B33～46 BS37～46 E43, 46 BW47 EW50～70		AG××-B××HEX 		AG××-D×× 		
E33～40		AG××-B××HEX 				AG××-D×× 

◆ 2 回法インプラント

	(a)：覆わない
C37～46 St40～50 Me40～50 EW50～70	


アバットメント仕様について

プラスアバットメント

製品名称の末尾に P の表記を追加します。


例) AB35C20-L70-HEX-**P**

アバットスクリュー **P**

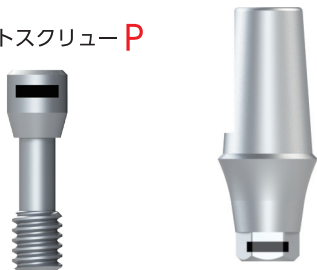

アバットメントとスクリューにマーキングがある
組合せで使用してください。

アバットリムーバー対応

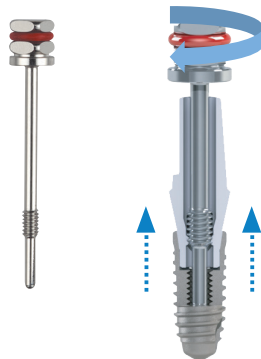


内部のネジ構造により PLUS リムーバーを回転させる
だけでアバットメントが簡単に除去できます。

アバットメント

製品名称は従来と同じ表記になります。

例) AG35-B15HEX

アバットスクリュー

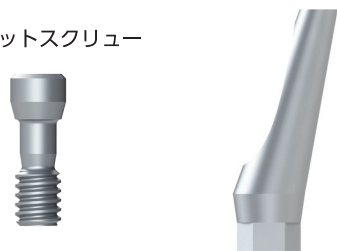

アバットメントとスクリューにマーキングがない
組合せで使用してください。

アバットリムーバー非対応

<ノーマル嵌合>

AG35-D15

AG35-D25

AG35-B15HEX

AG35-B25HEX

AG35-B15-s

AG35-B25-s

<ワイド嵌合>

AG43-D15

AG43-D25

AG43-BW15HEX


AG43-BW25HEX

AG43-BW15-s

AG43-BW25-s

注意事項

スクリューの緩みや破損が生じる恐れがあるため、
誤った組合せで使用しないでください。

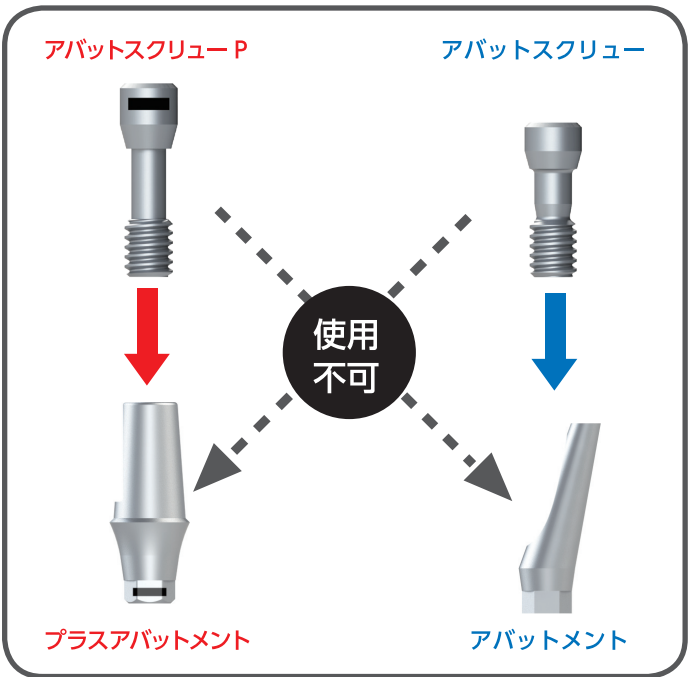

1 回法ノーマルタイプ

B-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値:40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント



φ 3.3

B3306Sf	埋入径 φ 3.3 / 埋入長 6.0mm
B3308Sf	埋入径 φ 3.3 / 埋入長 8.0mm
B3310Sf	埋入径 φ 3.3 / 埋入長 10.0mm
B3312Sf	埋入径 φ 3.3 / 埋入長 12.0mm
B3314Sf	埋入径 φ 3.3 / 埋入長 14.0mm



φ 3.7

B3706Sf	埋入径 φ 3.7 / 埋入長 6.0mm
B3708Sf	埋入径 φ 3.7 / 埋入長 8.0mm
B3710Sf	埋入径 φ 3.7 / 埋入長 10.0mm
B3712Sf	埋入径 φ 3.7 / 埋入長 12.0mm
B3714Sf	埋入径 φ 3.7 / 埋入長 14.0mm



φ 4.0

B4006Sf	埋入径 φ 4.0 / 埋入長 6.0mm
B4008Sf	埋入径 φ 4.0 / 埋入長 8.0mm
B4010Sf	埋入径 φ 4.0 / 埋入長 10.0mm
B4012Sf	埋入径 φ 4.0 / 埋入長 12.0mm
B4014Sf	埋入径 φ 4.0 / 埋入長 14.0mm



φ 4.3


B4306Sf	埋入径 φ 4.3 / 埋入長 6.0mm
B4308Sf	埋入径 φ 4.3 / 埋入長 8.0mm
B4310Sf	埋入径 φ 4.3 / 埋入長 10.0mm
B4312Sf	埋入径 φ 4.3 / 埋入長 12.0mm
B4314Sf	埋入径 φ 4.3 / 埋入長 14.0mm



φ 4.6

B4606Sf	埋入径 φ 4.6 / 埋入長 6.0mm
B4608Sf	埋入径 φ 4.6 / 埋入長 8.0mm
B4610Sf	埋入径 φ 4.6 / 埋入長 10.0mm
B4612Sf	埋入径 φ 4.6 / 埋入長 12.0mm
B4614Sf	埋入径 φ 4.6 / 埋入長 14.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン

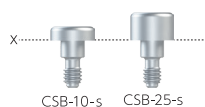

製品名	仕様
CSB-10-s	外径 φ 4.8 / 高さ 1.0mm
CSB-25-s	外径 φ 4.8 / 高さ 2.5mm

アバットメント

嵌合ショルダー部 (a)：覆わない (b)：半分覆う P.7図解

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※ HEX 嵌合タイプにはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(b)	AB35E-L35-HEX-P AB35E-L50-HEX-P AB35E-L70-HEX-P	高さ 3.5mm 高さ 5.0mm 高さ 7.0mm
(a)	AB35-HEX50L-P	高さ 5.0mm
(b)	AG35-D05-P	高さ7.0mm / 角度5°
(b)	AG35-D15 AG35-D25	高さ9.0mm / 角度15° 高さ9.0mm / 角度25°
(a)	AG35-B15HEX AG35-B25HEX	高さ9.0mm / 角度15° 高さ9.0mm / 角度25°
	アバットスクリュー	全長 6.5mm/ 材質 チタン合金
	アバットスクリュー P	全長 8.0mm/ 材質 チタン合金 ※末尾 P のアバットメントにご使用下さい

テーパ嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(b)	BS/A-35 BS/A-50 BS/A-70	高さ 3.5mm 高さ 5.0mm 高さ 7.0mm
(a)	AG35-B15-s AG35-B25-s	高さ 9.0mm / 角度15° 高さ 9.0mm / 角度25°

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(a)	TP-AB35-HEX-P	高さ 8.5mm

カスタム用アバットメント

	製品名	仕様
(a)	パターン35HEX	高さ 9.7mm/ 材質 アクリル
	S-Pin	高さ 8.2mm/ 材質 チタン合金

ボールアタッチメント 材質：純チタン

	製品名	仕様
	ボールB-s	高さ 2.4mm

※ O リング No.4 対応 ※ O リングは弊社では取り扱いはありません。別途買い求めください

1 回法ノーマルタイプ

BS-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント



φ 3.7

BS3708Sf
BS3710Sf
BS3712Sf

埋入径 φ 3.7 / 埋入長 8.0mm
埋入径 φ 3.7 / 埋入長 10.0mm
埋入径 φ 3.7 / 埋入長 12.0mm



φ 4.0

BS4008Sf
BS4010Sf
BS4012Sf

埋入径 φ 4.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径 φ 4.0 / 埋入長 10.0mm
埋入径 φ 4.0 / 埋入長 12.0mm



φ 4.3

BS4308Sf
BS4310Sf
BS4312Sf

埋入径 φ 4.3 / 埋入長 8.0mm
埋入径 φ 4.3 / 埋入長 10.0mm
埋入径 φ 4.3 / 埋入長 12.0mm




φ 4.6

BS4608Sf
BS4610Sf
BS4612Sf

埋入径 φ 4.6 / 埋入長 8.0mm
埋入径 φ 4.6 / 埋入長 10.0mm
埋入径 φ 4.6 / 埋入長 12.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン

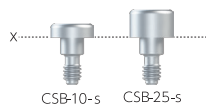

製品名

仕様

CSB-10-s
CSB-25-s

外径 φ 4.8 / 高さ 1.0mm
外径 φ 4.8 / 高さ 2.5mm

アバットメント

嵌合ショルダー部 (a)：覆わない (b)：半分覆う P.7図解

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※ HEX 嵌合タイプにはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(b)	AB35E-L35-HEX-P	高さ 3.5mm
	AB35E-L50-HEX-P	高さ 5.0mm
	AB35E-L70-HEX-P	高さ 7.0mm
(a)	AB35-HEX50L-P	高さ 5.0mm
(b)	AG35-D05-P	高さ7.0mm / 角度5°
(b)	AG35-D15	高さ9.0mm / 角度15°
	AG35-D25	高さ9.0mm / 角度25°
(a)	AG35-B15HEX	高さ9.0mm / 角度15°
	AG35-B25HEX	高さ9.0mm / 角度25°
	アバットスクリュー	全長 6.5mm/ 材質 チタン合金
	アバットスクリュー P	全長 8.0mm/ 材質 チタン合金 ※末尾 P のアバットメントにご使用下さい

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(b)	BS/A-35	高さ 3.5mm
	BS/A-50	高さ 5.0mm
	BS/A-70	高さ 7.0mm
(a)	AG35-B15-s	高さ9.0mm / 角度15°
	AG35-B25-s	高さ9.0mm / 角度25°

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(a)	TP-AB35-HEX-P	高さ 8.5mm

カスタム用アバットメント

	製品名	仕様
(a)	パターン35HEX	高さ 9.7mm/ 材質 アクリル
	S-Pin	高さ 8.2mm/ 材質 チタン合金

ボールアタッチメント 材質：純チタン

	製品名	仕様
	ボールB-s	高さ 2.4mm

※ O リング No.4 対応 ※ O リングは弊社では取り扱いはありません。別途お買い求めください

1 回法ノーマルタイプ

E-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント



φ 3.3

E3310Sf
E3312Sf
E3314Sf

埋入径φ4.0 / 埋入長 8.9mm / ネジ山径φ3.3
埋入径φ4.0 / 埋入長10.9mm / ネジ山径φ3.3
埋入径φ4.0 / 埋入長12.9mm / ネジ山径φ3.3



φ 3.7

E3708Sf
E3710Sf
E3712Sf
E3714Sf

埋入径φ4.0 / 埋入長 6.9mm / ネジ山径φ3.7
埋入径φ4.0 / 埋入長 8.9mm / ネジ山径φ3.7
埋入径φ4.0 / 埋入長10.9mm / ネジ山径φ3.7
埋入径φ4.0 / 埋入長12.9mm / ネジ山径φ3.7



φ 4.0

E4008Sf
E4010Sf
E4012Sf
E4014Sf

埋入径φ4.0 / 埋入長 6.9mm
埋入径φ4.0 / 埋入長 8.9mm
埋入径φ4.0 / 埋入長 10.9mm
埋入径φ4.0 / 埋入長 12.9mm



φ 4.3

E4308Sf
E4310Sf
E4312Sf
E4314Sf

埋入径φ4.3 / 埋入長 6.65mm
埋入径φ4.3 / 埋入長 8.65mm
埋入径φ4.3 / 埋入長 10.65mm
埋入径φ4.3 / 埋入長 12.65mm




φ 4.6

E4608Sf
E4610Sf
E4612Sf
E4614Sf

埋入径φ4.6 / 埋入長 6.65mm
埋入径φ4.6 / 埋入長 8.65mm
埋入径φ4.6 / 埋入長 10.65mm
埋入径φ4.6 / 埋入長 12.65mm

カバースクリュー 材質：純チタン


E33xx~E40xxSf対応

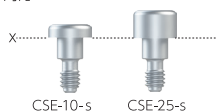

CSE-10-s
CSE-25-s

外径φ4.3 / 高さ 1.0mm
外径φ4.3 / 高さ 2.5mm

E43xx~E46xxSf対応

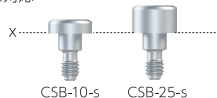

CSB-10-s
CSB-25-s



外径φ4.8 / 高さ 1.0mm
外径φ4.8 / 高さ 2.5mm

アバットメント

嵌合ショルダー部 (a)：覆わない (b)：半分覆う (c)：全部覆う P.7図解

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン


※ HEX 嵌合タイプにはスクリューが付属しています (チタン合金)

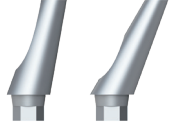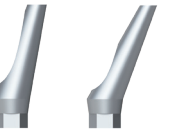		製品名	仕様
E33～40 (c)	E43,46 (b)		AB35E-L35-HEX-P 高さ 3.5mm AB35E-L50-HEX-P 高さ 5.0mm AB35E-L70-HEX-P 高さ 7.0mm
(a)	(a)		AB35-HEX50L-P 高さ 5.0mm
(c)	(b)		AG35-D05-P 高さ7.0mm / 角度5°
(c)	(b)		AG35-D15 高さ9.0mm / 角度15° AG35-D25 高さ9.0mm / 角度25°
(a)	(a)		AG35-B15HEX 高さ9.0mm / 角度15° AG35-B25HEX 高さ9.0mm / 角度25°

	アバットスクリュー	全長 6.5mm/ 材質 チタン合金
	アバットスクリュー P	全長 8.0mm/ 材質 チタン合金 ※末尾 P のアバットメントにご使用下さい

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています (チタン合金)

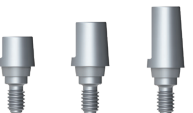		製品名	仕様
E33～40 (c)	E43,46 (b)		BS/A-35 高さ 3.5mm BS/A-50 高さ 5.0mm BS/A-70 高さ 7.0mm
(a)	(a)		AG35-B15-s 高さ9.0mm / 角度15° AG35-B25-s 高さ9.0mm / 角度25°

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

		製品名	仕様
(a)	(a)		TP-AB35-HEX-P 高さ 8.5mm

カスタム用アバットメント

		製品名	仕様
(a)	(a)		パターン35HEX 高さ 9.7mm/ 材質 アクリル S-Pin 高さ 8.2mm/ 材質 チタン合金

ボールアタッチメント 材質：純チタン

		製品名	仕様
			ボールB-s 高さ 2.4mm

※ O リング No.4 対応 ※ O リングは弊社では取り扱いはありません。別途買い求めください

アバットメント②

(E タイプを 2 回法で使用する場合：2 回法ノーマルタイプのアバットメントを使用します)

P16 をご参照ください (C-type)

2 回法ノーマルタイプ

C-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値:40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント



φ 3.7

C3708Sf

埋入径φ3.7 / 埋入長 8.0mm

C3710Sf

埋入径φ3.7 / 埋入長10.0mm

C3712Sf

埋入径φ3.7 / 埋入長12.0mm

C3714Sf

埋入径φ3.7 / 埋入長14.0mm



φ 4.0

C4008Sf

埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm

C4010Sf

埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm

C4012Sf

埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm

C4014Sf

埋入径φ4.0 / 埋入長14.0mm



φ 4.3

C4308Sf

埋入径φ4.3 / 埋入長 8.0mm

C4310Sf

埋入径φ4.3 / 埋入長10.0mm

C4312Sf

埋入径φ4.3 / 埋入長12.0mm

C4314Sf

埋入径φ4.3 / 埋入長14.0mm



φ 4.6

C4608Sf

埋入径φ4.6 / 埋入長 8.0mm

C4610Sf

埋入径φ4.6 / 埋入長10.0mm


C4612Sf

埋入径φ4.6 / 埋入長12.0mm

C4614Sf

埋入径φ4.6 / 埋入長14.0mm

ヒーリングキャップ 材質：純チタン

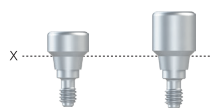


HC-30-s

外径φ4.8 / 高さ 3.0mm

HC-50-s

外径φ4.8 / 高さ 5.0mm

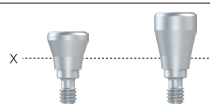


HC-30T-s

外径φ4.8 / 高さ 3.0mm

HC-50T-s

外径φ4.8 / 高さ 5.0mm

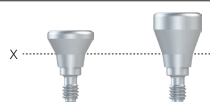


HC-30TW-s

外径φ5.6 / 高さ 3.0mm

HC-50TW-s

外径φ5.6 / 高さ 5.0mm

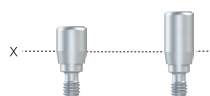

HC-30ST-s

外径φ3.5 / 高さ 3.0mm

HC-50ST-s

外径φ3.5 / 高さ 5.0mm

アバットメント②

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※ HEX 嵌合タイプにはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	AB35C10-L35-HEX-P	高さ3.5mm / カフ長1.0mm
	AB35C20-L35-HEX-P	高さ3.5mm / カフ長2.0mm
	AB35C30-L35-HEX-P	高さ3.5mm / カフ長3.0mm
	AB35C10-L50-HEX-P	高さ5.0mm / カフ長1.0mm
	AB35C20-L50-HEX-P	高さ5.0mm / カフ長2.0mm
	AB35C30-L50-HEX-P	高さ5.0mm / カフ長3.0mm
	AB35C10-L70-HEX-P	高さ7.0mm / カフ長1.0mm
	AB35C20-L70-HEX-P	高さ7.0mm / カフ長2.0mm
	AB35C30-L70-HEX-P	高さ7.0mm / カフ長3.0mm
	AG35C-D05-P	高さ7.0mm / カフ長1.0mm / 角度5°
	AG35C-D15-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度15°
	AG35C-D25-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度25°
	AG35C10-HEX15-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度15°
	AG35C20-HEX15-P	高さ9.0mm / カフ長2.0mm / 角度15°
	AG35C30-HEX15-P	高さ9.0mm / カフ長3.0mm / 角度15°
	AG35C10-HEX25-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度25°
	AG35C20-HEX25-P	高さ9.0mm / カフ長2.0mm / 角度25°
	アバットスクリューP	全長 8.0mm/ 材質 チタン合金 ※末尾 P のアバットメントに使用して下さい

C
タイプ

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	AG35-C15-s-P	高さ9.0mm / カフ長1.5mm / 角度15°
	AG35-C25-s-P	高さ9.0mm / カフ長1.5mm / 角度25°

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	TP-AB35-HEX-P	高さ 8.5mm

カスタム用アバットメント

	製品名	仕様
	パターン35HEX	高さ 9.7m / 材質 アクリル
	S-Pin	全長 8.2mm / 材質 チタン合金

ボールアタッチメント 材質：純チタン

	製品名	仕様
	ボールC20-s	高さ 2.4mm / カフ長2.0m

2 回法ノーマルタイプ

St/Me-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

St-type



φ 4.0

St4008Sf
St4010Sf
St4012Sf
St4014Sf

埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長14.0mm



φ 4.3

St4308Sf
St4310Sf
St4312Sf
St4314Sf

埋入径φ4.3 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長12.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長14.0mm



φ 5.0

St5008Sf
St5010Sf
St5012Sf

埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm

Me-type



φ 4.0

Me4008Sf
Me4010Sf
Me4012Sf

埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm



φ 4.3

Me4308Sf
Me4310Sf
Me4312Sf

埋入径φ4.3 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長12.0mm




φ 5.0

Me5008Sf
Me5010Sf
Me5012Sf


埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm

ヒーリングキャップ 材質：純チタン

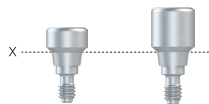


HC-30-s
HC-50-s

外径φ4.8 / 高さ 3.0mm
外径φ4.8 / 高さ 5.0mm

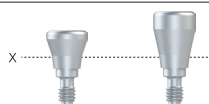


HC-30T-s
HC-50T-s

外径φ4.8 / 高さ 3.0mm
外径φ4.8 / 高さ 5.0mm

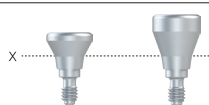

HC-30TW-s
HC-50TW-s

外径φ5.6 / 高さ 3.0mm
外径φ5.6 / 高さ 5.0mm

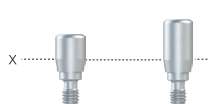

HC-30ST-s
HC-50ST-s

外径φ3.5 / 高さ 3.0mm
外径φ3.5 / 高さ 5.0mm

アバットメント

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※ HEX 嵌合タイプにはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	AB35C10-L35-HEX-P	高さ3.5mm / カフ長1.0mm
	AB35C20-L35-HEX-P	高さ3.5mm / カフ長2.0mm
	AB35C30-L35-HEX-P	高さ3.5mm / カフ長3.0mm
	AB35C10-L50-HEX-P	高さ5.0mm / カフ長1.0mm
	AB35C20-L50-HEX-P	高さ5.0mm / カフ長2.0mm
	AB35C30-L50-HEX-P	高さ5.0mm / カフ長3.0mm
	AB35C10-L70-HEX-P	高さ7.0mm / カフ長1.0mm
	AB35C20-L70-HEX-P	高さ7.0mm / カフ長2.0mm
	AB35C30-L70-HEX-P	高さ7.0mm / カフ長3.0mm
	AG35C-D05-P	高さ7.0mm / カフ長1.0mm / 角度5°
	AG35C-D15-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度15°
	AG35C-D25-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度25°
	AG35C10-HEX15-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度15°
	AG35C20-HEX15-P	高さ9.0mm / カフ長2.0mm / 角度15°
	AG35C30-HEX15-P	高さ9.0mm / カフ長3.0mm / 角度15°
	AG35C10-HEX25-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度25°
	AG35C20-HEX25-P	高さ9.0mm / カフ長2.0mm / 角度25°
	アバットスクリューP	全長 8.0mm/ 材質 チタン合金 ※末尾 P のアバットメントに使用して下さい

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	AG35-C15-s-P	高さ9.0mm / カフ長1.5mm / 角度15°
	AG35-C25-s-P	高さ9.0mm / カフ長1.5mm / 角度25°

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	TP-AB35-HEX-P	高さ 8.5mm

カスタム用アバットメント

	製品名	仕様
	パターン35HEX	高さ 9.7mm / 材質 アクリル
	S-Pin	全長 8.2mm / 材質 チタン合金

ボールアタッチメント 材質：純チタン

	製品名	仕様
	ボールC20-s	高さ 2.4mm / カフ長2.0mm

マルチピースアバットメント


再使用禁止

マルチピースアバットメント

テーパー嵌合タイプ (1P)

材質：純チタン

C= カフ長

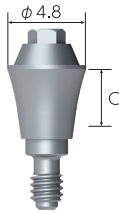


製品名	仕様
MP-AB35C10-s	φ4.8 / カフ長1.0mm
MP-AB35C20-s	φ4.8 / カフ長2.0mm
MP-AB35C30-s	φ4.8 / カフ長3.0mm
MP-AB35C40-s	φ4.8 / カフ長4.0mm
MP-AB35C50-s	φ4.8 / カフ長5.0mm

HEX嵌合タイプ (2P)

材質：純チタン スクリュー材質：チタン合金

※HEX嵌合タイプにはMP-AB35C××-HEX専用スクリューが付属されています C=カフ長

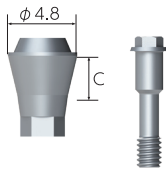


製品名	仕様
MP-AB35C10-HEX	φ4.8 / カフ長1.0mm
MP-AB35C20-HEX	φ4.8 / カフ長2.0mm
MP-AB35C30-HEX	φ4.8 / カフ長3.0mm
MP-AB35C40-HEX	φ4.8 / カフ長4.0mm
MP-AB35C50-HEX	φ4.8 / カフ長5.0mm


アングルタイプ

材質：純チタン スクリュー材質：チタン合金


※アングルタイプには MP-AG スクリューが付属されています C=カフ長

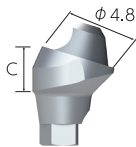

製品名	仕様
MP-AG35C25-HEX17	φ4.8 / カフ長2.5mm / 角度17°
MP-AG35C35-HEX17	φ4.8 / カフ長3.5mm / 角度17°
MP-AG35C45-HEX17	φ4.8 / カフ長4.5mm / 角度17°
MP-AG35C55-HEX17	φ4.8 / カフ長5.5mm / 角度17°

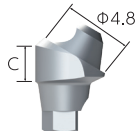

製品名	仕様
MP-AG35C35-HEX30	φ4.8 / カフ長3.5mm / 角度30°
MP-AG35C45-HEX30	φ4.8 / カフ長4.5mm / 角度30°

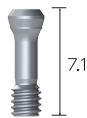


製品名	仕様
MP-AGスクリュー (2個入り)	全長 7.1mm / 材質 チタン合金

マルチピース用シリンダー

材質：純チタン

※シリンダーには MP・シリンダースクリューが付属されています

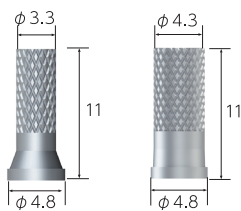

製品名	仕様
MP-シリンダー33	φ3.3 / φ4.8 高さ11mm
MP-シリンダー43	φ4.3 / φ4.8 高さ11mm

※削合可能範囲は先端方向から6mm



製品名	仕様
MP-シリンダースクリュー (2個入り)	全長 3.9mm / 材質 チタン合金

キャップ

材質：純チタン




製品名	仕様
MP-CAP-47	高さ4.7mm
MP-CAP-67	高さ6.7mm

再使用禁止

印象&技工パーツ


技工用パターン 材質：アクリル

製品名	仕様
MP パターン	高さ12.5mm

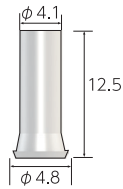

技工用レプリカ 材質：ステンレス


製品名	仕様
MP レプリカ	高さ15mm

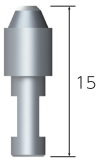

印象用コーピング 材質：純チタン

製品名	仕様
MP コーピング-OPT	高さ14.8mm


オープン・トレイ用

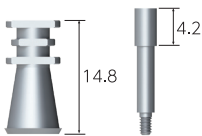

※スクリーンが付属されています

技工用スクリュー 材質：チタン合金

製品名	仕様
① 技工用MP-シリンダースクリュー (2個入) ② 技工用MP-AGスクリュー (2個入)	

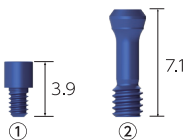

〈取り付け方法〉

締付ドライバー(コントラ用)




※対応アバットメント：テーパー嵌合タイプ
HEX 嵌合タイプ

締付ドライバー(レンチ用)



※対応アバットメント：テーパー嵌合タイプ
HEX 嵌合タイプ

締付トルクガイド

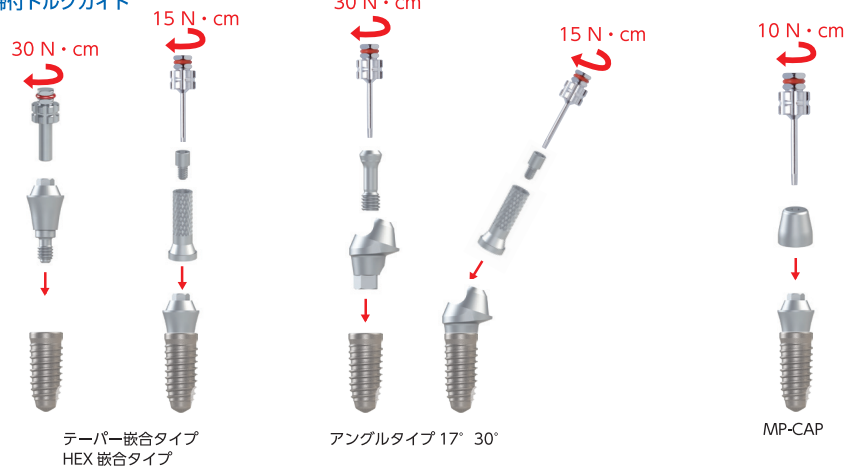

注意
・MP-シリンダースクリューの締付けトルクは15Ncmを超えないようにしてください。破損する恐れがあります。
・上部構造には必ずMP-シリンダーを使用して製作してください。

Cタイプ

Sタイプ

Mタイプ

1 回法ワイドタイプ

BW/EW-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP43-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

製品名

仕様

BW-type



φ 4.7

BW4708Sf
BW4710Sf
BW4712Sf

埋入径φ4.7 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.7 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.7 / 埋入長12.0mm

EW-type



φ 5.0

EW5006Sf
EW5008Sf
EW5010Sf
EW5012Sf

埋入径φ5.0 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm



φ 6.0

EW6006Sf
EW6008Sf
EW6010Sf

埋入径φ6.0 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ6.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ6.0 / 埋入長10.0mm



φ 7.0


EW7006Sf
EW7008Sf
EW7010Sf

埋入径φ7.0 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ7.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ7.0 / 埋入長10.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン

製品名

仕様

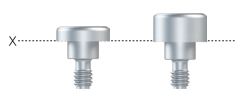


CSBW-10-s
CSBW-25-s

外径φ5.6 / 高さ1.0mm
外径φ5.6 / 高さ2.5mm

ヒーリングキャップ 材質：純チタン


製品名

仕様

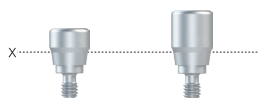

HCW-30-s
HCW-50-s

外径φ4.8 / 高さ3.0mm
外径φ4.8 / 高さ5.0mm

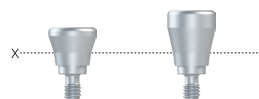

HCW-30T-s
HCW-50T-s

外径φ5.6 / 高さ3.0mm
外径φ5.6 / 高さ5.0mm

締付トルク値:30Ncm

再使用禁止

アバットメント

BW-type, EW-type 共通

嵌合ショルダー部 (a)：覆わない (b)：半分覆う P.7 図解

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※ HEX 嵌合タイプにはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(b)	 AB43H-L35-HEX-P 高さ3.5mm AB43H-L50-HEX-P 高さ5.0mm AB43H-L70-HEX-P 高さ7.0mm	
(a)	 AB43-HEX50L-P 高さ5.0mm AB43-HEX70L-P 高さ7.0mm	
(a)	 AB43C10-L50-HEX-P 高さ5.0mm / カブ長1.0mm AB43C10-L70-HEX-P 高さ7.0mm / カブ長1.0mm	
(a)	 AG43-D05-P 高さ7.0mm / 角度5°	
(a)	 AG43-D15 高さ9.0mm / 角度15° AG43-D25 高さ9.0mm / 角度25°	
(a)	 AG43-BW15HEX 高さ9.0mm / 角度15° AG43-BW25HEX 高さ9.0mm / 角度25°	
	 アバットスクリュー 全長6.5mm / 材質 チタン合金	
	 アバットスクリューP 全長8.0mm / 材質 チタン合金 ※末尾 P のアバットメントにご使用下さい	

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(b)	 WS/A-35 高さ 3.5mm WS/A-50 高さ 5.0mm WS/A-70 高さ 7.0mm	
(a)	 AG43-BW15-s 高さ 9.0mm/ 角度 15° AG43-BW25-s 高さ 9.0mm/ 角度 25°	

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(a)	 TP-AB43-HEX-P 高さ 8.5mm	

カスタム用アバットメント

	製品名	仕様
(a)	 パターン43HEX 高さ10.1mm / 材質 アクリル	
	 S-Pin 全長8.2mm / 材質 チタン合金	

ボールアタッチメント 材質：純チタン

	製品名	仕様
	 ボールBW-s 高さ 2.4mm	

※ O リング No.4 対応 ※ O リングは弊社では取り扱いはありません。別途お買い求めください

1 回法ワンピースタイプ

AⅡ-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

製品名

仕様



φ 3.0

AⅡ 3008-07

埋入径φ3.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 7.0mm

AⅡ 3008-09

埋入径φ3.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 9.0mm

AⅡ 3010-07

埋入径φ3.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 7.0mm

AⅡ 3010-09


埋入径φ3.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 9.0mm

AⅡ 3012-09

埋入径φ3.0 / 埋入長12.0mm / 支台長 9.0mm

AⅡ 3012-11

埋入径φ3.0 / 埋入長12.0mm / 支台長11.0mm

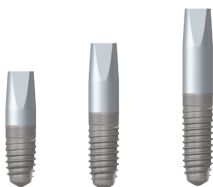

φ 4.0

AⅡ 4008-07

埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 7.0mm

AⅡ 4008-09

埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 9.0mm

AⅡ 4010-07

埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 7.0mm

AⅡ 4010-09


埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 9.0mm

AⅡ 4012-09

埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm / 支台長 9.0mm

AⅡ 4012-11

埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm / 支台長11.0mm

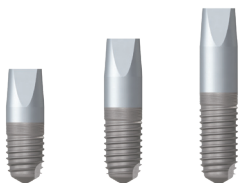

φ 5.0

AⅡ 5008-07

埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 7.0mm

AⅡ 5008-09

埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 9.0mm

AⅡ 5010-07

埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 7.0mm

AⅡ 5010-09

埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 9.0mm

AⅡ 5012-09

埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm / 支台長 9.0mm

AⅡ 5012-11

埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm / 支台長11.0mm

印象&技工パーツ


B-type・BS-type・E-type (E43~46××Sf) 兼用

再使用禁止


印象&技工パーツ

① インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

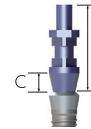	製品名	仕様
クローズド・トレイ用		
	N-M3コーピング S	高さ 9.8mm (C 1.8mm)
	N-M3コーピング M	高さ 10.8mm (C 2.8mm)
	N-M3コーピング L	高さ 12.5mm (C 4.8mm)
オープン・トレイ用		
	N-MEコーピング S	高さ 14.2mm (C 3.1mm)
	N-MEコーピング M	高さ 15.2mm (C 4.1mm)
	N-MEコーピング L	高さ 17.2mm (C 6.1mm)

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

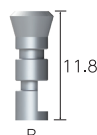	製品名	仕様
	レプリカB-HEX-s	〈対応インプラント〉 B××Sf
	レプリカB-HEX-s (3個入)	BS××Sf E43~46××Sf

印象パーツセット


	製品名	仕様
クローズド・トレイ用印象セット		
	Bタイプ用 N-M3コーピング S印象セット	N-M3コーピング S レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-M3コーピング M印象セット	N-M3コーピング M レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-M3コーピング L印象セット	N-M3コーピング L レプリカB-HEX-s
オープン・トレイ用印象セット		
	Bタイプ用 N-MEコーピング S印象セット	N-MEコーピング S レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-MEコーピング M印象セット	N-MEコーピング M レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-MEコーピング L印象セット	N-MEコーピング L レプリカB-HEX-s

② アバットメントレベル印象

印象パーツ&技工パーツ 材質：アクリル

	製品名	仕様
	HAT35L (10個入)	〈対応アバットメント〉 AB35E-L××-HEX-P, BS/A-××

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

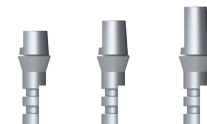	製品名	仕様
	レプリカN-35L レプリカN-50L レプリカN-70L	〈対応アバットメント〉 AB35E-L××-HEX-P, BS/A-××


E-type (E33～40××Sf)

再使用禁止


印象&技工パーツ

① インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

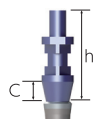	製品名	仕様
クローズド・トレー用		
	N-M3コーピング S	高さ 9.8mm (C 1.8mm)
	N-M3コーピング M	高さ 10.8mm (C 2.8mm)
	N-M3コーピング L	高さ 12.5mm (C 4.8mm)
オープン・トレー用		
	N-MEコーピング S	高さ 14.2mm (C 3.1mm)
	N-MEコーピング M	高さ 15.2mm (C 4.1mm)
	N-MEコーピング L	高さ 17.2mm (C 6.1mm)

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

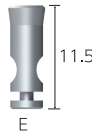	製品名	仕様
	レプリカE-HEX-s	〈対応インプラント〉 E33～40××Sf
	レプリカE-HEX-s (3 個入)	

印象パーツセット

	製品名	仕様
クローズド・トレー用印象セット		
	Eタイプ用 N-M3コーピングS印象セット	N-M3コーピングS レプリカE-HEX-s
	Eタイプ用 N-M3コーピングM印象セット	N-M3コーピングM レプリカE-HEX-s
	Eタイプ用 N-M3コーピング L印象セット	N-M3コーピングL レプリカE-HEX-s
オープン・トレー用印象セット		
	Eタイプ用 N-MEコーピング S印象セット	N-MEコーピングS レプリカE-HEX-s
	Eタイプ用 N-MEコーピングM印象セット	N-MEコーピングM レプリカE-HEX-s
	Eタイプ用 N-MEコーピング L印象セット	N-MEコーピングL レプリカE-HEX-s

※E43××Sf,E46××SfはレプリカB-HEX-sになります。

E
タイプ
33
～
40

C-type・St-type・Me-type兼用


再使用禁止

印象&技工パーツ


①インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

	製品名	仕様
クローズド・トレー用		
	N-M3コーピング S	高さ9.8mm (C 1.8mm)
	N-M3コーピングM	高さ10.8mm (C 2.8mm)
	N-M3コーピング L	高さ12.5mm (C 4.8mm)

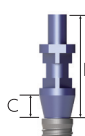オープン・トレー用		
	N-MEコーピング S	高さ14.2mm (C 3.1mm)
	N-MEコーピングM	高さ15.2mm (C 4.1mm)
	N-MEコーピング L	高さ17.2mm (C 6.1mm)

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

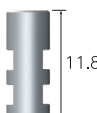	製品名	仕様
	レプリカC-HEX-s	〈対応インプラント〉 CxxxxSf StxxxxSf MexxxxxSf
	レプリカC-HEX-s (3個入)	

印象パーツセット


	製品名	仕様
クローズド・トレー用印象セット		
	Cタイプ用 N-M3 コーピング S 印象セット	N-M3コーピングS レプリカC-HEX-s
	Cタイプ用 N-M3 コーピングM印象セット	N-M3コーピングM レプリカC-HEX-s
	Cタイプ用 N-M3 コーピング L 印象セット	N-M3コーピングL レプリカC-HEX-s
オープン・トレー用印象セット		
	Cタイプ用 N-ME コーピング S 印象セット	N-MEコーピングS レプリカC-HEX-s
	Cタイプ用 N-ME コーピングM印象セット	N-MEコーピングM レプリカC-HEX-s
	Cタイプ用 N-ME コーピング L 印象セット	N-MEコーピングL レプリカC-HEX-s

②アバットメントレベル印象

印象パーツ&技工パーツ 材質：アクリル

	製品名	仕様
	HAT35L (10個入)	〈対応アバットメント〉 AB35Cxx-Lxx-HEX-P

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

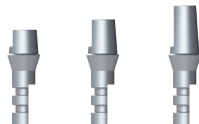	製品名	仕様
	レプリカN-35L レプリカN-50L レプリカN-70L	〈対応アバットメント〉 AB35Cxx-Lxx-HEX-P

BW-type・EW-type兼用

再使用禁止


印象&技工パーツ

①インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：純チタン

	製品名	仕様
クローズド・トレー用		
	W-M3コーピング S	高さ 10.3mm (C1.8mm)
	W-M3コーピング L	高さ 13.0mm (C4.5mm)
オープン・トレー用		
	W-MEコーピング	高さ 14.5mm (C3.0mm)

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

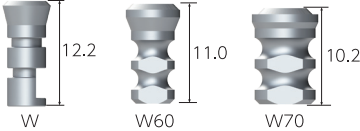	製品名	仕様
	レプリカW-HEX-s	〈対応インプラント〉 BW47××Sf
	レプリカW-HEX-s (3個入)	EW50××Sf
	レプリカW60-HEX-s	〈対応インプラント〉 EW60××Sf
	レプリカW70-HEX-s	〈対応インプラント〉 EW70××Sf

印象パーツセット BW47, EW50 対応

	製品名	仕様
クローズド・トレー用印象セット		
	W-M3コーピング S 印象セット	W-M3コーピングS レプリカW-HEX-s *
	W-M3コーピング L 印象セット	W-M3コーピングL レプリカW-HEX-s *
オープン・トレー用印象セット		
	W-MEコーピング 印象セット	W-ME コーピング レプリカ W-HEX-s *


※ EW60××Sf→レプリカW60-HEX-s
EW70××Sf→レプリカW70-HEX-s

②アバットメントレベル印象

印象パーツ&技工パーツ

	製品名	仕様
	HAT43L (10 個入)	〈対応インプラント〉 BW47xxSf, EW50xxSf 〈対応アバットメント〉 AB43H-Lxx-HEX-P, WS/A-xx AB43C10-Lxx-HEX

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

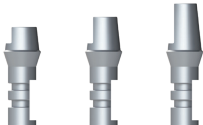	製品名	仕様
	レプリカW-35L レプリカW-50L レプリカW-70L	〈対応インプラント〉 BW47xxSf, EW50xxSf 〈対応アバットメント〉 AB43H-Lxx-HEX-P, WS/A-xx AB43C10-Lxx-HEX


1 回法ノーマルタイプ

B-type ϕ 3.3 ϕ 3.7 ϕ 4.0 ϕ 4.3 ϕ 4.6

BS-type ϕ 3.7 ϕ 4.0 ϕ 4.3 ϕ 4.6

E-type ϕ 3.3 ϕ 3.7 ϕ 4.0 ϕ 4.3 ϕ 4.6

インプラントレベル印象

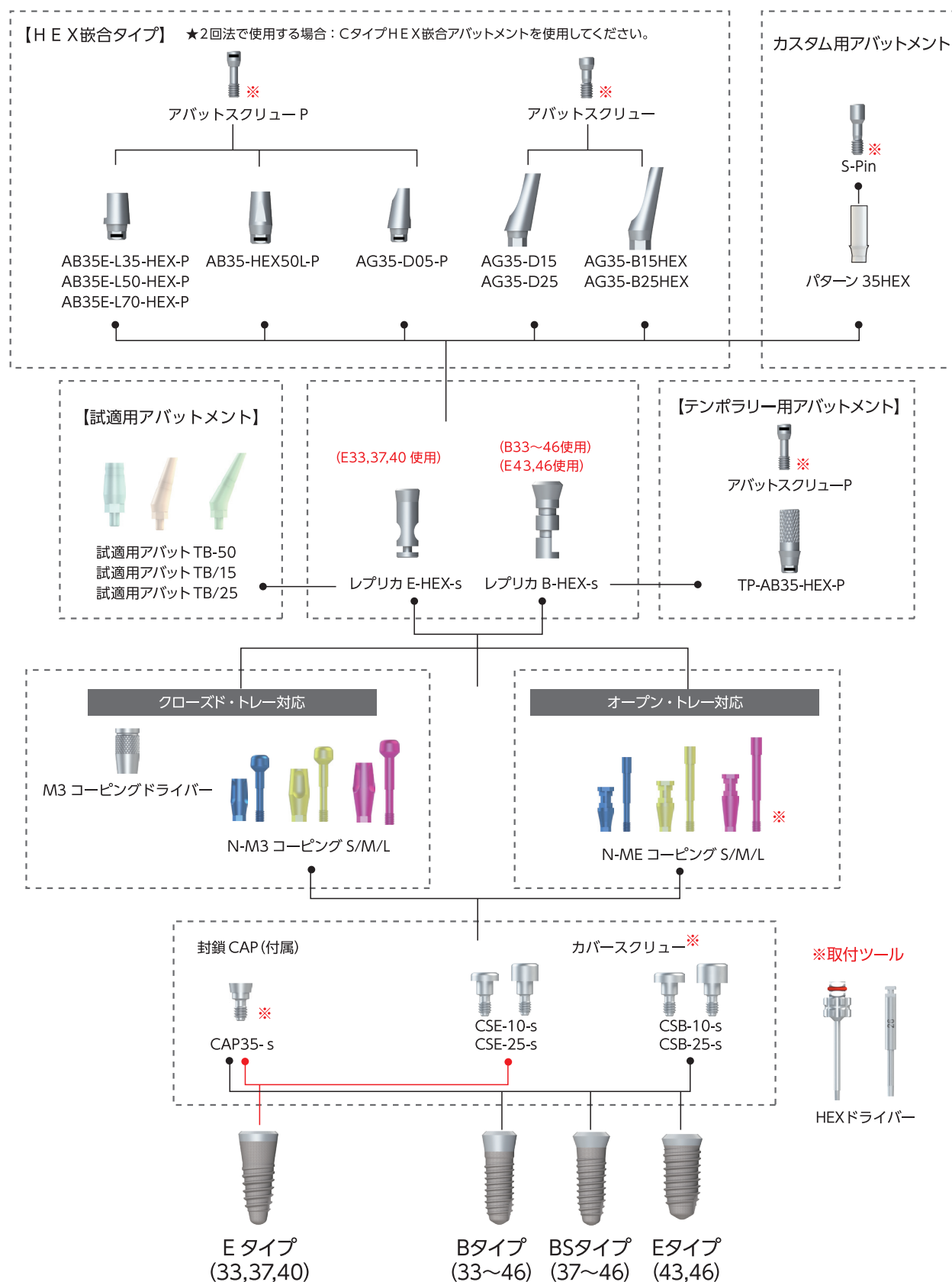


アバットメントレベル印象

パターン

※パターンでの使用は加工が必要です



印象パーツ

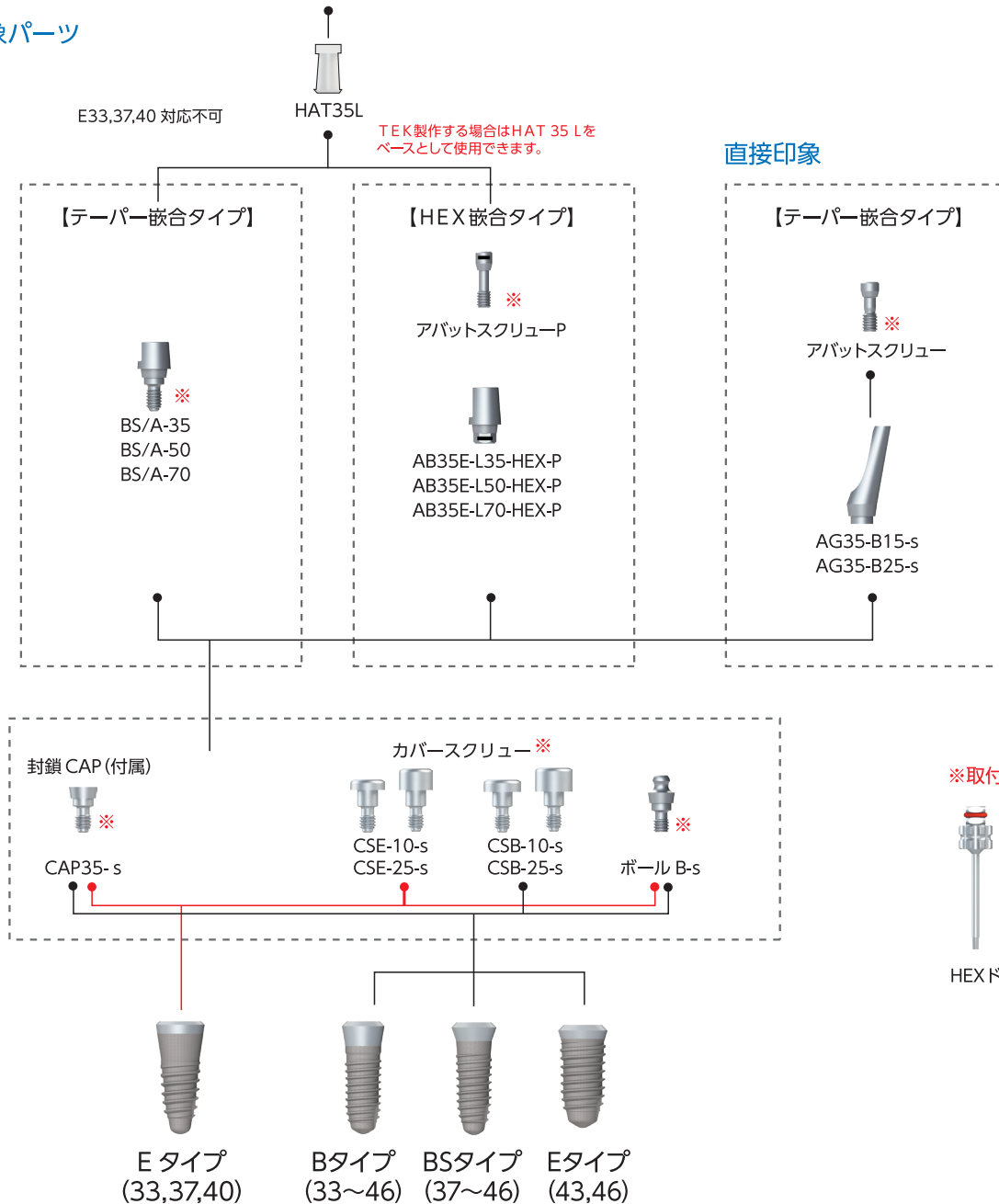

直接印象


※取付ツール



2 回法ノーマルタイプ

C-type	φ 3.3	φ 3.7	φ 4.0	φ 4.3	φ 4.6
St-type			φ 4.0	φ 4.3	φ 5.0
Me-type			φ 4.0	φ 4.3	φ 5.0

インプラントレベル印象

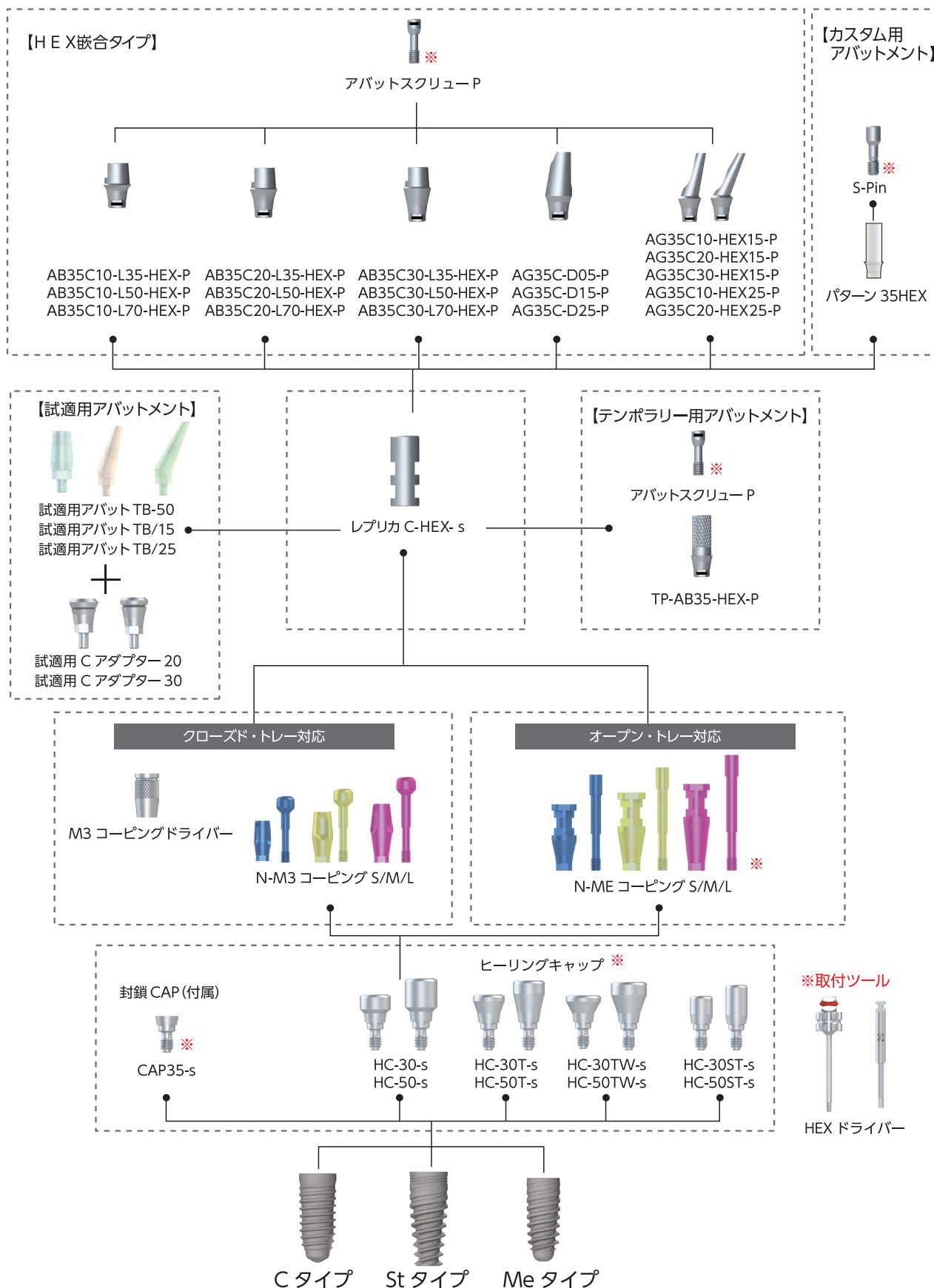


アバットメントレベル印象

※パターンでの使用は加工が必要です

パターン




印象パーツ

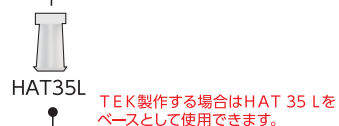


直接印象

【テーパー嵌合タイプ】

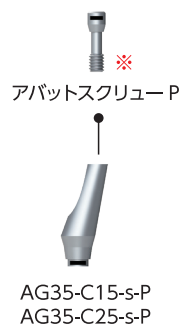

【HEX嵌合タイプ】

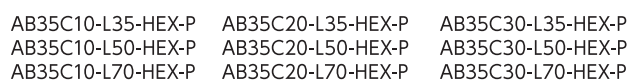

ヒーリングキャップ ※

封鎖CAP (付属)



※取付ツール



C タイプ St タイプ Me タイプ


C
タイプ

St
タイプ


Me
タイプ

マルチピースアバットメント

インプラントレベル印象

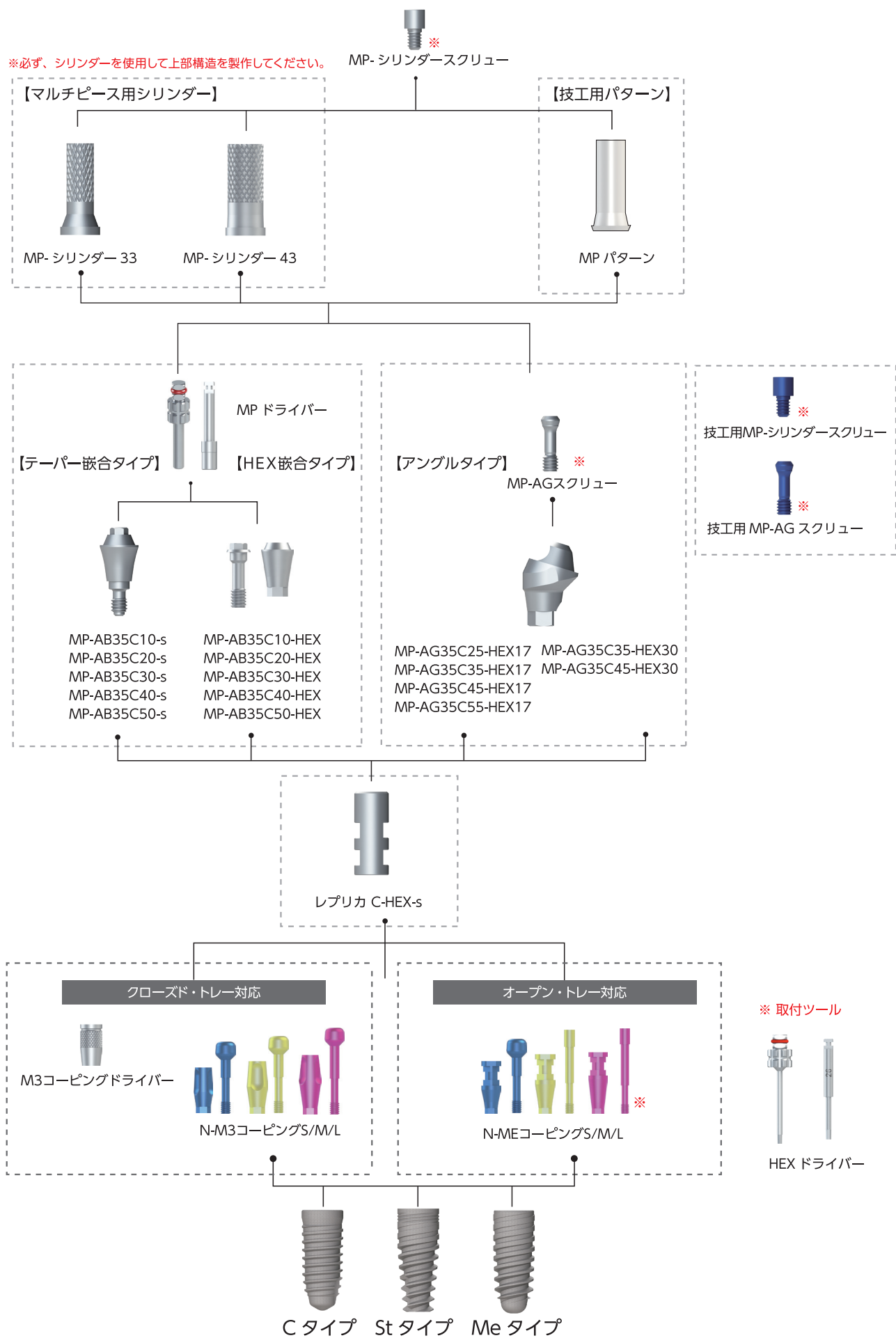

アバットメントレベル印象

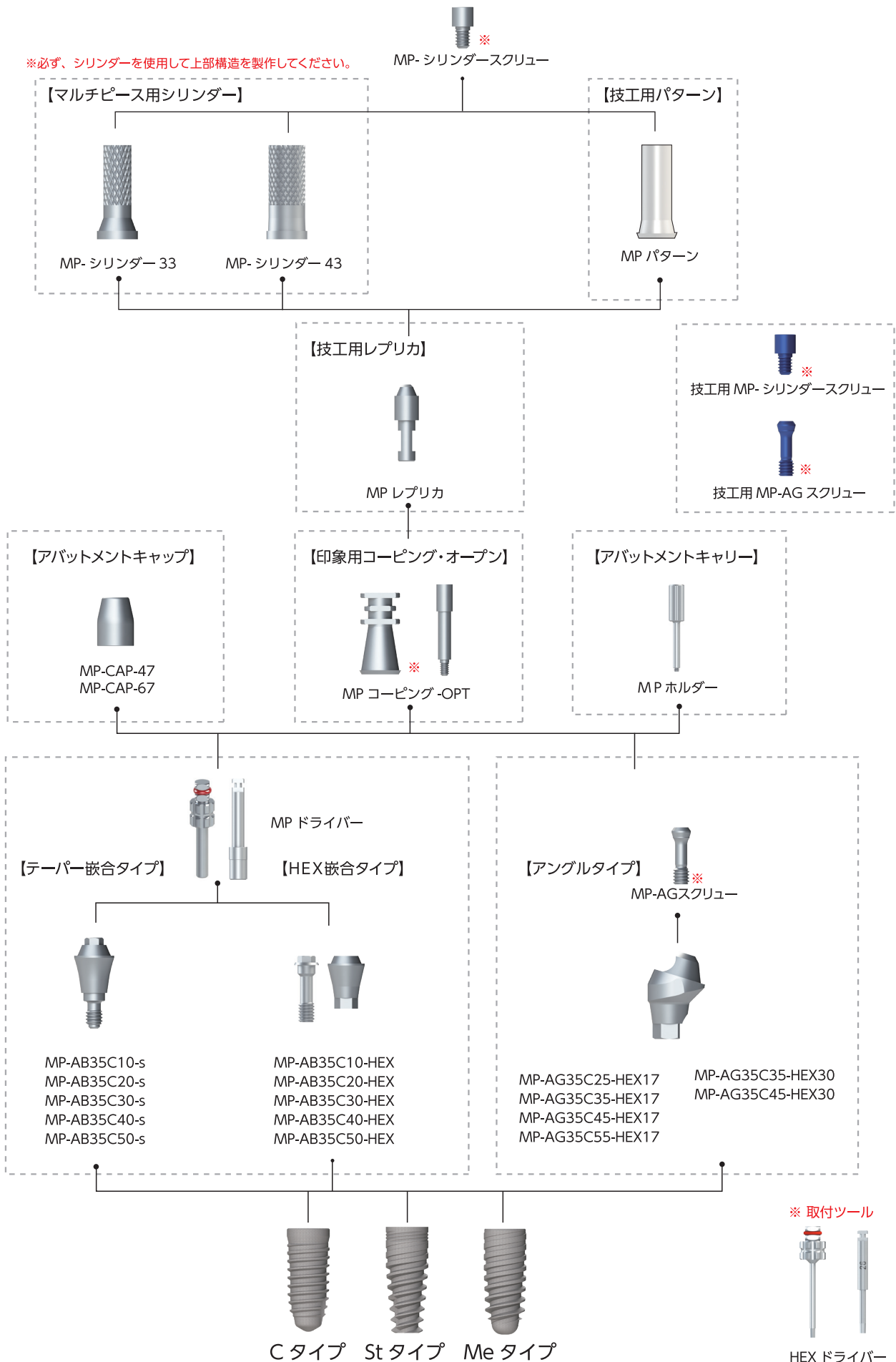

Cタイプ

Stタイプ


Meタイプ

1 回法ワイドタイプ

BW-type ϕ 4.7


EW-type ϕ 5.0 ϕ 6.0 ϕ 7.0

インプラントレベル印象

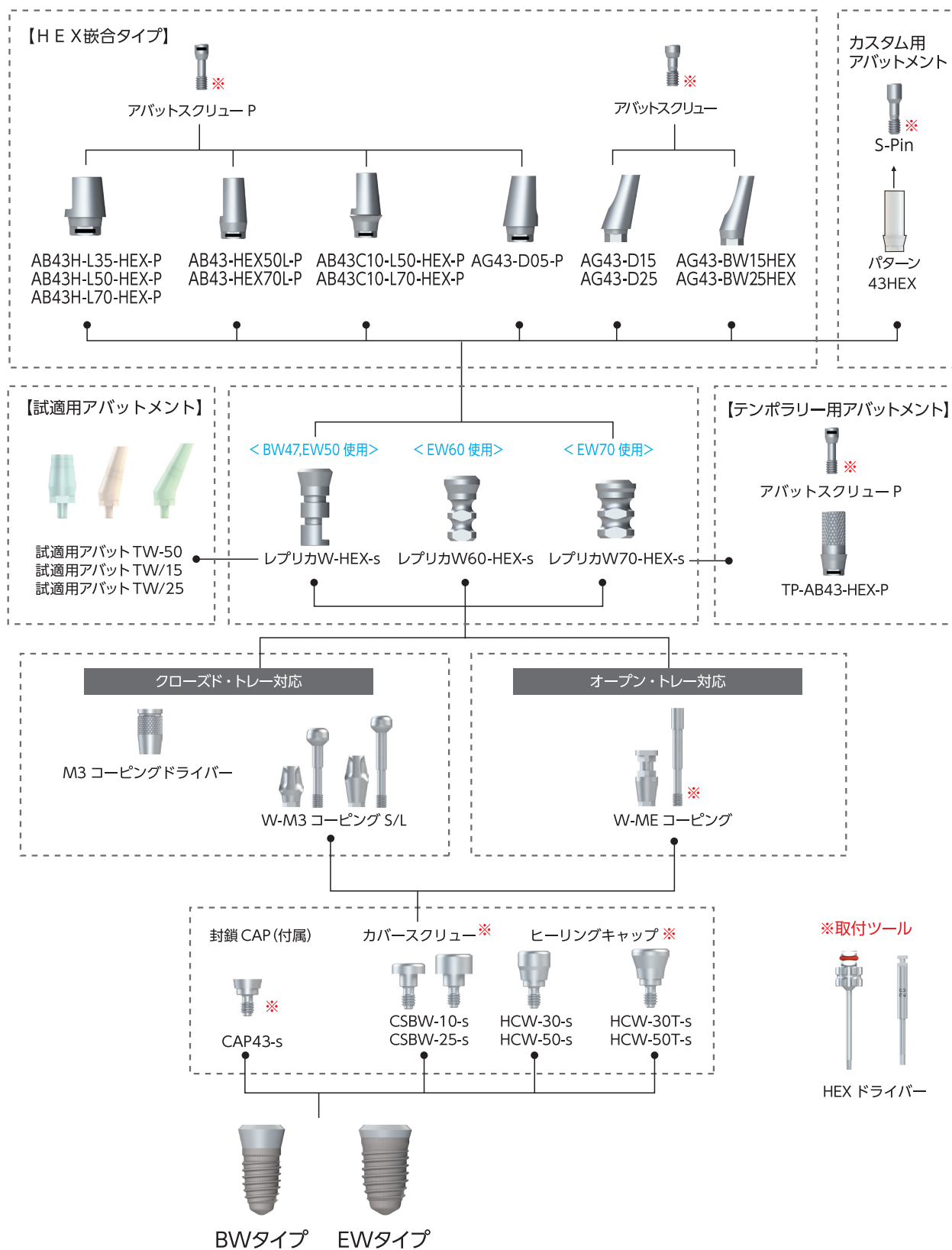

アバットメントレベル印象


パターン

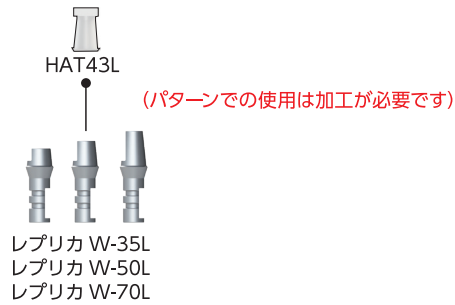

印象パーツ

EW60, 70対応不可

HAT43L
TEK製作する場合はHAT 43 Lを
ベースとして使用できます。

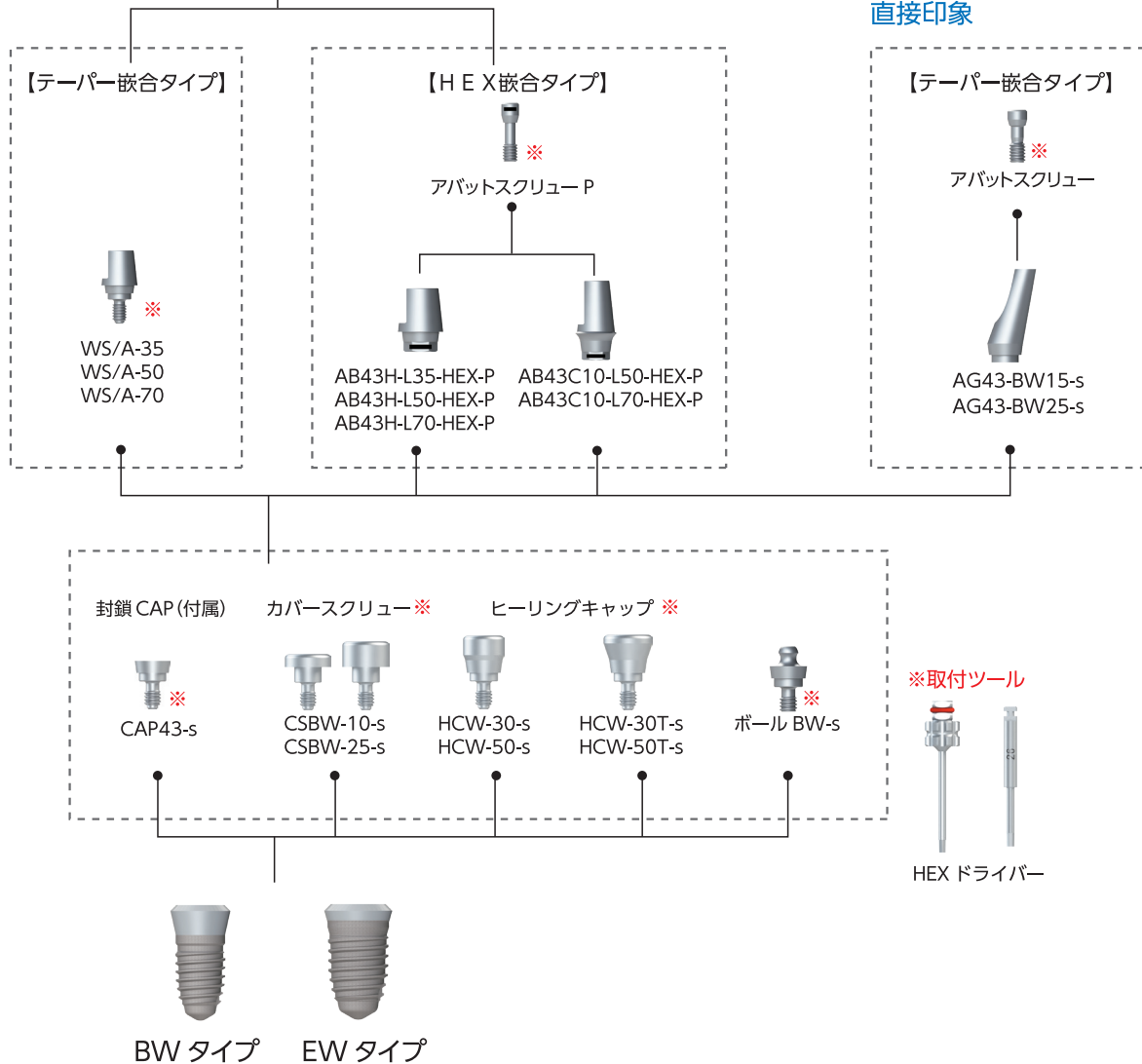

試適用アバットメント


B、BS、C、E、St、Me-type用(ノーマルタイプ)

製品名	仕様
 試適用アバット TB-50 (3 個入り)	高さ5.0mm/ストレート 材質：アクリル
 試適用アバット TB/15 (3 個入り)	高さ9.0mm/角度15° 材質：アクリル
 試適用アバット TB/25 (3 個入り)	高さ9.0mm/角度25° 材質：アクリル
 試適用 C アダプター 20	高さ2.0mm 材質：純チタン
 試適用 C アダプター 30	高さ3.0mm 材質：純チタン









BW、EW-type用(ワイドタイプ)

製品名	仕様
 試適用アバット TW-50 (3 個入り)	高さ5.0mm/ストレート 材質：アクリル
 試適用アバット TW/15 (3 個入り)	高さ 9.0mm/ 角度 15° 材質：アクリル
 試適用アバット TW/25 (3 個入り)	高さ9.0mm / 角度25° 材質：アクリル

Drills & Tools

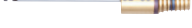	製品名	仕様
	ラウンドバーφ1.4	φ1.4mm/全長34.0mm 植立孔の位置決めマーキングに使用します。
	リンデマンドリル	最大部φ2.1mm/全長31.5mm 皮質骨を貫通させるために使用します。
	ガイドドリル20	φ2.0mm / 全長34.7mm インプラント埋入長に合わせた植立孔の深さと 植立方向の決定を行います。
	スパイラルドリル25	φ2.5mm / 全長34.7mm φ3.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル28	φ2.8mm / 全長34.7mm φ3.3mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル32	φ3.2mm / 全長34.7mm φ3.7mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル35	φ3.5mm / 全長34.7mm φ4.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル38	φ3.8mm/全長34.7mm φ4.3mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル41	φ4.1mm/ 全長 34.7mm φ4.6mm φ4.7mm インプラント最終ドリル
	スパイラルドリル45	φ4.5mm/全長34.7mm φ5.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル47.5	φ4.75mm / 全長34.7mm
	スパイラルドリル56	φ5.6mm/全長29.5mm φ6.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル66	φ6.6mm/全長29.5mm φ7.0mmインプラント最終ドリル
	ドリルストッパー7	スパイラルドリル25～47.5に使用できます 赤字はドリル露出の長さを示します。
	ドリルストッパー9	
	ドリルストッパー11	
	ドリルストッパー13	
	ドリルストッパー6	スパイラルドリル25～47.5に使用できます 赤字はドリル露出の長さを示します。
	ドリルストッパー8	
	ドリルストッパー10	
	ドリルストッパー12	
	ドリルストッパー14	
	Tap30-33	全長35.0mm 骨が硬い場合に、植立孔入口をタップ形成し、 インプラントを挿入しやすくします。手動の 際は、ドリルホルダー10を装着してご使用 ください。
	Tap37-40	
	Tap46-50	
	Tap60-70	
	デプスメジャー	全長28.0mm φ2.0mm、φ2.8mmの骨穿孔部の深さや 方向の確認を行います。
	CK-40	全長30.0mm 2次オペ時歯肉を円形にカットします。
	CK-48	
	WR/Mount-N-S	全長 S:21mm L:27mm W:21mm レンチに取り付け、インプラントを埋入するための ツールです。 N : B、BS、C、E、St、Me -type用 W : BW、EW -type用
	WR/Mount-N-L	
	WR/Mount-W-S	






Drills & Tools

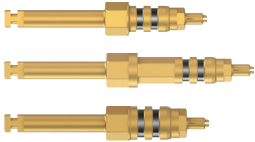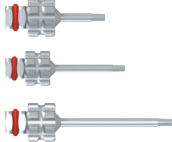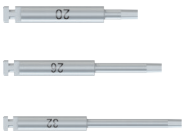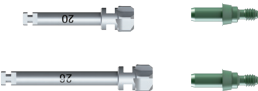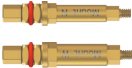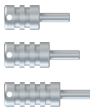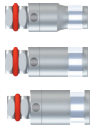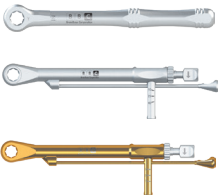製品名		仕様
	CA/Mount-N-S	全長 S:27.7mm L:33.7mm W:27.7mm コントラヘッドに取り付け、インプラントを埋入するためのツールです。 N : B、BS、C、E、St、Me-type用 W : BW、EW-type用
	CA/Mount-N-L	
	CA/Mount-W-S	
	WR/HEXドライバー18	全長 18:18.0mm 24:24.0mm 30:30.0mm キャップ、アバットメント等をレンチで締結するツールです。
	WR/HEXドライバー24	
	WR/HEXドライバー30	
	CA/HEXドライバー20	全長 20:20.0mm 26:26.0mm 32:32.0mm コントラヘッドに取り付け、キャップ、アバットメント等を締結するツールです。
	CA/HEXドライバー26	
	CA/HEXドライバー32	
	ボーントリミングN20	全長 N20:20mm N26:26mm インプラント上部に被っている骨を除去するためのドリルです。(B・BS・C・E・St・Meタイプ用) ボーンガイドピン付きです。
	ボーントリミングN26	
	ドリルエクステンション16	全長 27.0mm コントラ用ドリルを延長します。 全長 14.0mm WR/Mount、WR/HEXドライバーに接続して使用する延長ツールです。
	エクステンション10	
	ドリルホルダー10	全長14.0mm コントラ用ドリル、ツール類を手回しで使用するためのツールです。
	マウントN	全長 19.8mm スクリュー固定式マウントです。
	マウントW	
	AチェッカーS	全長 S:13.0mm M:15.0mm L:17.0mm 支台部 S:7.0mm M:9.0mm L:11.0mm ガイドドリル20の穿孔部に立てて方向やクリアランスの確認を行います。
	AチェッカーM	
	AチェッカーL	
	AIIホルダー30	全長 14.5mm AIIタイプインプラントを埋入する際、直接支台部に被せて使用します。 30 : φ3.0 40 : φ4.0 50 : φ5.0
	AIIホルダー40	
	AIIホルダー50	
	DSハンドレンチ	WR/Mount、WR/HEXドライバー、AIIホルダー等に取り付けるハンドレンチです。
	DSラチェットレンチ	WR/Mount、WR/HEXドライバー、AIIホルダー等に取り付けるツールです。
	DSTルクラチェットレンチ	最大測定トルク40Ncm
	DSTルクラチェットレンチ70	最大測定トルク70Ncm

	製品名	仕様
	CAアダプター22	全長 22.0mm
	PLUSリムーバーS	全長 S:23.60mm
	PLUSリムーバーL	全長 L:29.60mm
	M3コーピングドライバー	M3コーピングを締め付けるためのツールです。
	ランセットドリル	最大部φ2.0mm / 全長 34.0mm 皮質骨を貫通させるために使用します。
	ガイドドリル1.5L	φ1.5mm / 全長 37.0mm ストッパー付きです。
	スパイラルドリルC 20S	φ2.0mm / 全長 S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC 20L	インプラント埋入長に合わせた植立孔の 深さと植立方向の決定を行います。
	スパイラルドリルC 25S	φ2.5mm / 全長 S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC 25L	φ3.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリルC28S	φ2.8mm / 全長 S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC28L	φ3.3mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリルC32S	φ3.2mm / 全長 S:32.0mmL:37.0mm
	スパイラルドリルC32L	φ3.7mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリルC35S	φ3.5mm/全長S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC35L	φ4.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリルC38S	φ3.8mm / 全長 S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC38L	φ4.3mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリルC41S	φ4.1mm / 全長 S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC41L	φ4.6mmインプラント最終ドリル φ4.7mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリルC45S	φ4.5mm / 全長 S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC45L	φ5.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル475S	φ4.75mm / 全長 32.0mm
	ホールソウ5.35	φ5.35 / 全長35.0mm
	ホールソウ6.35	5.35: φ6.0mmインプラント専用ドリル φ6.35 / 全長35.0mm 6.35: φ7.0mmインプラント専用ドリル
	エンドミル5.55	φ5.55 / 全長35.0mm
	エンドミル6.55	5.55:φ6.0mmインプラント専用ドリル φ6.55 / 全長35.0mm 6.55:φ7.0mmインプラント専用ドリル
	ドリルストッパーC 20,25,28,32,35,38, 41,45,475	スパイラルドリルC専用 ドリルサイズに対応するものをご使用ください。

Drills & Tools

マルチピースアバット専用ツール

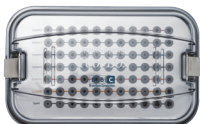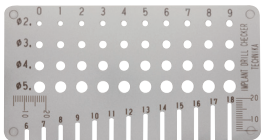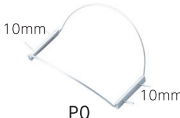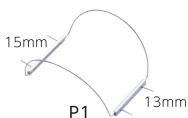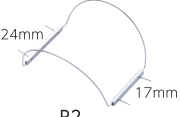	製品名	仕様
	MPホルダー	全長 23.7mm MP用のアバットメントキャリー
	CA-MPドライバー	全長20mm / MPアバットメント用 テーパード嵌合タイプ/HEX嵌合ストレート用ネジ等を締結するためのツールです。
	WR-MPドライバー	全長 20mm / MPアバットメント用 テーパード嵌合タイプ / HEX嵌合ストレート用ネジ等を締結するためのツールです。
	ツールボックス	オートクレーブの場合 (121℃で 20 分間行い、十分に乾燥させること。 また 135℃以上にならないよう注意してください。)
	フリーボックス	オートクレーブの場合 (121℃で 20 分間行い、十分に乾燥させること。 また 135℃以上にならないよう注意してください。)
	ツールボックス (補綴用)	オートクレーブの場合 (121℃で 20 分間行い、十分に乾燥させること。 また 135℃以上にならないよう注意してください。)
	ツールBOX	ドリルやツールをコンパクトに収納します。 オートクレーブの場合 (121℃で 20 分間行い、十分に乾燥させること。 また 135℃以上にならないよう注意してください。)
	インプラント・ ドリルチェッカー	長さ 6.0~18.0mm 太さ 2.0~5.9mm ドリルの刃の長さや太さを計測できます。 オートクレーブ滅菌可能
   	I.G.P.フラップホルダー P0 P1 P2 P3	メインフレーム・スプリングは症例に合わせ、 大きさを選択してください。術者の視野を確保し、 手術操作を容易にします。 ※オートクレーブほか滅菌可能 ※ステンレス製
	I.G.P.ピンセット	フラップホルダー専用

Others

ーインプラント周辺製品ー


骨補填材

ArrowBone-β-Dental

γ線滅菌済

再使用禁止

高度管理医療機器（クラスⅣ）

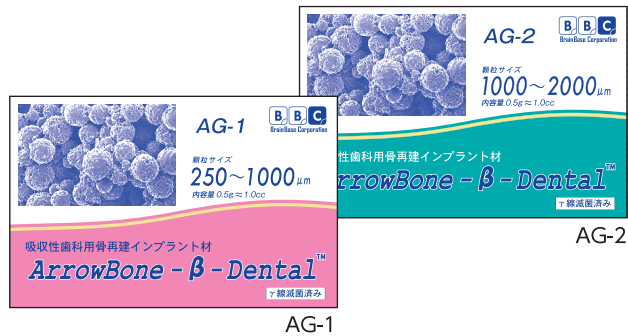

AG-1

AG-2

ArrowBone-β-Dental AG-1
ArrowBone-β-Dental AG-2

5箱×1セット
3箱×1セット

成分：β-リン酸三カルシウム
内容量：顆粒 0.5g ≈ 1.0cc
顆粒サイズ
AG-1：250-1000 μm
AG-2：1000-2000 μm
気孔率：75%

歯面研磨材

βパウダー



γ線滅菌済


再使用禁止

βパウダー

成分：β-リン酸三カルシウム
平均粒子径：45 μm
内容量：3g × 5包
用途：歯面研磨及び清掃

余剰セメント除去シート

TCガムプロテクト

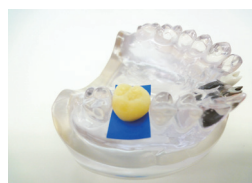

TCガムプロテクト
20枚1シート



実寸タテ12mm×ヨコ20mm
パンチ穴直径3.5mm

院内ポスター




院内ポスター

インプラント手帳



インプラント手帳
10冊×1セット

MYTIS NAVIGATION SYSTEM

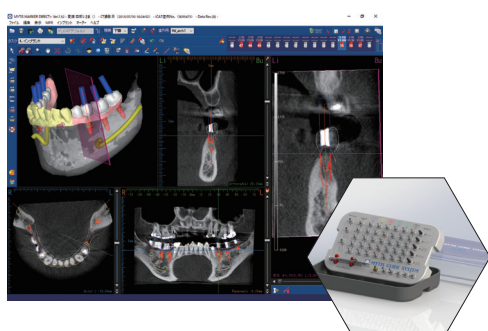

■ 診断はパノラマからCTシミュレーションへ

● MYTIS MARKER

MYTIS MARKER は「インプラント断面」をはじめ、インプラント臨床医が考案した様々な機能を搭載。より精度高いインプラントシミュレーションを実現します。

● MYTIS GUIDE

MYTIS MARKER のシミュレーション結果を反映することで精度の高い手術を実現。手術時間を短縮し、患者様の負担も軽減します。

MYTIS MARKER ラインナップ		CTデータ 直接変換	模型合成	データ 作成依頼	ガイド 作製依頼	フルキット (ドリル35本セット)
DIRECT+ CT・院内ラボをお持ちの先生に おすすめ!	導入費	○	○	○	○	標準キット (ドリル20本セット)
	年間ライセンス費 (初年度無料)	○	○	○	○	
DIRECT	導入費	○	×	○	○	最小キット (ドリル8本セット)
	年間ライセンス費 (初年度無料)	○	×	○	○	
NETWORK ※Networkのご利用にはDirectが必要です。 ※Directで作成した症例データを読込可能。	導入費	×	×	○	○	ドリル
	追加ライセンス (2本目以降)	×	×	○	○	
	年間ライセンス費					

※Direct・Networkは1ライセンス、1PCとなります。
※バージョンアップ費はいずれも無料です。



ご注文はFAXまたはメールでお願い致します。

貴医院名:	発注日: 年 月 日
ご住所:	ご希望納期: 月 日
	(時間ご指定の場合: 時まで)
お電話:	休診日 / 月・火・水・木・金・土・日・祝日
F A X:	(BBC 記入欄) 顧客コードNo:

[illegible]

※製品のお届け・配送費につきましてはカタログ2頁をご参照ください。

--

--

英数字

A

AB35-HEX50L-P 10,12,14,29
 AB35C10-L35-HEX-P 18,31,32
 AB35C10-L50-HEX-P 18,31,32
 AB35C10-L70-HEX-P 18,31,32
 AB35C20-L35-HEX-P 18,31,32
 AB35C20-L50-HEX-P 18,31,32
 AB35C20-L70-HEX-P 18,31,32
 AB35C30-L35-HEX-P 18,31,32
 AB35C30-L50-HEX-P 18,31,32
 AB35C30-L70-HEX-P 18,31,32
 AB35E-L35-HEX-P 10,12,14,29,30
 AB35E-L50-HEX-P 10,12,14,29,30
 AB35E-L70-HEX-P 10,12,14,29,30
 AB43C10-L50-HEX-P 22,35,36
 AB43C10-L70-HEX-P 22,35,36
 AB43-HEX50L-P 22,35
 AB43-HEX70L-P 22,35
 AB43H-L35-HEX-P 22,35,36
 AB43H-L50-HEX-P 22,35,36
 AB43H-L70-HEX-P 22,35,36
 A IIホルダー 30 39
 A IIホルダー 40 39
 A IIホルダー 50 39
 A チェッカー-L 39
 A チェッカー-M 39
 A チェッカー-S 39
 A II 3008-07 23
 A II 3008-09 23
 A II 3010-07 23
 A II 3010-09 23
 A II 3012-09 23
 A II 3012-11 23
 A II 4008-07 23
 A II 4008-09 23
 A II 4010-07 23
 A II 4010-09 23
 A II 4012-09 23
 A II 4012-11 23
 A II 5008-07 23
 A II 5008-09 23
 A II 5010-07 23
 A II 5010-09 23
 A II 5012-09 23
 A II 5012-11 23
 AG35-B15HEX 10,12,14
 AG35-B15-s 10,12,14,30
 AG35-B25HEX 10,12,14,29
 AG35-B25-s 10,12,14,30
 AG35C10-HEX15-P 18,31
 AG35C10-HEX25-P 18,31
 AG35-C15-s-P 18,32
 AG35C20-HEX15-P 18,31
 AG35C20-HEX25-P 18,31
 AG35-C25-s-P 18,32
 AG35C30-HEX15-P 18,31
 AG35C-D05-P 18,31
 AG35C-D15-P 18,31

AG35C-D25-P 18,31
 AG35-D05-P 10,12,14,29
 AG35-D15 10,12,14,29
 AG35-D25 10,12,14,29
 AG43-BW15HEX 22,35
 AG43-BW15-s 22,36
 AG43-BW25HEX 22,35
 AG43-BW25-s 22,36
 AG43-D05-P 22,35
 AG43-D15 22,35
 AG43-D25 22,35
 ArrowBone-β-Dental AG-1 42
 ArrowBone-β-Dental AG-2 42

B

B3306Sf 9
 B3308Sf 9
 B3310Sf 9
 B3312Sf 9
 B3314Sf 9
 B3706Sf 9
 B3708Sf 9
 B3710Sf 9
 B3712Sf 9
 B3714Sf 9
 B4006Sf 9
 B4008Sf 9
 B4010Sf 9
 B4012Sf 9
 B4014Sf 9
 B4306Sf 9
 B4308Sf 9
 B4310Sf 9
 B4312Sf 9
 B4314Sf 9
 B4606Sf 9
 B4608Sf 9
 B4610Sf 9
 B4612Sf 9
 B4614Sf 9
 BS3708Sf 11
 BS3710Sf 11
 BS3712Sf 11
 BS4008Sf 11
 BS4010Sf 11
 BS4012Sf 11
 BS4308Sf 11
 BS4310Sf 11
 BS4312Sf 11
 BS4608Sf 11
 BS4610Sf 11
 BS4612Sf 11
 BS/A-35 10,12,14,30
 BS/A-50 10,12,14,30
 BS/A-70 10,12,14,30
 BW4708Sf 21
 BW4710Sf 21
 BW4712Sf 21

Bタイプ用N-M3コーピングS印象セット 25
 Bタイプ用N-M3コーピングM印象セット 25
 Bタイプ用N-M3コーピングL印象セット 25
 Bタイプ用N-MEコーピングS印象セット 25
 Bタイプ用N-MEコーピングM印象セット 25
 Bタイプ用N-MEコーピングL印象セット 25

C

C3708Sf 15
 C3710Sf 15
 C3712Sf 15
 C3714Sf 15
 C4008Sf 15
 C4010Sf 15
 C4012Sf 15
 C4014Sf 15
 C4308Sf 15
 C4310Sf 15
 C4312Sf 15
 C4314Sf 15
 C4608Sf 15
 C4610Sf 15
 C4612Sf 15
 C4614Sf 15
 CAアダプター 22 40
 CA/HEX ドライバー 20 39
 CA/HEX ドライバー 26 39
 CA/HEX ドライバー 32 39
 CA/Mount-N-L 39
 CA/Mount-N-S 39
 CA/Mount-W-S 39
 CA-MP ドライバー 41
 CAP35-s 29,30,31,32
 CAP43-s 35,36
 CK-40 38
 CK-48 38
 CSB-10-s 9,11,13,29,30
 CSB-25-s 9,11,13,29,30
 CSBW-10-s 21,35,36
 CSBW-25-s 21,35,36
 CSE-10-s 13,29,30
 CSE-25-s 13,29,30
 Cタイプ用N-M3コーピングS印象セット 27
 Cタイプ用N-M3コーピングM印象セット 27
 Cタイプ用N-M3コーピングL印象セット 27
 Cタイプ用N-MEコーピングS印象セット 27
 Cタイプ用N-MEコーピングM印象セット 27
 Cタイプ用N-MEコーピングL印象セット 27

D

DS トルクラチェットレンチ 39
 DS トルクラチェットレンチ 70 39
 DS ハンドレンチ 39
 DS ラチェットレンチ 39

E

E3310Sf 13
 E3312Sf 13
 E3314Sf 13
 E3708Sf 13

E3710Sf 13
 E3712Sf 13
 E3714Sf 13
 E4008Sf 13
 E4010Sf 13
 E4012Sf 13
 E4014Sf 13
 E4308Sf 13
 E4310Sf 13
 E4312Sf 13
 E4314Sf 13
 E4608Sf 13
 E4610Sf 13
 E4612Sf 13
 E4614Sf 13
 EW5006Sf 21
 EW5008Sf 21
 EW5010Sf 21
 EW5012Sf 21
 EW6006Sf 21
 EW6008Sf 21
 EW6010Sf 21
 EW7006Sf 21
 EW7008Sf 21
 EW7010Sf 21
 Eタイプ用N-M3コーピングS印象セット 26
 Eタイプ用N-M3コーピングM印象セット 26
 Eタイプ用N-M3コーピングL印象セット 26
 Eタイプ用N-MEコーピングS印象セット 26
 Eタイプ用N-MEコーピングM印象セット 26
 Eタイプ用N-MEコーピングL印象セット 26

H

HAT35L(10個入) 25,26,27,30,32
 HAT43L(10個入) 28,36
 HC-30-s 15,31,32
 HC-30ST-s 15,31,32
 HC-30T-s 15,31,32
 HC-30TW-s 15,31,32
 HC-50-s 15,31,32
 HC-50ST-s 15
 HC-50T-s 15
 HC-50TW-s 15
 HCW-30-s 21,35,36
 HCW-30T-s 21,35,36
 HCW-50-s 21,35,36
 HCW-50T-s 21,35,36
 I.G.P. ピンセット 41

M

Me4008Sf 17
 Me4010Sf 17
 Me4012Sf 17
 Me4308Sf 17
 Me4310Sf 17
 Me4312Sf 17
 Me5008Sf 17
 Me5010Sf 17
 Me5012Sf 17
 MP-AB35C10-HEX 19,33,34

MP-AB35C10-s	19,33,34
MP-AB35C20-HEX	19,33,34
MP-AB35C20-s	19,33,34
MP-AB35C30-HEX	19,33,34
MP-AB35C30-s	19,33,34
MP-AB35C40-HEX	19,33,34
MP-AB35C40-s	19,33,34
MP-AB35C50-HEX	19,33,34
MP-AB35C50-s	19,33,34
MP-AG35C25-HEX17	19,33,34
MP-AG35C35-HEX17	19,33,34
MP-AG35C35-HEX30	19,33,34
MP-AG35C45-HEX17	19,33,34
MP-AG35C45-HEX30	19,33,34
MP-AG35C55-HEX17	19,33,34
MP-AG スクリュー (2 個入)	33
MP-CAP-47	19,34
MP-CAP-67	19,34
MP- シリンダー 33(スクリュー付)	19,33,34
MP- シリンダー 43(スクリュー付)	19,33,34
MP- シリンダースクリュー (2 個入)	19,33,34
MP コーピング -OPT	20,34
MP パターン	20,33,34
MP レプリカ	20,34
MP ホルダー	41
M3 コーピングドライバー	29,31,33,35,40
MYTIS NAVIGATION SYSTEM	43

N	
N-M3 コーピング M	25,26,27,29,31,33
N-M3 コーピング S	25,26,27,29,31,33
N-ME コーピング L	25,26,27,29,31,33
N-ME コーピング M	25,26,27,29,31,33
N-ME コーピング S	25,26,27,29,31,33

P	
PLUS リムーバー S	40

S	
St4008Sf	17
St4010Sf	17
St4012Sf	17
St4014Sf	17
St4016Sf	17
St4308Sf	17
St4310Sf	17
St4312Sf	17
St4314Sf	17
St5008Sf	17
St5010Sf	17
St5012Sf	17

T	
Tap30-33	38
Tap37-40	38
Tap46-50	38
Tap60-70	38
TC ガムプロテクト	42
TP-AB35-HEX-P	10,12,14,29,31
TP-AB43-HEX-P	22,35

W	
W-M3 コーピング S 印象セット	28
W-M3 コーピング L 印象セット	28
W-ME コーピング 印象セット	28
W-M3 コーピング L	28,35
W-M3 コーピング S	28,35
W-ME コーピング	28,35
WR/HEX ドライバー	18 39
WR/HEX ドライバー	24 39
WR/HEX ドライバー	30 39
WR/Mount-N-L	38
WR/Mount-N-S	38
WR/Mount-W-S	38
WR-MP ドライバー	41
WS/A-35	22,36
WS/A-50	22,36
WS/A-70	22,36

β	
βパウダー 3gX5 包	42

五十音順

ア	
アバットスクリュー	10,12,14,30,35
アバットスクリュー P	10,12,14,16,18,29,31,32,35

イ	
院内ポスター	43
インプラント・ドリルチェッカー	41
インプラント手帳	43

エ	
エンドミル 5.55	40
エンドミル 6.55	40
エクステンション 10	39

カ	
ガイドドリル 1.5L	40
ガイドドリル 20	38

キ	
技工用 MP-AG スクリュー (2 個入)	20,33,34
技工用シリンダースクリュー (2 個入)	20,33,34

シ	
試適用 C アダプター 20	31,37
試適用 C アダプター 30	31,37
試適用アバットTB/15 3個入	29,31,37

試適用アバットTB/25 3個入	29,31,37
試適用アバットTB-50 3個入	29,31,37
試適用アバットTW/15 3個入	35,37
試適用アバットTW/25 3個入	35,37
試適用アバットTW-50 3個入	35,37

ス	
スパイラルドリル 25	38
スパイラルドリル 28	38
スパイラルドリル 32	38
スパイラルドリル 35	38
スパイラルドリル 38	38
スパイラルドリル 41	38
スパイラルドリル 45	38
スパイラルドリル 475S	38
スパイラルドリル 56	38
スパイラルドリル 66	38
スパイラルドリル C 20L	40
スパイラルドリル C 20S	40
スパイラルドリル C 25L	40
スパイラルドリル C 25S	40
スパイラルドリル C 28L	40
スパイラルドリル C 28S	40
スパイラルドリル C 32L	40
スパイラルドリル C 32S	40
スパイラルドリル C 35L	40
スパイラルドリル C 35S	40
スパイラルドリル C 38L	40
スパイラルドリル C 38S	40
スパイラルドリル C 41L	40
スパイラルドリル C 41S	40
スパイラルドリル C 45L	40
スパイラルドリル C 45S	40

ツ	
ツール BOX	41
ツールボックス	41
ツールボックス (補綴用)	41

テ	
デブスメジャー	38

ト	
ドリルエクステンション 16	39
ドリルストッパー 10	38
ドリルストッパー 11	38
ドリルストッパー 12	38
ドリルストッパー 13	38
ドリルストッパー 14	38
ドリルストッパー 6	38
ドリルストッパー 7	38
ドリルストッパー 8	38
ドリルストッパー 9	38
ドリルストッパー C20	40
ドリルストッパー C25	40
ドリルストッパー C28	40
ドリルストッパー C32	40
ドリルストッパー C35	40
ドリルストッパー C38	40
ドリルストッパー C41	40

ドリルストッパー C45	40
ドリルホルダー 10	39

ハ	
パターン 35HEX 10,12,14,29,31	
パターン 43HEX	22,35

フ	
フラップホルダー P0	41
フラップホルダー P1	41
フラップホルダー P2	41
フラップホルダー P3	41
フリーボックス	41

ホ	
ボール B-s	10,12,14,30
ボール BW-s	22,36
ボール C20-s	18,32
ホールソウ 5.35	40
ホールソウ 6.35	40
ボートリミング -N20	39
ボートリミング -N26	39

ラ	
ラウンドバー φ1.4	38
ランセットドリル	40

リ	
リンデマンドドリル	38

レ	
レプリカ B-HEX-s	25,26,27,29
レプリカ B-HEX-s 3 個入	25,26,27
レプリカ C-HEX-s	27,31,33
レプリカ C-HEX-s 3 個入	27
レプリカ E-HEX-s	26,27,29
レプリカ E-HEX-s 3 個入	26,27
レプリカ N-35L	25,26,27,30,32
レプリカ N-50L	25,26,27,30,32
レプリカ N-70L	25,26,27,30,32
レプリカ W-35L	28,36
レプリカ W-50L	28,36
レプリカ W60-HEX-s	28,35
レプリカ W70-HEX-s	28,35
レプリカ W-70L	28,36
レプリカ W-HEX-s	28,35
レプリカ W-HEX-s 3 個入	28,35

マ	
マウント N	39
マウント W	39



株式会社ブレンベース



本社 東京都品川区大井 1-49-15
YK-17 ビル 6 階
電話 03-3778-0745
FAX 03-3778-4910
E-mail mail@brain-base.com
URL http://www.brain-base.com



大阪支社 大阪府大阪市中央区本町橋 2-23
電話 06-6943-8864
FAX 06-6948-8874

アローインプラント	高度管理医療機器	歯科用骨内インプラント材	承認番号：21500BZZ00187000
マイティスアタッチメント	高度管理医療機器	歯科用インプラントシステム	承認番号：21100BZZ00066000
アローボーン-β-デンタル	高度管理医療機器	吸収性歯科用骨再建インプラント材	承認番号：22500BZX00553000
アローインプラント用インスツルメント	一般医療機器	歯科用インプラント手術器具	届出番号：13B1X00145000001
アローFITパーツ	一般医療機器	歯科インプラント技工用器材	届出番号：13B1X00145000002
βパウダー	一般医療機器	歯面研磨材	届出番号：13B1X00145000005
I.G.P. フラップホルダー	一般医療機器	歯科用開創器	届出番号：13B1X00145000011
アローインプラント用サージカルドリル	一般医療機器	手術用ドリルビット	届出番号：13B1X00145000012
アローインプラント用サージカルバー	一般医療機器	整形外科用バー	届出番号：13B1X00145000013
アローインプラント用ドリル延長ツール	一般医療機器	手術用ドリルアタッチメント	届出番号：13B1X00145000014
I.G.P. ピンセット	一般医療機器	ピンセット	届出番号：13B1X00145000015
CAアタッチメント	一般医療機器	手術用ドリルアタッチメント	届出番号：13B1X00145000027
マイティスガイド用インスツルメント	一般医療機器	整形外科用バー	届出番号：13B1X00145000028
TCガムプロテクト	一般医療機器	歯科用ラバーダム	届出番号：13B1X00145000029

製造販売元・販売元：株式会社ブレンベース 住所：〒140-0014 東京都品川区大井1-49-15 YK-17ビル6階
電話番号：03-3778-0745 FAX 番号：03-3778-4910

マイティスアローインプラント用インスツルメント	一般医療機器	整形外科用バー	届出番号：13B2X00094000106
スパイラルドリルC	一般医療機器	整形外科用バー	届出番号：13B2X00094000129
マイティスインプラント用インスツルメント	管理医療機器	電動式歯科用インプラント手術器具	承認番号：21900BZX00406000
マイティスガイド用ドリル	一般医療機器	整形外科用バー	届出番号：13B2X00094000190

製造販売元：株式会社デンテック 住所：〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5

マイティスインプラント用インスツルメント	一般医療機器	手術用ドリルビット	届出番号：11B1X00005000013
----------------------	--------	-----------	-----------------------

製造販売元：石福金属興業株式会社 住所：埼玉県草加市青柳 2-12-30

ランドマーカー	管理医療機器	汎用画像診断装置 ワークステーション用プログラム	認証番号：227AHBZX00029000
---------	--------	-----------------------------	-----------------------

製造販売元：株式会社アイキャット 住所：大阪府大阪市淀川区西中島 3-19-15 第3三ツ矢ビル3F

許可番号：13B1X00145