

Mytis

Arrow Implant

Product
Catalogue
Vol. 7

System



Mytis

Arrow Implant System

患者様の
クオリティオブライフを
目指して

Product
Catalogue
Vol. 7

インプラントを中心とした骨治療の統合システム

CONTENTS

保証	2	Technician&CAD/CAM関連製品	26
マイティスアローインプラントシステム	3	インプラントBW/EW/EW-typeショートタイプ	27
Mytis Arrow Implantデザイン	5	アバットメントBW/EW/EW-typeショートタイプ	28
インプラント嵌合部写真	6	Technician&CAD/CAM 関連製品 BW/EW-type	30
アバットメント仕様について	7	全体図 B BS BSN E インプラントレベル印象	31
インプラント&アバットメントの嵌合	8	全体図 B BS BSN E アバットメントレベル印象	32
インプラントB-type	9	全体図 C C ナロー St Me インプラントレベル印象	33
インプラントBS-type	10	全体図 C C ナロー St Me アバットメントレベル印象	34
インプラントBSN-typeナロータイプ	10	C C ナロー St Me マルチピースアバットメント インプラントレベル印象	35
インプラントE-type	11	C C ナロー St Me アバットメントレベル印象	36
Technician&CAD/CAM 関連製品 B/BS/E43,46type	15	全体図 BW EW 1 回法ワイドタイプ インプラントレベル印象	37
Technician&CAD/CAM 関連製品 BSN/E33~40type	16	BW EW EWショート アバットメントレベル印象	38
インプラントC/C-typeナロータイプ	17	インプラントAII-type	39
インプラントSt/Me-type	18	試適用アバットメント	40
アバットメントC/Cナロー/St/Me-type	19	Drills & Tools	41
マルチピースアバットメント	20	Others	45
マルチピースアバットメント締め付け方	22	MYTIS MARKER	46
Technician&CAD/CAM 関連製品 C/St/Me-type	25	製品名索引	47

保証

- 株式会社ブレインベースは、自社の製品保証基準に基づいて製品を保証いたします。この保証は購入者ご本人に限定させていただきます。
- 不良品につきましては製品返品前に弊社までご一報ください。状況に応じて、修理・交換・代金返金のいずれかの対応をさせていただきます。
- 弊社は製品の改良、開発に日夜努力しております。そのために事前の予告なしに製品の変更や中止、価格の変更をすることがありますので予めご了承ください。
- お買い上げ製品の返品は、原則としてお受けしておりません。
但し、事情によっては、返品をお受けすることもあります。(返品時の送料は、お客様ご負担)
- 製品交換は発送日より90日以内で未開封の製品に限らせていただきます(返送時の送料はお客様ご負担)。返送された製品を確認しだい交換品を発送します(交換発送手数料はお客様ご負担)。
- 尚、製品を「着払い」でご返送された場合、その送料をご請求させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

ご使用に際しては、以下の注意事項をよくお読みください。

- 当製品の使用にあたっては、弊社の外科術式マニュアルに従い、適切に行ってください。
- インプラント手術を行うにあたっては、インプラント講習会及び当社と提携するインプラント講習会を受講されることをお勧めします。
- この製品は厚生労働省の承認等をうけたものであり、原則として歯科医師免許の取得者のみに販売いたします。
- インプラント手術を行うにあたり、患者の口腔内及び全身健康状態がインプラント手術に適さない場合には、使用しないでください。
- 口腔衛生が保てない患者、リコールに応じない患者等には使用しないでください。(術後管理ができないことがあります。)
- 製品に損傷をあたえないように保管の際は十分にご注意ください。また、高温・多湿の場所は避け、汚染防止のために使用前にパッケージから取り出してお使いください。

製品のお届けについて

- 15時までにいただきましたご注文につきましては、当日発送いたします。また、15時以降のご注文は、翌日の発送(土曜・日曜・祝日のご注文に関しましては翌営業日の発送)となりますのでご了承ください。
- 注文後に製品の品切れが生じた場合、また、ご注文が集中して製品が遅れる場合は事前にお電話またはFAXにてご連絡させていただきます。
- お届けの製品が破損している場合には返品受付させていただきます。まずは弊社へご一報ください。

配送費について

- 1回のご注文金額の合計が¥10,000(税込)を超える場合は、送料無料。
1回のご注文金額の合計が¥10,000(税込)に満たない場合は、梱包発送手数料(全国一律¥1,000税別)を別途いただきます。
- タイムサービス便をご利用の場合には、別途追加料金(一律 ¥500 税別)をご請求させていただきます。但し、タイムサービス便をご利用いただけない地域もございますのでご了承ください。

ご注文の方法

ホームページ、フリーダイヤル、FAXにてご注文くださいますようお願いいたします。



はじめに会員登録をお願いいたします。
<https://www.brain-base.com>

TEL 0120-25-4929

FAX 0120-4929-37

E-mail mail@brain-base.com

お支払いについて

請求書は、当月末日締めで、送付させていただきます。お支払いにつきましては、翌月末日までに右記の銀行口座にお振込みください。銀行振込手数料は、お客様負担。なお、銀行振込の領収印をもって、弊社領収書の代わりとさせていただきます。クレジット決済がご利用できます。ダイナース・VISA・JCB・アメックス

振込銀行

三菱UFJ銀行	大井支店	普通預金 No.0851240
みずほ銀行	大井町支店	普通預金 No.1676279




マイティスアローインプラントシステム

ノーマルタイプ

B-type

B33 ~ 46 × Sf

φ 3.3mm, φ 3.7mm, φ 4.0mm, φ 4.3mm, φ 4.6mm
プラットフォーム (最大直径部) : 4.8mm

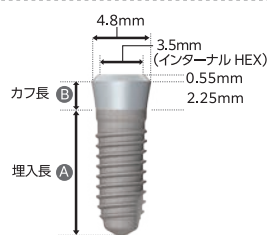


P.9

ノーマルタイプ

BS-type

BS37 ~ 46 × Sf

φ 3.7mm, φ 4.0mm, φ 4.3mm, φ 4.6mm
プラットフォーム (最大直径部) : 4.8mm

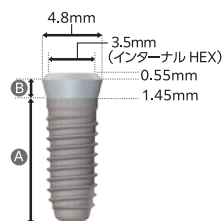


P.10

ノーマルタイプ

BSN-type

BSN33 × Sf ナロータイプ

φ 3.3mm
プラットフォーム (最大直径部) : 4.3mm

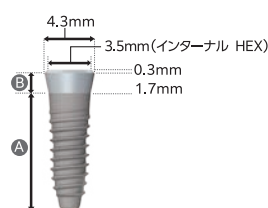


P.10

ノーマルタイプ

E-type

E33 ~ 46 × Sf

φ 3.3mm, φ 3.7mm, φ 4.0mm, φ 4.3mm, φ 4.6mm
プラットフォーム (最大直径部) : E33 ~ 37, E40 ⇒ 4.3mm
E43 ~ 46 × Sf ⇒ 4.8mm

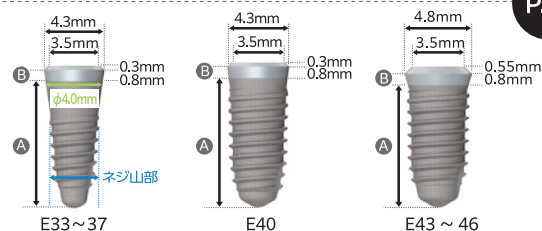

P.11

※E33 と E37 はネジ山部の径がそれぞれφ 3.3mm・φ 3.7mm で、表面処理部最大径はφ 4.0mm になります。

※E-type は、全長表記になっています。実際の埋入長(プラスト部)は、E33 ~ 40 はマイナス 1.1mm、E43 ~ E46 ⇒ マイナス 1.35mm となります。例えば、E3310 の埋入長は、8.9mm となります。


ノーマルタイプ

C-type

C37 ~ 46 × Sf

φ 3.7mm, φ 4.0mm, φ 4.3mm, φ 4.6mm

プラットフォーム (最大直径部) : C37 ⇒ 3.7mm C40 ⇒ 4.0mm
C43 ⇒ 4.3mm C46 ⇒ 4.6mm

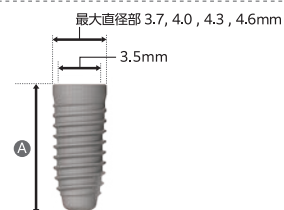

P.17


ノーマルタイプ

C-type

C33 × Sf ナロータイプ

φ 3.3mm

プラットフォーム (最大直径部) : 3.3mm

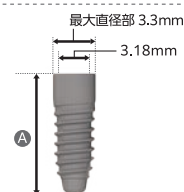

P.17

Bタイプ


BSタイプ

BSNタイプ
(ナロータイプ)

Eタイプ

Cタイプ

Cタイプ
(ナロータイプ)

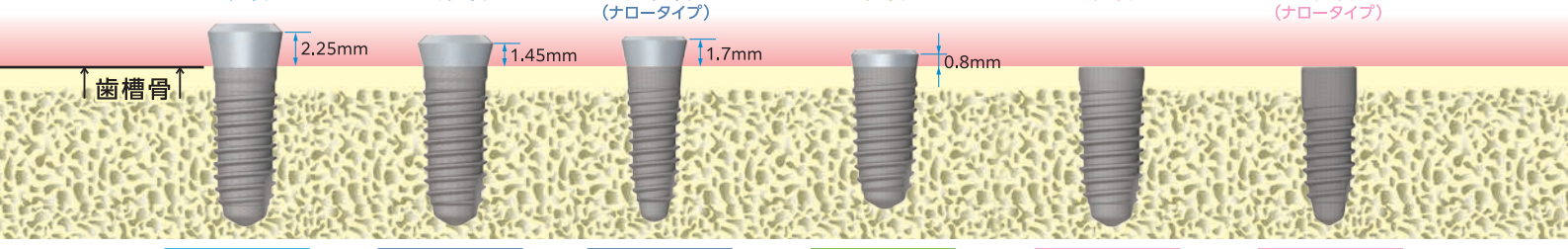


ノーマルタイプ

St-type

St40~50×Sf

φ4.0mm、φ4.3mm、φ5.0mm

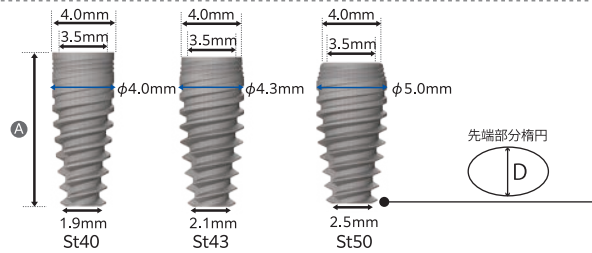


P.18

ノーマルタイプ

Me-type

Me40~50×Sf

φ4.0mm、φ4.3mm、φ5.0mm

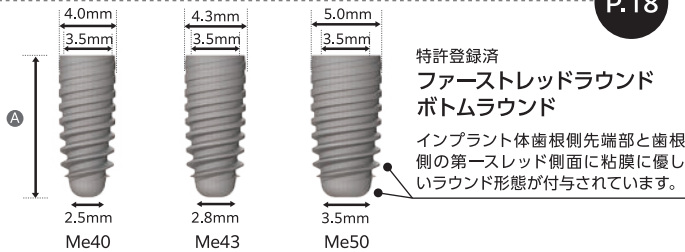

P.18


ワイドタイプ

BW-type

BW47×Sf

φ4.7mm

プラットフォーム（最大直径部）：5.6mm

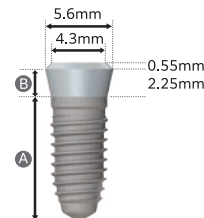

P.27


ワイドタイプ

EW-type

EW50~70×Sf

φ5.0mm、φ6.0mm、φ7.0mm

プラットフォーム（最大直径部）：EW50×Sf⇒5.6mm EW60×Sf⇒6.0mm EW70×Sf⇒7.0mm

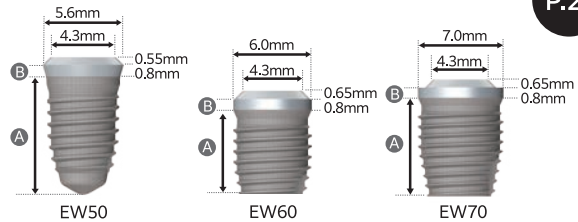

P.27

ワイドタイプ

EW-type

EW5005Sf

ショートタイプ

φ5.0mm

プラットフォーム（最大直径部）：5.6mm




P.27

ワンピースタイプ

A II-type

A II 30~50××

φ3.0mm、φ4.0mm、φ5.0mm

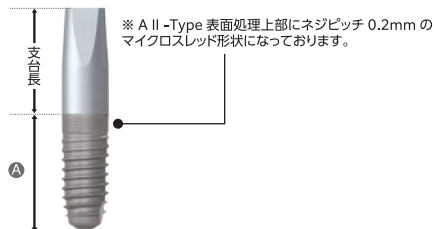

P.39

Stタイプ


Meタイプ

BWタイプ

EWタイプ

EWタイプ
(ショートタイプ)

A IIタイプ

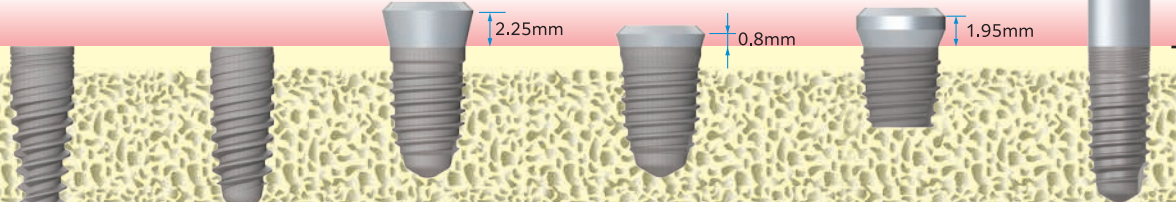


Mytis ArrowImplant デザイン

鏡面仕上げ

バレル研磨加工にて $1\mu\text{m}$ 以下の鏡面加工を行い、歯肉との密着・封鎖性能を確保して術後の感染防止します。

骨埋入部上部

埋入部上部でのステージ形状により、骨縁部の封鎖性が良いです。

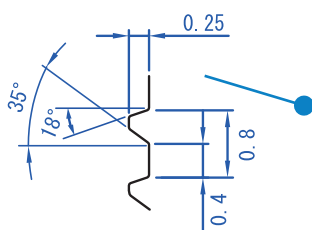

ネジ山先端部は、 18° テーパネジとして埋入時の顎骨の負担を軽減し円滑な埋入を実現します。

セルフタップ部

先端のセルフタップ形状により、骨内部での抵抗を軽減するとともに、初期固定過程での回り防止効果を得ています。

ルートフォーム形状

9° テーパのわずかな先細り形状とすることで、骨からの抵抗が少なくセルフタッピング効果が向上し、安全に埋入できます。

リムーバー対応

アバットメントの内部ネジ構造により PLUSリムーバーを回転させるだけでアバットメントが容易に除去できます。

インターナル嵌合

世界的に多くのインプラントシステムで採用され、長期的な応力での疲労に対する強度が実証されている 8° モーステーパと HEX 部を取り入れシンプルな構造です。密着性に優れ、高い機械的強度を実現します。

ネジ山形状

ネジピッチ 0.8mm 、ネジ山高 0.25mm の台形ネジは、骨強度に最も合った形状で、埋入時の抵抗力を軽減し埋入後の保持力が最大になるように設計。角部は 0.3mm のR形状として鋭角部を無くし、人体との親和性を高め骨接触率の向上に寄与しています。

材質・表面処理加工技術

材質 フルハードトップチタン (JIS2種) 純チタン製

[引張り強さ] $750 \sim 900\text{Mpa}$

[特徴]

- 純度が高い
- 冷間加工により強度はJIS4種同等レベル

H	O	N	Fe	C	Ti
0.013% Max.	0.20% Max.	0.03% Max.	0.25% Max.	0.08% Max.	残部

ブラスト材

自社で製造した骨伝導能を持つ生体親和性に優れた純粋な化学合成材料、水酸アパタイト (HAP) を含む β -リン酸三カルシウム (β -TCP) 共晶体です。




ブラスト材

ABS表面処理


骨伝導能を有する水酸アパタイト (HAP) を含む β -リン酸三カルシウム (β -TCP) の共晶体でブラスト処理を行い、チタン表面にマイクロラフネスが生成されオッセオインテグレーションが獲得できます。

インプラント嵌合部写真


S嵌合 現在製造インプラント (2009年～製造)

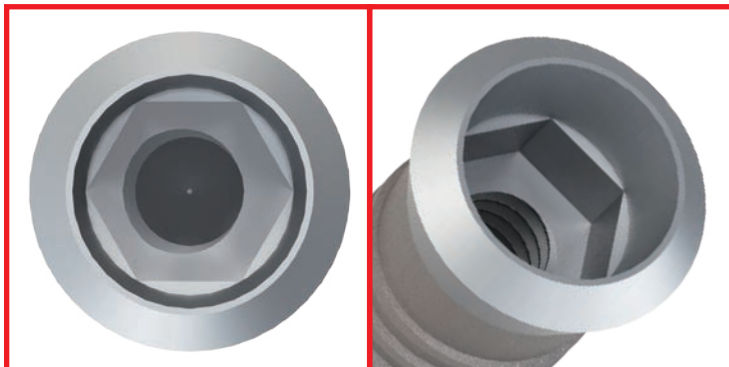


例 B4010S
例 B4010Sf

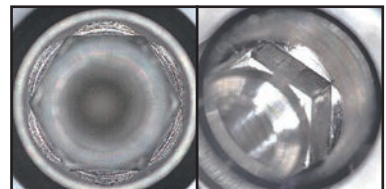


H嵌合 (1999年～2009年製造)

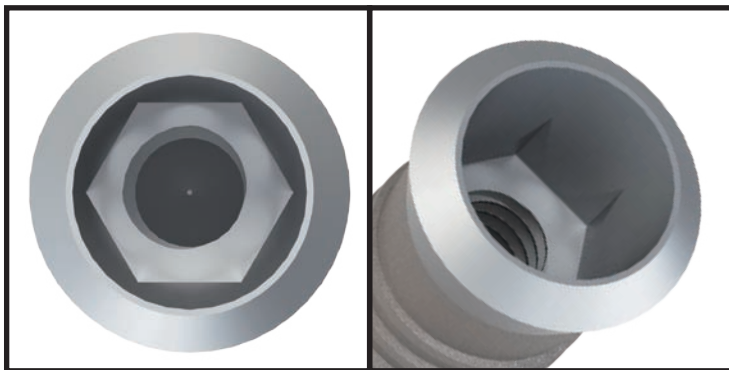


例 B4010H

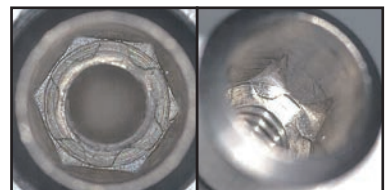

テーパー嵌合 (1997年～1998年製造)

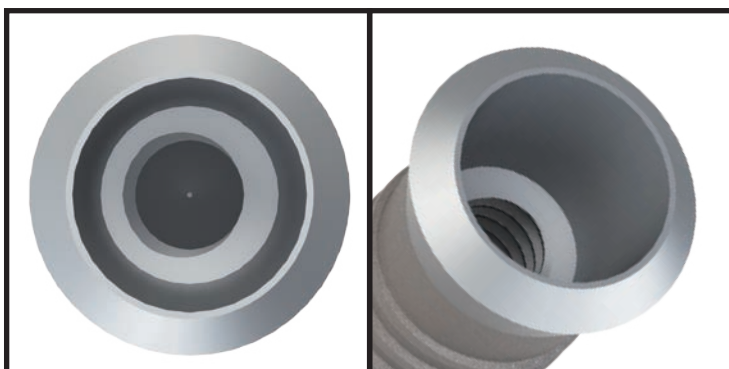

例 B4010

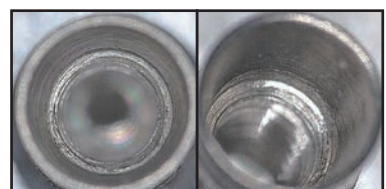


アバットメント仕様について

プラスアバットメント


製品名称の末尾にPの表記を追加します。
例) AB35C20-L70-HEX-**P**

アバットスクリュー**P**

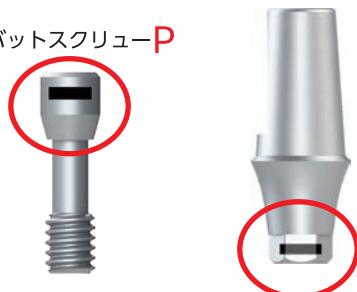

アバットメントとスクリューにマーキングがある
組合せで使用してください。

アバットリムーバー対応

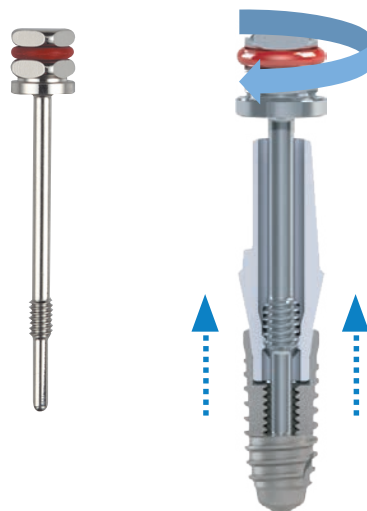

アバットメント内部のネジ構造により
PLUSリムーバーを回転させるだけで
アバットメントが簡単に除去できます。

アバットメント

製品名称は従来と同じ表記になります。
例) AG35-B15HEX

アバットスクリュー



アバットメントとスクリューにマーキングがない
組合せで使用してください。

アバットリムーバー非対応

<ノーマル嵌合>


AG35-D15
AG35-D25
AG35-B15HEX
AG35-B25HEX
AG35-B15-s
AG35-B25-s

<ワイド嵌合>

AG43-D15
AG43-D25
AG43-BW15HEX
AG43-BW25HEX
AG43-BW15-s
AG43-BW25-s

注意事項

スクリューの緩みや破損が生じる恐れがあるため、
誤った組合せで使用しないでください。

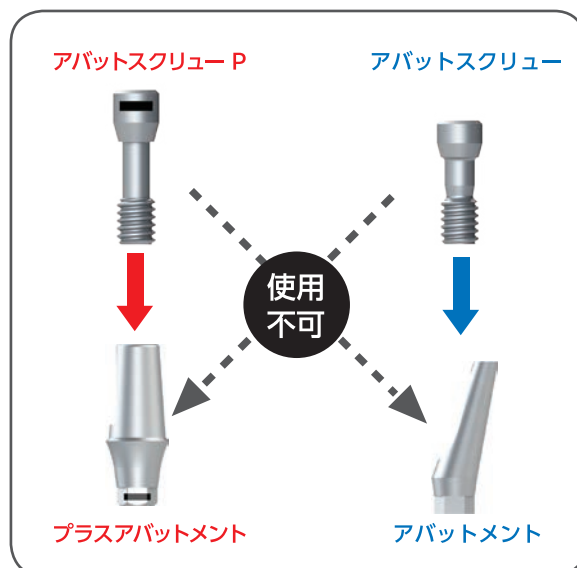

インプラント&アバットメントの嵌合

◆ 1 回法インプラント（嵌合ショルダー部）

	覆わない		半分覆う		全部覆う	
B33~46 BS37~46 E43, 46 BW47 EW50~70	AB35-HEX50L-P AB43-HEX××L-P	AG××-B××HEX 	AB35E-L××-HEX-P AB43H-L××-HEX-P	AG××-D×× 		
						

◆ 2 回法インプラント

	覆わない
C37~46 St40~50 Me40~50 EW50~70	

B-type

ノーマルタイプ

2.25mmの歯肉貫通部を設けたインプラントです。インプラント頭部が歯肉から露出しているため、オッセオインテグレーション後、2次外科手術を行わずアバットメントの装着が可能です。

付属品  CAP35-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値：40Ncm以下

 線滅菌済

再使用禁止

インプラント

φ3.3



製品名	埋入径 / 埋入長
B3306Sf	φ3.3 / 6.0mm
B3308Sf	φ3.3 / 8.0mm
B3310Sf	φ3.3 / 10.0mm
B3312Sf	φ3.3 / 12.0mm
B3314Sf	φ3.3 / 14.0mm

φ3.7



製品名	埋入径 / 埋入長
B3706Sf	φ3.7 / 6.0mm
B3708Sf	φ3.7 / 8.0mm
B3710Sf	φ3.7 / 10.0mm
B3712Sf	φ3.7 / 12.0mm
B3714Sf	φ3.7 / 14.0mm

φ4.0



製品名	埋入径 / 埋入長
B4006Sf	φ4.0 / 6.0mm
B4008Sf	φ4.0 / 8.0mm
B4010Sf	φ4.0 / 10.0mm
B4012Sf	φ4.0 / 12.0mm
B4014Sf	φ4.0 / 14.0mm

φ4.3




製品名	埋入径 / 埋入長
B4306Sf	φ4.3 / 6.0mm
B4308Sf	φ4.3 / 8.0mm
B4310Sf	φ4.3 / 10.0mm
B4312Sf	φ4.3 / 12.0mm
B4314Sf	φ4.3 / 14.0mm

φ4.6




製品名	埋入径 / 埋入長
B4606Sf	φ4.6 / 6.0mm
B4608Sf	φ4.6 / 8.0mm
B4610Sf	φ4.6 / 10.0mm
B4612Sf	φ4.6 / 12.0mm
B4614Sf	φ4.6 / 14.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン

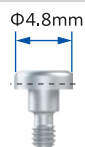


製品名	外径/高さ	金額
CSB-10-s	φ4.8 / 1.0mm	
CSB-25-s	φ4.8 / 2.5mm	

CSB-10-s

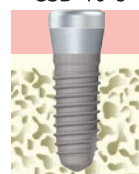

CSB-25-s

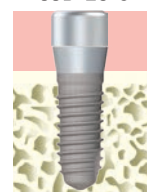

BS-type

ノーマルタイプ

1.45mmの歯肉貫通部を設けたインプラントです。B-typeの歯肉貫通部2.25mmより0.8mm短いタイプです。インプラント頭部が、歯肉貫通部から露出するため、オッセointegration後、2次外科術式を行わずアバットメントの装着が可能です。

付属品 CAP35-s 材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値：40Ncm以下 γ線滅菌済 再使用禁止

インプラント

φ3.7



製品名	埋入径 / 埋入長
BS3708Sf	φ3.7 / 8.0mm
BS3710Sf	φ3.7 / 10.0mm
BS3712Sf	φ3.7 / 12.0mm

φ4.0



製品名	埋入径 / 埋入長
BS4008Sf	φ4.0 / 8.0mm
BS4010Sf	φ4.0 / 10.0mm
BS4012Sf	φ4.0 / 12.0mm

φ4.3



製品名	埋入径 / 埋入長
BS4308Sf	φ4.3 / 8.0mm
BS4310Sf	φ4.3 / 10.0mm
BS4312Sf	φ4.3 / 12.0mm

φ4.6




製品名	埋入径 / 埋入長
BS4608Sf	φ4.6 / 8.0mm
BS4610Sf	φ4.6 / 10.0mm
BS4612Sf	φ4.6 / 12.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン




製品名	外径/高さ	金額
CSB-10-s	φ4.8 / 1.0mm	
CSB-25-s	φ4.8 / 2.5mm	

CSB-10-s

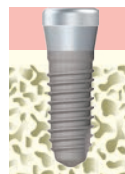

CSB-25-s

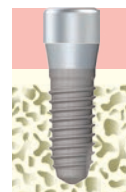

BSN-type

ナロータイプ

ノーマルタイプ

1.7mmの歯肉貫通部を設けたφ3,3mmナロータイプのインプラントです。プラットフォーム最大径はφ4,3mmでEタイプと同じです。Bタイプφ4,8と比べ小さい設計になっていますので、近遠心幅が少ない小臼歯部に適しています。カフの長さもBタイプに比べ短くなっていますので、歯肉が薄いケースに適しています。

付属品 CAP35-s 材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値：40Ncm以下 γ線滅菌済 再使用禁止

インプラント

φ3.3 ナロータイプ




製品名	埋入径 / 埋入長 / ネジ山径
BSN3308Sf	φ3.3 / 8.0mm / φ3.3
BSN3310Sf	φ3.3 / 10.0mm / φ3.3
BSN3312Sf	φ3.3 / 12.0mm / φ3.3
BSN3314Sf	φ3.3 / 14.0mm / φ3.3

カバースクリュー 材質：純チタン



製品名	外径/高さ	金額
CSE-10-s	4.3 / 1.0mm	
CSE-25-s	4.3 / 2.5mm	

CSE-10-s

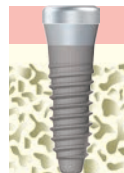

CSE-25-s



E-type

ノーマルタイプ

0.8mmの歯肉貫通部を設けたインプラントです。上顎、下顎ともに前歯部から小臼歯部の症例に適しています。歯肉が薄い症例の場合、インプラント頭部が歯肉部から露出しているため、オッセオインテグレーション後、2次外科手術を行わずアバットメントの装着が可能です。またインプラントを深めに埋入すると2回法としての使用も可能です。

Eタイプを2回法で使用する場合
2回法ノーマルタイプのアバットメントを使用します

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品 CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

φ3.3



製品名	埋入径 / 埋入長
E3310Sf	φ4.0 / 8.9mm
E3312Sf	φ4.0 / 10.9mm
E3314Sf	φ4.0 / 12.9mm

φ3.7



製品名	埋入径 / 埋入長
E3708Sf	φ4.0 / 6.9mm
E3710Sf	φ4.0 / 8.9mm
E3712Sf	φ4.0 / 10.9mm
E3714Sf	φ4.0 / 12.9mm


φ4.0



製品名	埋入径 / 埋入長
E4008Sf	φ4.0 / 6.9mm
E4010Sf	φ4.0 / 8.9mm
E4012Sf	φ4.0 / 10.9mm
E4014Sf	φ4.0 / 12.9mm

カバースクリュー 材質：純チタン E33xx~E40xxSf対応

	製品名	外径/高さ	金額
	CSE-10-s	φ4.3 / 1.0mm	
	CSE-25-s	φ4.3 / 2.5mm	

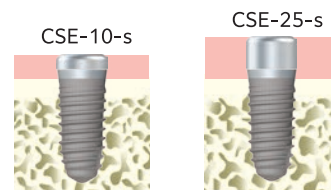

φ4.3



製品名	埋入径 / 埋入長
E4308Sf	φ4.3 / 6.65mm
E4310Sf	φ4.3 / 8.65mm
E4312Sf	φ4.3 / 10.65mm
E4314Sf	φ4.3 / 12.65mm


φ4.6



製品名	埋入径 / 埋入長
E4608Sf	φ4.6 / 6.65mm
E4610Sf	φ4.6 / 8.65mm
E4612Sf	φ4.6 / 10.65mm
E4614Sf	φ4.6 / 12.65mm

カバースクリュー 材質：純チタン E43xxSf~E46xxSf対応

	製品名	外径/高さ	金額
	CSB-10-s	φ4.8 / 1.0mm	
	CSB-25-s	φ4.8 / 2.5mm	

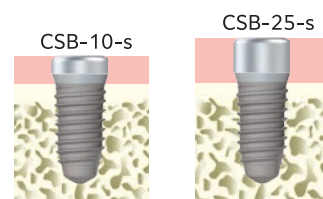

アバットメント B/BS/BSN/E-type

	覆わない	半分覆う	全部覆う		覆わない	半分覆う	全部覆う
B33~46 BS37~46 E43, 46				E33~40 BSN			

※P8をご覧ください

締付トルク値：30Ncm 再使用禁止

アバットメント

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※ スクリューが付属しています（チタン合金）

			製品名	高さ／角度	金額
B・BS E43,46	E33~40 BSN		AB35E-L35-HEX-P	3.5mm	
半分覆う	全部覆う		AB35E-L50-HEX-P	5.0mm	
			AB35E-L70-HEX-P	7.0mm	
覆わない	覆わない		AB35-HEX50L-P	5.0mm	
半分覆う	全部覆う		AG35-D05-P	7.0mm / 角度5°	
半分覆う	全部覆う		AG35-D15	9.0mm / 角度15°	
			AG35-D25	9.0mm / 角度25°	
覆わない	覆わない		AG35-B15HEX	9.0mm / 角度15°	
			AG35-B25HEX	9.0mm / 角度25°	

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています（チタン合金）

			製品名	高さ／角度	金額
E43,46 B・BS	E33~40 BSN		BS/A-35	3.5mm	
半分覆う	全部覆う		BS/A-50	5.0mm	
			BS/A-70	7.0mm	
覆わない	覆わない		AG35-B15-s	9.0mm / 角度15°	
			AG35-B25-s	9.0mm / 角度25°	
			アバットスクリュー	全長6.5mm / 材質 チタン合金	
			アバットスクリュー P	全長8.0mm / 材質 チタン合金 ※製品名末尾にPのつくアバットメントにご使用ください	

ボールアタッチメント 材質：純チタン

	製品名	仕様	金額
	ボールB-s	高さ2.4mm	

※ O リング No.4 対応

※ O リングは弊社では取り扱いはありません。別途お買い求めください

B/BS/E-type(E43~46××Sf)

再使用禁止

印象&技工パーツ

①インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

	製品名	高さ/カフ長	金額
クローズド・トレー用			
	N-M3コーピングS	9.8mm / 1.8mm	
	N-M3コーピングM	10.8mm / 2.8mm	
	N-M3コーピングL	12.5mm / 4.8mm	
オープン・トレー用			
	N-MEコーピングS	14.2mm / 3.1mm	
	N-MEコーピングM	15.2mm / 4.1mm	
	N-MEコーピングL	17.2mm / 6.1mm	

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	金額
	レプリカB-HEX-s	〈対応インプラント〉 B××Sf
	レプリカB-HEX-s (3個入)	BS××Sf
		E43~46××Sf

印象パーツセット

	製品名	金額
クローズド・トレー用印象セット		
	Bタイプ用 N-M3コーピングS印象セット	N-M3コーピングS レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-M3コーピングM印象セット	N-M3コーピングM レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-M3コーピングL印象セット	N-M3コーピングL レプリカB-HEX-s
オープン・トレー用印象セット		
	Bタイプ用 N-MEコーピングS印象セット	N-MEコーピングS レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-MEコーピングM印象セット	N-MEコーピングM レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-MEコーピングL印象セット	N-MEコーピングL レプリカB-HEX-s

②アバットメントレベル印象

印象パーツ&技工パーツ 材質：アクリル

	製品名	金額
	HAT35L (10個入)	〈対応アバットメント〉 AB35E-L××-HEX-P, BS/A-××

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	金額
	レプリカN-35L	〈対応アバットメント〉 AB35E-L××-HEX-P, BS/A-××
	レプリカN-50L	
	レプリカN-70L	

BSN/E-type(E33~40××Sf)

再使用禁止

印象&技工パーツ

① インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

	製品名	高さ/カフ長	金額
クローズド・トレイ用			
	N-M3コーピング S	9.8mm / 1.8mm	
	N-M3コーピング M	10.8mm / 2.8mm	
	N-M3コーピング L	12.5mm / 4.8mm	

オープン・トレイ用			
	N-MEコーピング S	14.2mm / 3.1mm	
	N-MEコーピング M	15.2mm / 4.1mm	
	N-MEコーピング L	17.2mm / 6.1mm	


作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	金額
	レプリカE-HEX-s	〈対応インプラント〉
	レプリカE-HEX-s (3個入)	E33~40××Sf BSN33××Sf

印象パーツセット

	製品名	金額
クローズド・トレイ用印象セット		
Eタイプ用 N-M3コーピングS印象セット	N-M3コーピングS レプリカE-HEX-s	
Eタイプ用 N-M3コーピングM印象セット	N-M3コーピングM レプリカE-HEX-s	
Eタイプ用 N-M3コーピングL印象セット	N-M3コーピングL レプリカE-HEX-s	
オープン・トレイ用印象セット		
Eタイプ用 N-MEコーピングS印象セット	N-MEコーピングS レプリカE-HEX-s	
Eタイプ用 N-MEコーピングM印象セット	N-MEコーピングM レプリカE-HEX-s	
Eタイプ用 N-MEコーピングL印象セット	N-MEコーピングL レプリカE-HEX-s	

カスタム用アバットメント

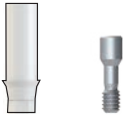	製品名	高さ／材質	金額
	パターン35HEX	9.7mm / アクリル	
	S-Pin	8.2mm / チタン合金	

チタンベース (HEX)

	製品名	高さ／カフ長	金額
	TB-BH-P	4.0mm / 1.0mm ※Parallel BSAB9481	

チタンベース (NON HEX)

	製品名	高さ／カフ長	金額
	TB-BN-P	4.0mm / 1.0mm ※Conical BSAD9431	

Dスキャンボディ

	製品名	高さ	金額
	Dscan-N-S	5.0mm	
	Dscan-N-L	10.0mm	

3Dプリンター用レプリカ

	製品名	高さ	金額
	レプリカB-HEX-3D	10.0mm	

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	高さ／カフ長	仕様	金額
	TP-AB35B-HEX-P	8.0mm / 1.1mm	(HEX)	
	TP-AB35B-NEG-P	8.0mm / 1.1mm	(NON HEX)	

※exocad表示名

Technician&CAD/CAM 関連製品 BSN/E33 ~ 40type

カスタム用アバットメント

	製品名	高さ / 材質	金額
	パターン35HEX	9.7mm / アクリル	
	S-Pin	8.2mm / チタン合金	

チタンベース (HEX)

	製品名	高さ / カフ長	金額
	TB-EH-P	4.0mm / 1.0mm ※E-AB35E-Ti-EG	

チタンベース (NON HEX)

	製品名	高さ / カフ長	金額
	TB-EN-P	4.0mm / 1.0mm ※E-AB35E-Ti-NEG	

Dスキャンボディ

	製品名	高さ	金額
	Dscan-N-S	5.0mm	
	Dscan-N-L	10.0mm	

3Dプリンター用レプリカ

	製品名	高さ	金額
	レプリカE-HEX-3D	高さ10.0mm	

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	高さ / カフ長	仕様	金額
	TP-AB35E-HEX-P	8.0mm / 0.9mm	(HEX)	
	TP-AB35E-NEG-P	8.0mm / 0.9mm	(NON HEX)	

※exocad表示名

C-type

ノーマルタイプ

歯肉貫通部を持たないインプラントです。前歯部・小臼歯部の審美性を重視する症例に適しています。歯槽骨頂よりも深めの植立が可能のため、植立直後のインプラント周囲への負荷は歯槽骨頂で受けることになり、インプラントはほぼ完全な静置状態に置かれます。そのため、骨質のよくない症例やGBRなどの症例に適しています。



CAP35-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

φ3.7



製品名	埋入径 / 埋入長
C3708Sf	φ3.7 / 8.0mm
C3710Sf	φ3.7 / 10.0mm
C3712Sf	φ3.7 / 12.0mm
C3714Sf	φ3.7 / 14.0mm

φ4.0



製品名	埋入径 / 埋入長
C4008Sf	φ4.0 / 8.0mm
C4010Sf	φ4.0 / 10.0mm
C4012Sf	φ4.0 / 12.0mm
C4014Sf	φ4.0 / 14.0mm

φ4.3



製品名	埋入径 / 埋入長
C4308Sf	φ4.3 / 8.0mm
C4310Sf	φ4.3 / 10.0mm
C4312Sf	φ4.3 / 12.0mm
C4314Sf	φ4.3 / 14.0mm

φ4.6



製品名	埋入径 / 埋入長
C4608Sf	φ4.6 / 8.0mm
C4610Sf	φ4.6 / 10.0mm
C4612Sf	φ4.6 / 12.0mm
C4614Sf	φ4.6 / 14.0mm

C-type ナロータイプ

歯肉貫通部を持たないφ3.3mmナロータイプのインプラントです。下顎1番中間歯欠損や、骨幅の少ない症例に適しています。破折リスク軽減のため、スクリューを細くすることなくM2ネジを使用しています。そのため嵌合が通常Cタイプと異なりますのでご注意ください。



CAP33-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

φ3.3 ナロータイプ



製品名	埋入径 / 埋入長 / ネジ山径
C3308Sf	φ3.3 / 8.0mm / φ3.3
C3310Sf	φ3.3 / 10.0mm / φ3.3
C3312Sf	φ3.3 / 12.0mm / φ3.3
C3314Sf	φ3.3 / 14.0mm / φ3.3

テーパー嵌合タイプアバットメントは使用不可

CタイプのHEX嵌合タイプアバットメントは全てで使用できます。
※嵌合(テーパー部)が浅いため、アバットメント、ヒーリングキャップの露出が、1.02mm程長くなります

C-type C-type
ナロータイプ



嵌合が浅い

St-type

ノーマルタイプ

付属品  CAP35-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

γ線滅菌済

再使用禁止

埋入トルク値：40Ncm以下

先端はしっかりと皮質骨をとらえる
ファインエッジがあり、歯冠側頸部には
リバーステーパー、プラットホーム
チェンジング形態が付与されているため
審美性に優れています。軟らかい骨
でも優れた初期固定が期待できます。

インプラント

φ4.0



製品名 埋入径 / 埋入長

St4008Sf φ4.0 / 8.0mm

St4010Sf φ4.0 / 10.0mm

St4012Sf φ4.0 / 12.0mm

St4014Sf φ4.0 / 14.0mm

φ4.3



製品名 埋入径 / 埋入長

St4308Sf φ4.3 / 8.0mm

St4310Sf φ4.3 / 10.0mm

St4312Sf φ4.3 / 12.0mm

St4314Sf φ4.3 / 14.0mm

φ5.0



製品名 埋入径 / 埋入長

St5008Sf φ5.0 / 8.0mm

St5010Sf φ5.0 / 10.0mm

St5012Sf φ5.0 / 12.0mm

Me-type

ノーマルタイプ

付属品  CAP35-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

γ線滅菌済

再使用禁止

埋入トルク値：40Ncm以下

歯根側先端部と歯根側の第1スレッド
側面に粘膜に優しいラウンド形態
が付与されています。歯冠側には埋
入時に高トルクが出るネックロック
形態を付与。また下顎での骨形成高
もセルフタップがなく安全な埋入が
できます。

インプラント

φ4.0



製品名 埋入径 / 埋入長

Me4008Sf φ4.0 / 8.0mm

Me4010Sf φ4.0 / 10.0mm

Me4012Sf φ4.0 / 12.0mm

φ4.3



製品名 埋入径 / 埋入長

Me4308Sf φ4.3 / 8.0mm

Me4310Sf φ4.3 / 10.0mm

Me4312Sf φ4.3 / 12.0mm

φ5.0



製品名 埋入径 / 埋入長

Me5008Sf φ5.0 / 8.0mm

Me5010Sf φ5.0 / 10.0mm

Me5012Sf φ5.0 / 12.0mm

C/Cナロー/St/Me-type

ヒーリングキャップ 材質：純チタン

製品名 外径/高さ 金額

HC-30-s
HC-50-s

φ4.8 / 3.0mm
φ4.8 / 5.0mm


φ4.8mm



HC-30-s



HC-50-s

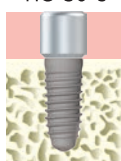

製品名 外径/高さ 金額

HC-30T-s
HC-50T-s

φ4.8 / 3.0mm
φ4.8 / 5.0mm

φ4.8mm



HC-30T-s




HC-50T-s



HC-30TW-s
HC-50TW-s

φ5.6 / 3.0mm
φ5.6 / 5.0mm


φ5.6mm

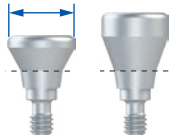

HC-30TW-s




HC-50TW-s

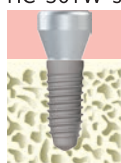

HC-30ST-s
HC-50ST-s

φ3.5 / 3.0mm
φ3.5 / 5.0mm


φ3.5mm

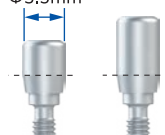

HC-30ST-s



HC-50ST-s

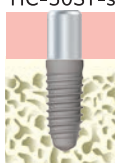

アバットメント C/Cナロー/St/Me-type

締付トルク値:30Ncm

再使用禁止

アバットメント②

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※スクリューが付属しています（チタン合金）

	製品名	高さ／カフ長／角度	金額
	AB35C10-L35-HEX-P	3.5mm / 1.0mm	
	AB35C20-L35-HEX-P	3.5mm / 2.0mm	
	AB35C30-L35-HEX-P	3.5mm / 3.0mm	
	AB35C10-L50-HEX-P	5.0mm / 1.0mm	
	AB35C20-L50-HEX-P	5.0mm / 2.0mm	
	AB35C30-L50-HEX-P	5.0mm / 3.0mm	
	AB35C10-L70-HEX-P	7.0mm / 1.0mm	
	AB35C20-L70-HEX-P	7.0mm / 2.0mm	
	AB35C30-L70-HEX-P	7.0mm / 3.0mm	
	AG35C-D05-P	7.0mm / 1.0mm / 5°	
	AG35C-D15-P	9.0mm / 1.0mm / 15°	
	AG35C-D25-P	9.0mm / 1.0mm / 25°	
	AG35C10-HEX15-P	9.0mm / 1.0mm / 15°	
	AG35C20-HEX15-P	9.0mm / 2.0mm / 15°	
	AG35C30-HEX15-P	9.0mm / 3.0mm / 15°	
	AG35C10-HEX25-P	9.0mm / 1.0mm / 25°	
	AG35C20-HEX25-P	9.0mm / 2.0mm / 25°	
	アバットスクリューP	全長8.0mm / 材質 チタン合金	
		※末尾 P のアバットメントにご使用ください	

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています（チタン合金）

	製品名	高さ／カフ長／角度	金額
	AG35-C15-s-P	9.0mm / 1.5mm / 15°	
	AG35-C25-s-P	9.0mm / 1.5mm / 25°	
		※Cナロー-typeは使用不可	

ボールアタッチメント 材質：純チタン

	製品名	高さ／カフ長	金額
	ボールC20-s	2.4mm / 2.0m	
		※OリングNo.4対応	
		※Oリングは弊社では取り扱いはありません。別途お問い合わせください	
		※Cナロー-typeは使用不可	

マルチピースアバットメント

再使用禁止


マルチピースアバットメント

テーパー嵌合タイプ(1P) 材質：純チタン

	製品名	仕様	金額
	MP-AB35C10-s	φ4.8 / カフ長1.0mm	
	MP-AB35C20-s	φ4.8 / カフ長2.0mm	
	MP-AB35C30-s	φ4.8 / カフ長3.0mm	
	MP-AB35C40-s	φ4.8 / カフ長4.0mm	
	MP-AB35C50-s	φ4.8 / カフ長5.0mm	


※Cナロー-typeは使用不可

HEX嵌合タイプ(2P) 材質：純チタン スクリュー材質：チタン合金 ※HEX嵌合タイプにはMP-AB35C××-HEX専用スクリューが付属されています

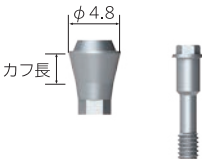	製品名	仕様	金額
	MP-AB35C10-HEX	φ4.8 / カフ長1.0mm	
	MP-AB35C20-HEX	φ4.8 / カフ長2.0mm	
	MP-AB35C30-HEX	φ4.8 / カフ長3.0mm	
	MP-AB35C40-HEX	φ4.8 / カフ長4.0mm	
	MP-AB35C50-HEX	φ4.8 / カフ長5.0mm	

アングルタイプ 材質：純チタン スクリュー材質：チタン合金

※アングルタイプにはMP-AGスクリューが付属されています

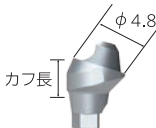	製品名	仕様	金額
	MP-AG35C25-HEX17	φ4.8 / カフ長2.5mm / 角度17°	
	MP-AG35C35-HEX17	φ4.8 / カフ長3.5mm / 角度17°	
	MP-AG35C45-HEX17	φ4.8 / カフ長4.5mm / 角度17°	
	MP-AG35C55-HEX17	φ4.8 / カフ長5.5mm / 角度17°	

※Cナロー-typeは使用不可


	MP-AG35C35-HEX30	φ4.8 / カフ長3.5mm / 角度30°	
	MP-AG35C45-HEX30	φ4.8 / カフ長4.5mm / 角度30°	

※Cナロー-typeは使用不可

	MP-AGスクリュー (2個入)	全長7.1mm / 材質 チタン合金	
---	---------------------	--------------------	--

マルチピース用シリンダー 材質：純チタン

※シリンダーにはMP-シリンダースクリューが付属されています

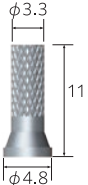	製品名	仕様	金額
	MP-シリンダー33	φ3.3 / φ4.8 / 高さ11mm	
	MP-シリンダー43	φ4.3 / φ4.8 / 高さ11mm	

※削合可能範囲は先端方向から6mm

	MP-シリンダースクリュー (2個入)	全長 3.9mm / 材質 チタン合金	
---	------------------------	---------------------	--

キャップ 材質：純チタン


	製品名	仕様	金額
	MP-CAP-47	高さ4.7mm	
	MP-CAP-67	高さ6.7mm	

マルチピース


再使用禁止

印象&技工パーツ


技工用パターン 材質：アクリル

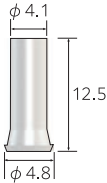	製品名	高さ	金額
	MP パターン	12.5mm	

技工用レプリカ 材質：ステンレス

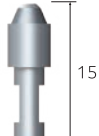
	製品名	高さ	金額
	MP レプリカ	15mm	

印象用コーピング 材質：純チタン

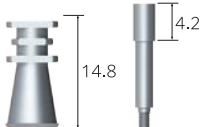	製品名	高さ	金額
オープン・トレイ用 	MP コーピング - OPT	14.8mm	

※スクリューが付属されています

技工用スクリュー 材質：チタン合金

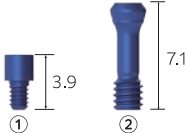	製品名	仕様	金額
	① 技工用MP-シリンダースクリュー (2個入) ② 技工用MP-AGスクリュー (2個入)		

マルチピースアバットメント締め付け方

締付ドライバー(コントラ用)




※対応アバットメント：テーパー嵌合タイプ
HEX 嵌合タイプ

締付ドライバー(レンチ用)



※対応アバットメント：テーパー嵌合タイプ
HEX 嵌合タイプ


締付トルクガイド

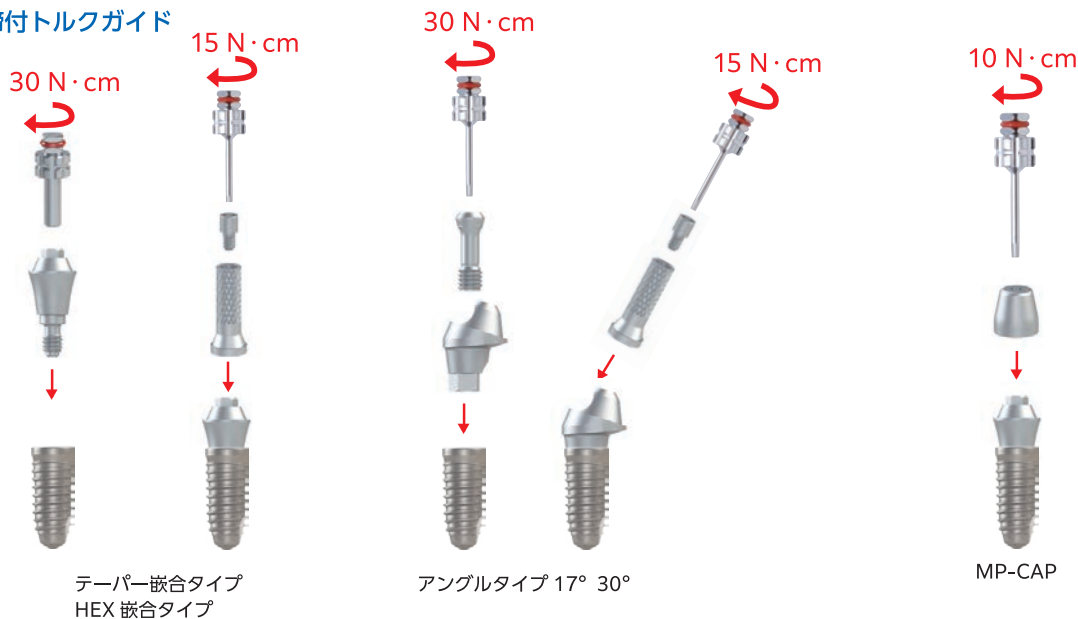


注意

- ・ MP-シリンダースクリューの締付トルクは 15Ncm を超えないようにしてください。破損する恐れがあります。
- ・ 上部構造には必ずMP-シリンダーを使用して製作してください。

TBP-System

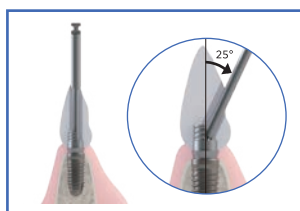

TBP-System 傾斜角

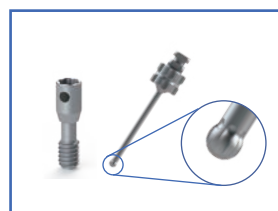

TBPスクリューP&TBPドライバー

TBPアバットメント 材質：純チタン

	製品名	仕様	金額
	TBPアバットメント		
	TBPスクリューP		
	技工用TBPスクリューP(2個入)		

※TBPドライバーはP.44に記載しております


C/Cナロー/St/Me-type


再使用禁止

印象&技工パーツ

①インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

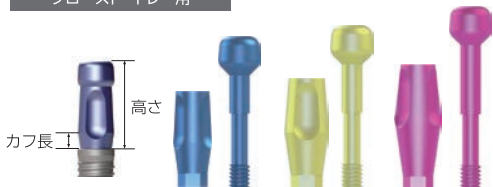	製品名	高さ／カフ長	金額
クローズド・トレイ用			
	N-M3コーピング S	9.8mm / 1.8mm	
	N-M3コーピング M	10.8mm / 2.8mm	
	N-M3コーピング L	12.5mm / 4.8mm	

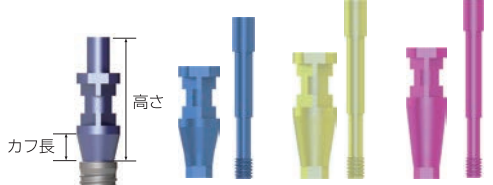オープン・トレイ用			
	N-MEコーピング S	14.2mm / 3.1mm	
	N-MEコーピング M	15.2mm / 4.1mm	
	N-MEコーピング L	17.2mm / 6.1mm	

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	金額
	レプリカC-HEX-s	〈対応インプラント〉 CxxxxSf StxxxxSf MexxxxxSf
	レプリカC-HEX-s(3個入)	
	レプリカC33-HEX-s	C33×Sf

印象パーツセット

	製品名	金額
クローズド・トレイ用印象セット		
	Cタイプ用 N-M3 コーピング S 印象セット	N-M3コーピングS レプリカC-HEX-s
	Cタイプ用 N-M3 コーピング M 印象セット	N-M3コーピングM レプリカC-HEX-s
	Cタイプ用 N-M3 コーピング L 印象セット	N-M3コーピングL レプリカC-HEX-s
		各1個入
オープン・トレイ用印象セット		
	Cタイプ用 N-ME コーピング S 印象セット	N-MEコーピングS レプリカC-HEX-s
	Cタイプ用 N-ME コーピング M 印象セット	N-MEコーピングM レプリカC-HEX-s
	Cタイプ用 N-ME コーピング L 印象セット	N-MEコーピングL レプリカC-HEX-s
		各1個入

②アバットメントレベル印象

印象パーツ&技工パーツ 材質：アクリル

	製品名	金額
	HAT35L(10個入)	〈対応アバットメント〉 AB35Cxx-Lxx-HEX-P

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	金額
	レプリカN-35L レプリカN-50L レプリカN-70L	〈対応アバットメント〉 AB35Cxx-Lxx-HEX-P

細いタイプのコーピング

再使用禁止

B/BS/BSN/C/Cナロー/E/St/Me-type

印象&技工パーツ

① インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

	製品名	高さ／カフ長	金額
--	-----	--------	----

クローズド・トレー用



N-CLTコーピングS
N-CLTコーピングL

9.1mm / 1.2mm
12.1mm / 4.2mm

オープン・トレー用



N-OPTコーピングS
N-OPTコーピングL

14.3mm / 3.0mm
17.3mm / 6.0mm

カスタム用アバットメント

	製品名	高さ／材質	金額
	パターン35HEX	9.7mm / アクリル	
	S-Pin	8.2mm / チタン合金	

チタンベース (HEX)

	製品名	仕高さ／カフ長	金額
	TB-CH-P	4.0mm / 0.7mm ※Parallel BSAB9482	

チタンベース (NON HEX)

	製品名	仕高さ／カフ長	金額
	TB-CN-P	4.0mm / 0.7mm ※Conical BSAD9432	

Dスキャンボディ

	製品名	高さ	金額
	Dscan-N-S	高さ5.0mm ※Dscan marker	
	Dscan-N-L	高さ10.0mm ※White scan marker	

3Dプリンター用レプリカ

	製品名	高さ	金額
	レプリカC-HEX-3D	10.0mm	

マルチピースアバットメント用Dスキャンボディ

	製品名	高さ	金額
	Dscan-MP	5.0mm	

マルチピースアバットメント用チタンベース

	製品名	高さ／カフ長	金額
	MP-CAD シリンダー35	3.5mm / 1.0mm	
	MP-CAD シリンダー50	5.0mm / 1.0mm	
	MP-CAD シリンダー70	7.0mm / 1.0mm	

テンポラリー用アバットメント

材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	高さ／カフ長	仕様	金額
	TP-AB35-HEX-P	7.55mm / 1.15mm	(HEX)	
	TP-AB35-NEG-P	7.55mm / 1.15mm	(NON HEX)	

※exocad表示名

Technician&CAD/CAM 関連製品

	チタンベース スクリューが付属しています		Dスキャン スクリューが付属しています ※材質:チタン		3Dプリンター用 レプリカ exocad Model Creator対応
	PARALLEL (HEX)	CONICAL (NON HEX)			
B / BS / E43 E46 Type	TB-BH-P 	TB-BN-P 	Dscan-N-S 	Dscan-N-L 	レプリカ B-HEX-3D 
	※Parallel BSAB9481	※Conical BSAD9431	Dscan marker	White Scan marker	
C / St / Me (E33 E46) Type	TB-CH-P 	TB-CN-P 	Dscan-N-S 	Dscan-N-L 	レプリカ C-HEX-3D 
	※Parallel BSAB9482 (Parallel BSAB9483)	※Conical BSAD9432 (Conical BSAD9433)	Dscan marker	White Scan marker	
BSN E33 E40 Type	TB-EH-P 	TB-EN-P 	Dscan-N-S 	Dscan-N-L 	レプリカ E-HEX-3D 
	※E-AB35E-Ti-EG	※E-AB35E-Ti-NEG	Dscan marker	White Scan marker	
BW47 EW50 Type	TB-WH-P 	TB-WN-P 	Dscan-W-S 		レプリカ W-HEX-3D 
	※Parallel BSAB9484	※Conical BSAD9434	Dscan marker		

	マルチピースアバットメント用 シリンダー スクリューが付属しています			マルチピースアバットメント用 スキャンボディ スクリューが付属しています
C / St / Me Type	MP-CADシリンダー35 	MP-CADシリンダー50 	MP-CADシリンダー70 	Dscan-MP 
	3.5mm	5.0mm	7.0mm	MP-Abutment Dscan marker

※exocad表示名

BW-type

ワイドタイプ

Bタイプのワイドタイプです。大臼歯部や単独植立、臼歯部などに適しています。細めのインプラントを選択し植立を行った際、初期固定が得られない状況でのバックアップ用や抜歯窩などの大きな骨欠損部への植立にも対応可能です。

付属品  CAP43-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

γ線滅菌済

再使用禁止

埋入トルク値：40Ncm以下

インプラント

φ4.7



製品名	埋入径 / 埋入長
BW4708Sf	φ4.7 / 8.0mm
BW4710Sf	φ4.7 / 10.0mm
BW4712Sf	φ4.7 / 12.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン

製品名	外径/高さ	金額
CSBW-10-s	φ5.6 / 1.0mm	
CSBW-25-s	φ5.6 / 2.5mm	



Φ5.6mm



CSBW-10-s



CSBW-25-s

EW-type

ワイドタイプ

Eタイプのワイドタイプです。大臼歯部や単独植立、臼歯部などに適しています。細めのインプラントを選択し植立を行った際、初期固定が得られない状況でのバックアップ用や抜歯窩などの大きな骨欠損部に植立可能なインプラントです。

ショートタイプ

Eタイプのワイドタイプのショートインプラントです。太さφ5mm長さ5mmのショートタイプです。上顎ソケットリフトを回避したいケースや、下顎管近接症例での使用に適しています。また、ネック部が上顎迷入防止仕様になっておりますので、ソケットリフトにも対応可能です。

付属品  CAP43-s

材質：純チタン製
表面処理：ABS

γ線滅菌済

再使用禁止

埋入トルク値：40Ncm以下

インプラント

φ5.0



製品名	埋入径 / 埋入長
EW5006Sf	φ5.0 / 6.0mm
EW5008Sf	φ5.0 / 8.0mm
EW5010Sf	φ5.0 / 10.0mm
EW5012Sf	φ5.0 / 12.0mm

φ6.0



製品名	埋入径 / 埋入長
EW6006Sf	φ6.0 / 6.0mm
EW6008Sf	φ6.0 / 8.0mm
EW6010Sf	φ6.0 / 10.0mm

φ7.0



製品名	埋入径 / 埋入長
EW7006Sf	φ7.0 / 6.0mm
EW7008Sf	φ7.0 / 8.0mm
EW7010Sf	φ7.0 / 10.0mm

φ5.0 ショートタイプ



製品名	埋入径 / 埋入長
EW5005Sf	φ5.0 / 5.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン

製品名	外径/高さ	金額
CSBW-10-s	φ5.6 / 1.0mm	
CSBW-25-s	φ5.6 / 2.5mm	



ヒーリングキャップ 材質：純チタン

製品名	外径/高さ	金額
HCW-30-s	φ4.8 / 3.0mm	
HCW-50-s	φ4.8 / 5.0mm	



HCW-30T-s	φ5.6 / 3.0mm
HCW-50T-s	φ5.6 / 5.0mm



アバットメント BW/EW/EWショート-type

	覆わない	半分覆う
BW47 EW50~70 EWショートタイプ		

※P8をご覧ください

締付トルク値：30Ncm 再使用禁止

アバットメント

BW-type,EW-type共通

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※スクリューが付属しています（チタン合金）

	製品名	仕様	金額
半分覆う	 AB43H-L35-HEX-P AB43H-L50-HEX-P AB43H-L70-HEX-P	高さ3.5mm 高さ5.0mm 高さ7.0mm	
覆わない	 AB43-HEX50L-P AB43-HEX70L-P	高さ5.0mm 高さ7.0mm	
覆わない	 AB43C10-L50-HEX-P AB43C10-L70-HEX-P	高さ5.0mm / カフ長1.0mm 高さ7.0mm / カフ長1.0mm	
半分覆う	 AG43-D05-P	高さ7.0mm / 角度5°	
半分覆う	 AG43-D15 AG43-D25	高さ9.0mm / 角度15° 高さ9.0mm / 角度25°	
覆わない	 AG43-BW15HEX AG43-BW25HEX	高さ9.0mm / 角度15° 高さ9.0mm / 角度25°	
	 アバットスクリュー	全長6.5mm / 材質 チタン合金	
	 アバットスクリューP	全長8.0mm / 材質 チタン合金 ※末尾 P のアバットメントにご使用ください	

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています（チタン合金）

	製品名	仕様	金額
半分覆う	 WS/A-35 WS/A-50 WS/A-70	高さ3.5mm 高さ5.0mm 高さ7.0mm	
覆わない	 AG43-BW15-s AG43-BW25-s	高さ9.0mm / 角度15° 高さ9.0mm / 角度25°	

ボールアタッチメント 材質：純チタン

製品名	仕様	金額
 ボールBW-s	高さ2.4mm	

※OリングNo.4対応

※Oリングは弊社では取り扱いはありません。別途買い求めください

BW/EW/EWショート-type


再使用禁止

印象&技工パーツ

①インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：純チタン

	製品名	高さ／カフ長	金額
クローズド・トレー用			
	W-M3コーピング S	10.3mm / 1.8mm	
	W-M3コーピング L	13.0mm / 4.5mm	

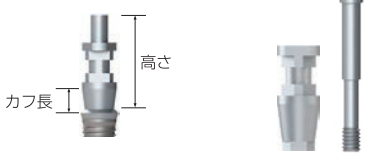オープン・トレー用			
	W-MEコーピング	14.5mm / 3.0mm	

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	金額
	レプリカW-HEX-s	〈対応インプラント〉 BW47××Sf
	レプリカW-HEX-s (3個入)	EW50××Sf
	レプリカW60-HEX-s	〈対応インプラント〉 EW60××Sf
	レプリカW70-HEX-s	〈対応インプラント〉 EW70××Sf

印象パーツセット BW47, EW50 対応

	製品名	金額
クローズド・トレー用印象セット		
	W-M3コーピング S 印象セット	W-M3コーピング S レプリカW-HEX-s*
	W-M3コーピング L 印象セット	W-M3コーピング L レプリカW-HEX-s*
オープン・トレー用印象セット		
	W-MEコーピング 印象セット	W-MEコーピング レプリカW-HEX-s*

※ EW60××Sf→レプリカW60-HEX-s
EW70××Sf→レプリカW70-HEX-s

②アバットメントレベル印象

印象パーツ & 技工パーツ

	製品名	金額
	HAT43L (10 個入)	〈対応インプラント〉 BW47xxSf, EW50xxSf 〈対応アバットメント〉 AB43H-Lxx-HEX-P, WS/A-xx AB43C10-Lxx-HEX

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	金額
	レプリカW-35L レプリカW-50L レプリカW-70L	〈対応インプラント〉 BW47xxSf, EW50xxSf 〈対応アバットメント〉 AB43H-Lxx-HEX-P, WS/A-xx AB43C10-Lxx-HEX

Technician&CAD/CAM 関連製品

BW/EW Type

カスタム用アバットメント

	製品名	高さ／材質	金額
	パターン43HEX	10.1mm / アクリル	
	S-Pin	全長 8.2mm / チタン合金	

チタンベース (HEX)

	製品名	高さ／カフ長	金額
	TB-WH-P	4.0mm / 1.0mm ※Parallel BSAB9484	

チタンベース (NON HEX)

	製品名	高さ／カフ長	金額
	TB-WN-P	4.0mm / 1.0mm ※Conical BSAD9434	

Dスキャンボディ

	製品名	高さ	金額
	Dscan-W-S	5.0mm	

3Dプリンター用レプリカ

	製品名	高さ	金額
	レプリカW-HEX-3D	10.0mm	

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	高さ／カフ長	仕様	金額
	TP-AB43-HEX-P	7.55mm / 1.15mm	(HEX)	
	TP-AB43-NEG-P	7.55mm / 1.15mm	(NON HEX)	
	TP-AB43W-HEX-P	8.0mm / 1.1mm	(HEX)	
	TP-AB43W-NEG-P	8.0mm / 1.1mm	(NON HEX)	

※exocad表示名

全体図




1 回法ノーマルタイプ

B-type $\phi 3.3$ $\phi 3.7$ $\phi 4.0$ $\phi 4.3$ $\phi 4.6$
 BS-type $\phi 3.7$ $\phi 4.0$ $\phi 4.3$ $\phi 4.6$

BSN-type $\phi 3.3$

E-type $\phi 3.3$ $\phi 3.7$ $\phi 4.0$ $\phi 4.3$ $\phi 4.6$


インプラントレベル印象

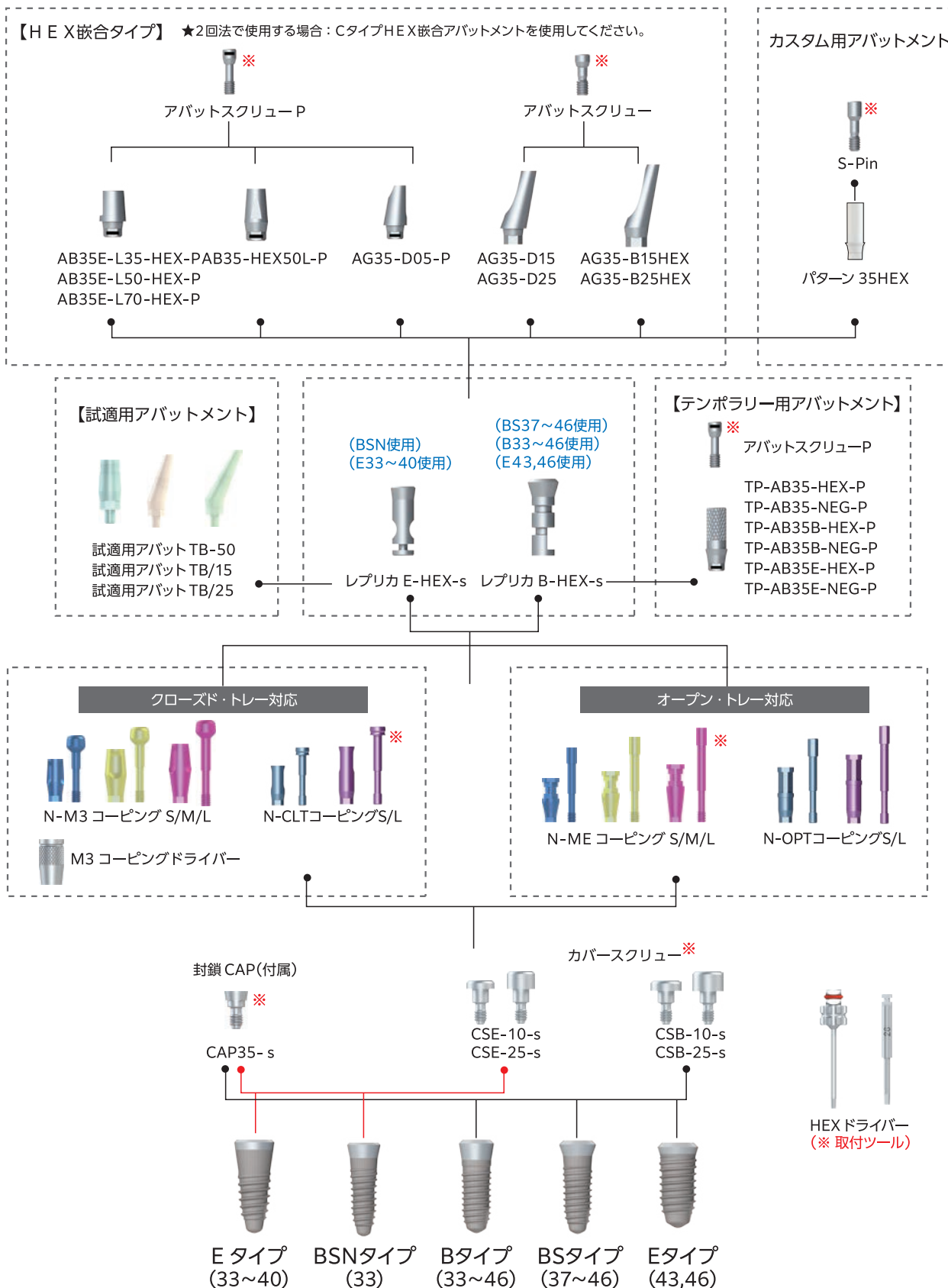


アバットメントレベル印象

パターン


※パターンでの使用は加工が必要です

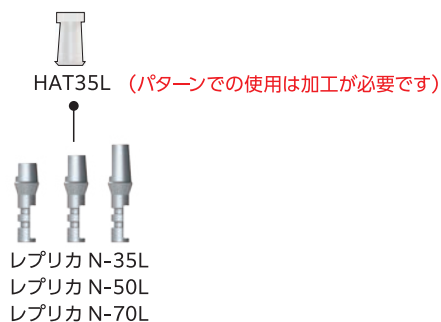

印象パーツ

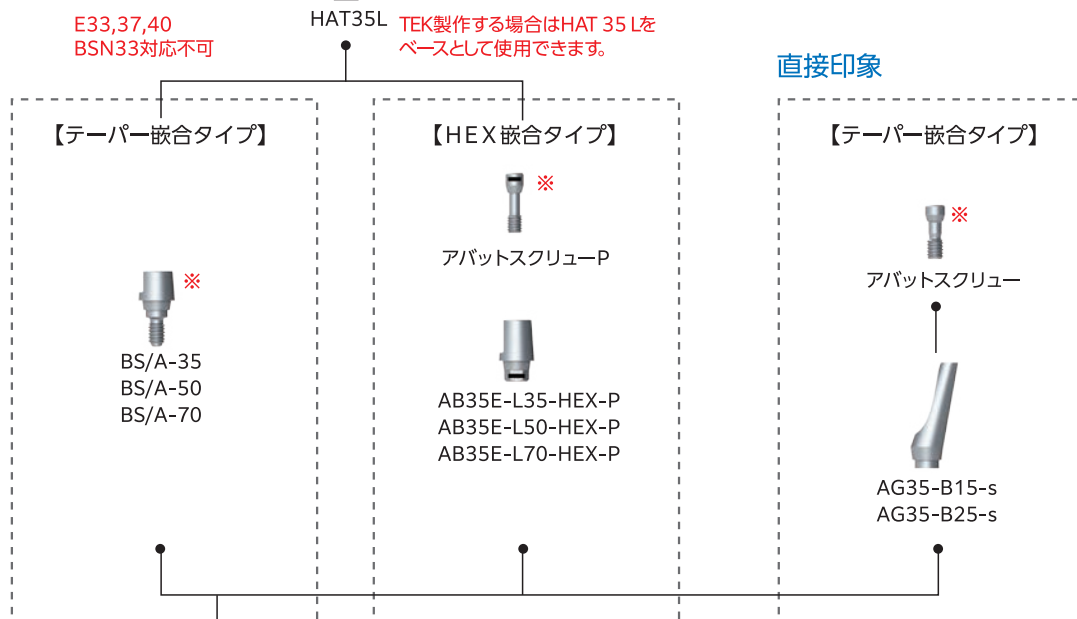

直接印象

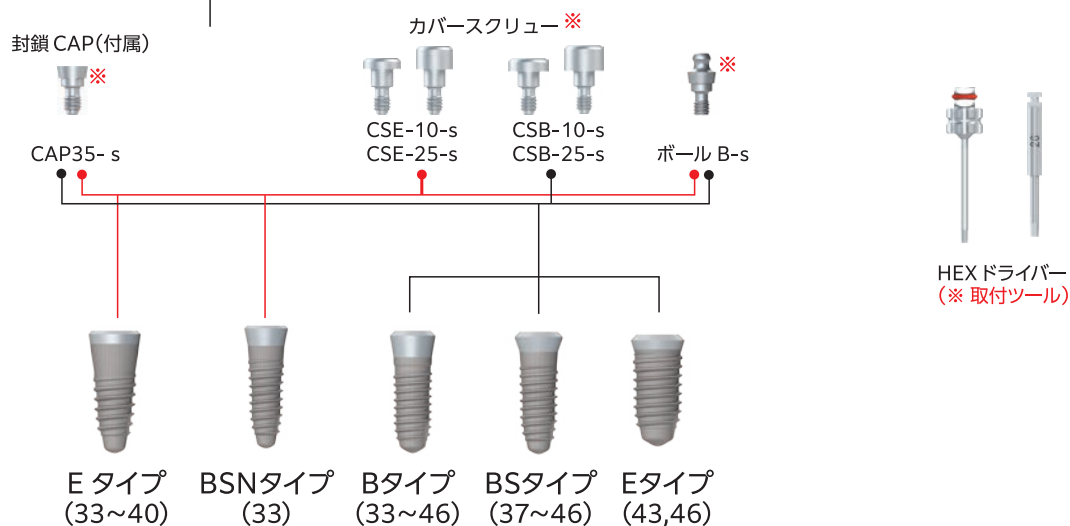

全体図



2回法ノーマルタイプ


C-type $\phi 3.7$ $\phi 4.0$ $\phi 4.3$ $\phi 4.6$

C-type $\phi 3.3$
ナロータイプ

St-type $\phi 4.0$ $\phi 4.3$ $\phi 5.0$

Me-type $\phi 4.0$ $\phi 4.3$ $\phi 5.0$


インプラントレベル印象

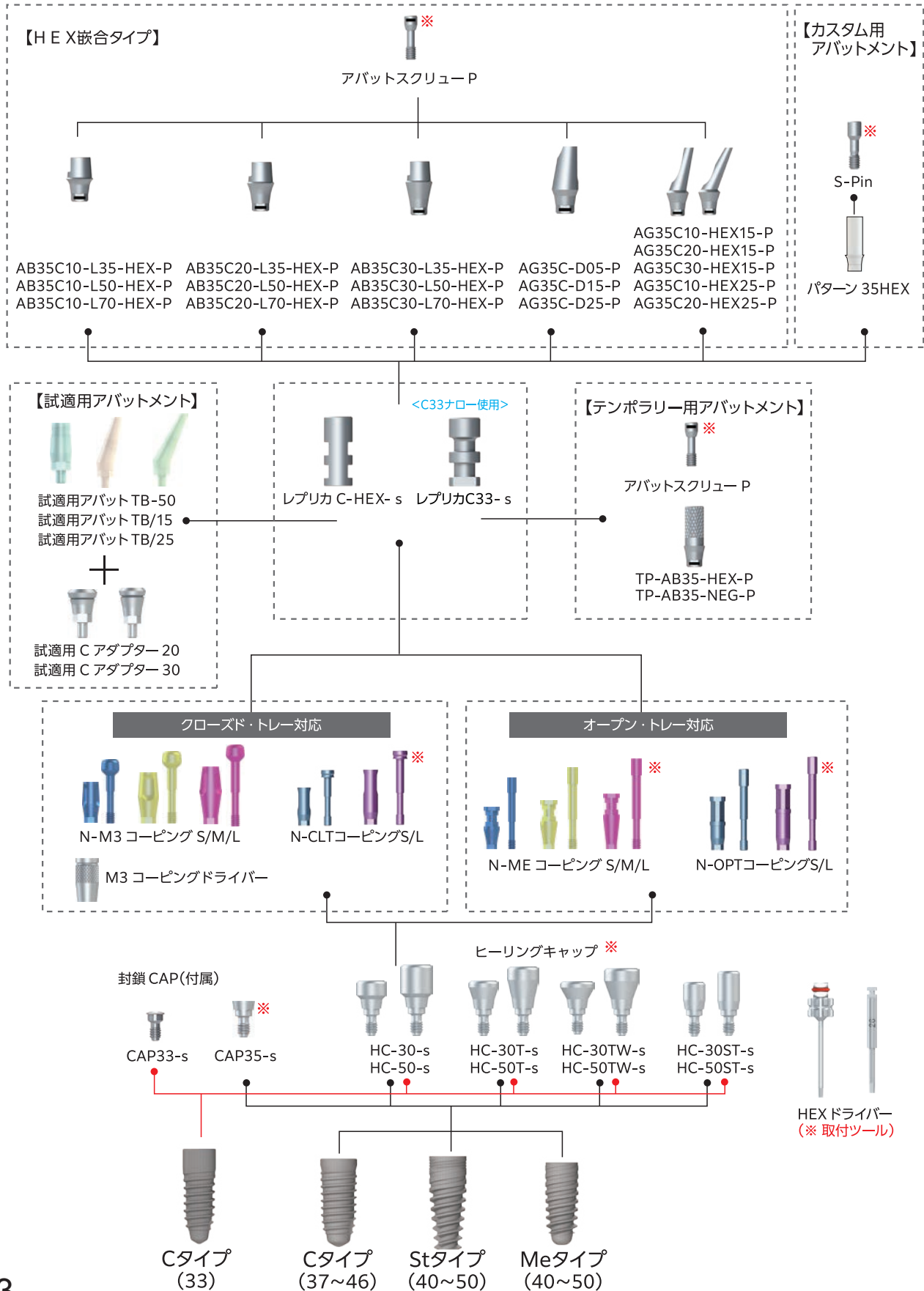


アバットメントレベル印象

※パターンでの使用は加工が必要です


パターン

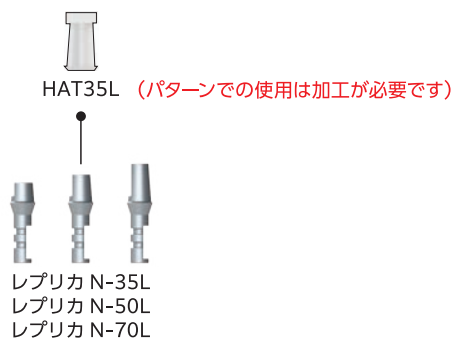


印象パーツ

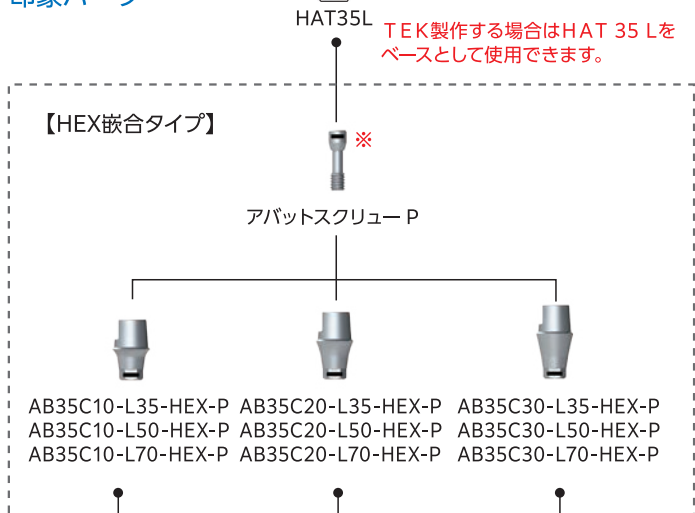

直接印象

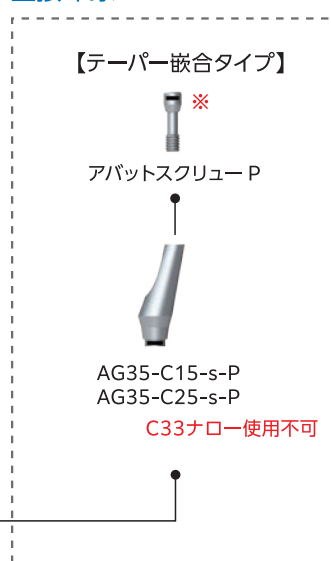


封鎖CAP(付属)

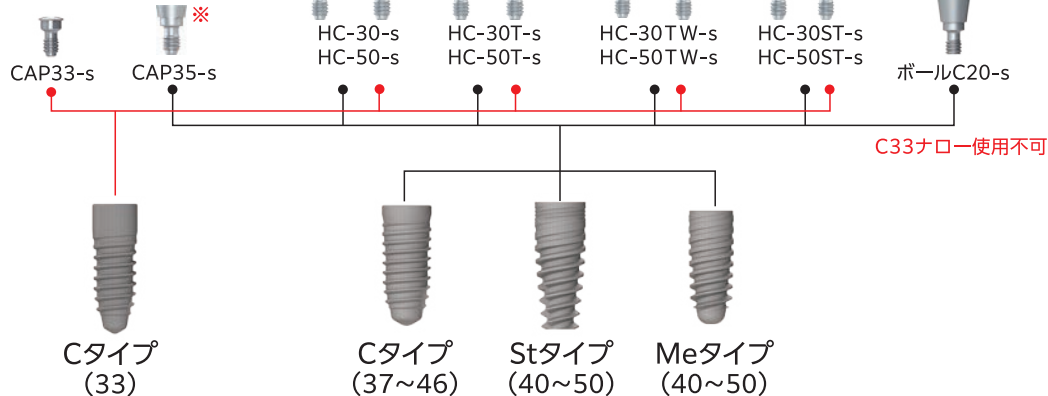


全体図

マルチピースアバットメント (単冠使用は出来ません)

インプラントレベル印象

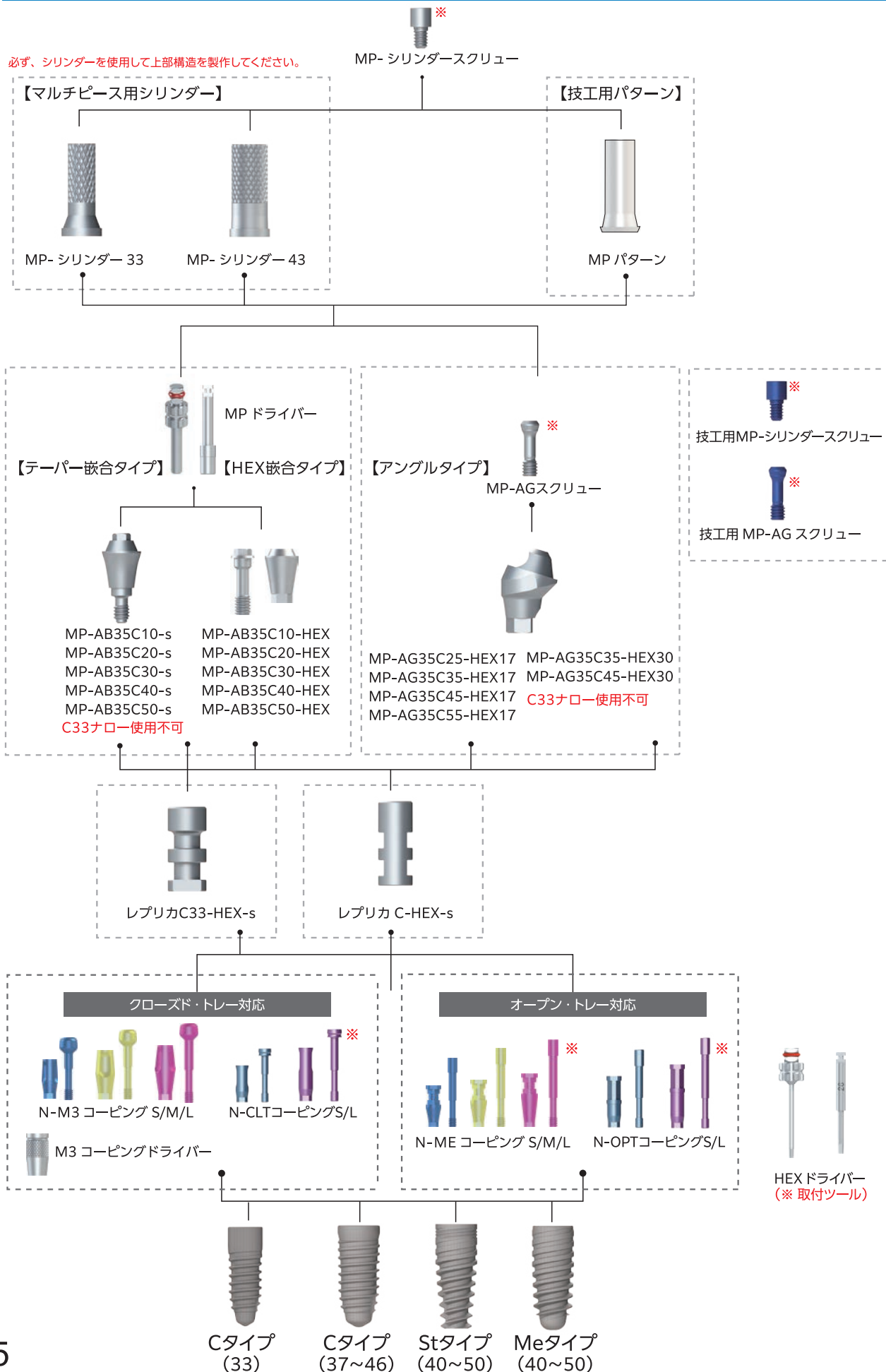

アバットメントレベル印象

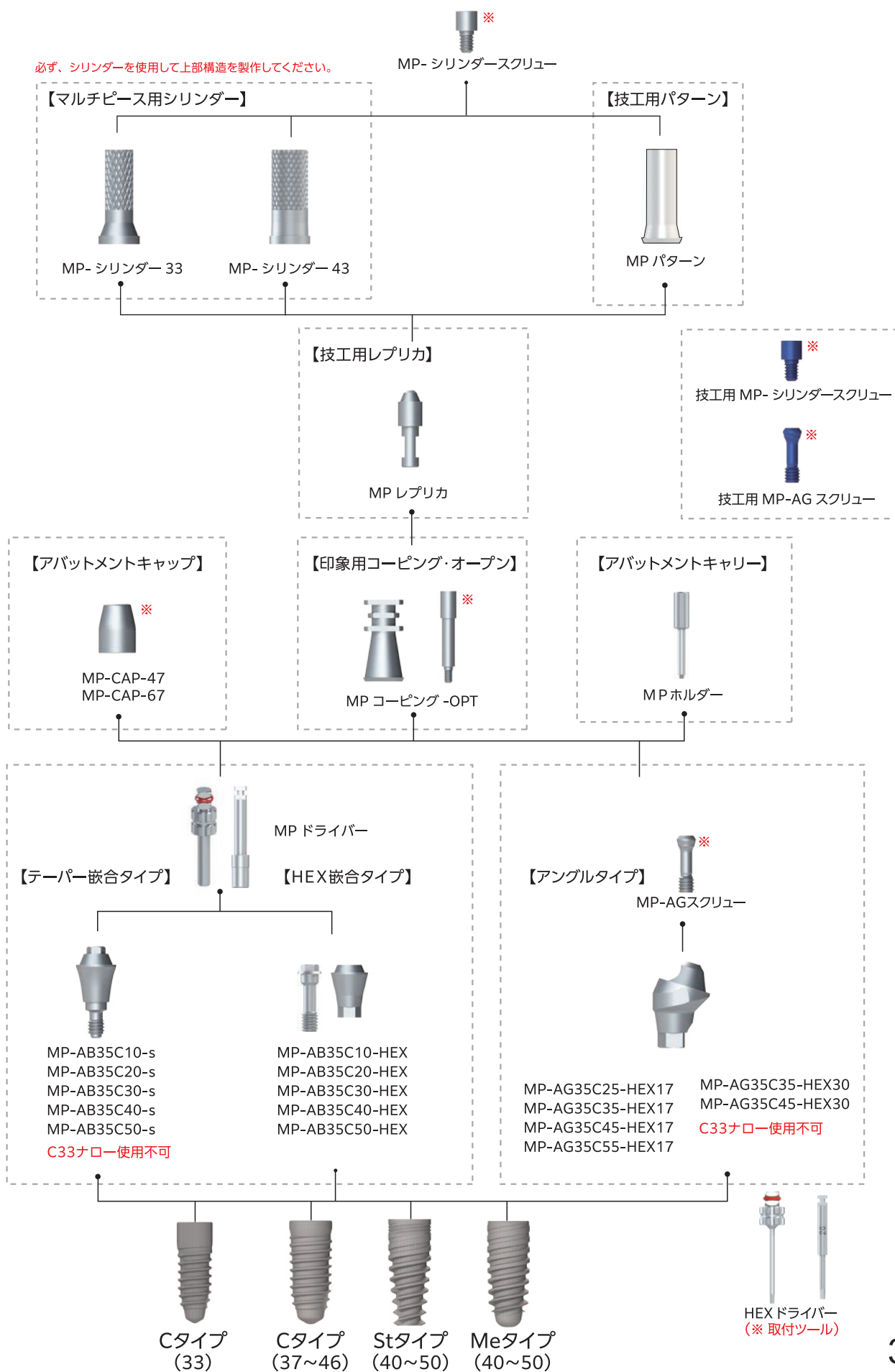


全体図

1 回法ワイドタイプ

BW-type ϕ 4.7


EW-type ϕ 5.0 ϕ 6.0 ϕ 7.0

インプラントレベル印象

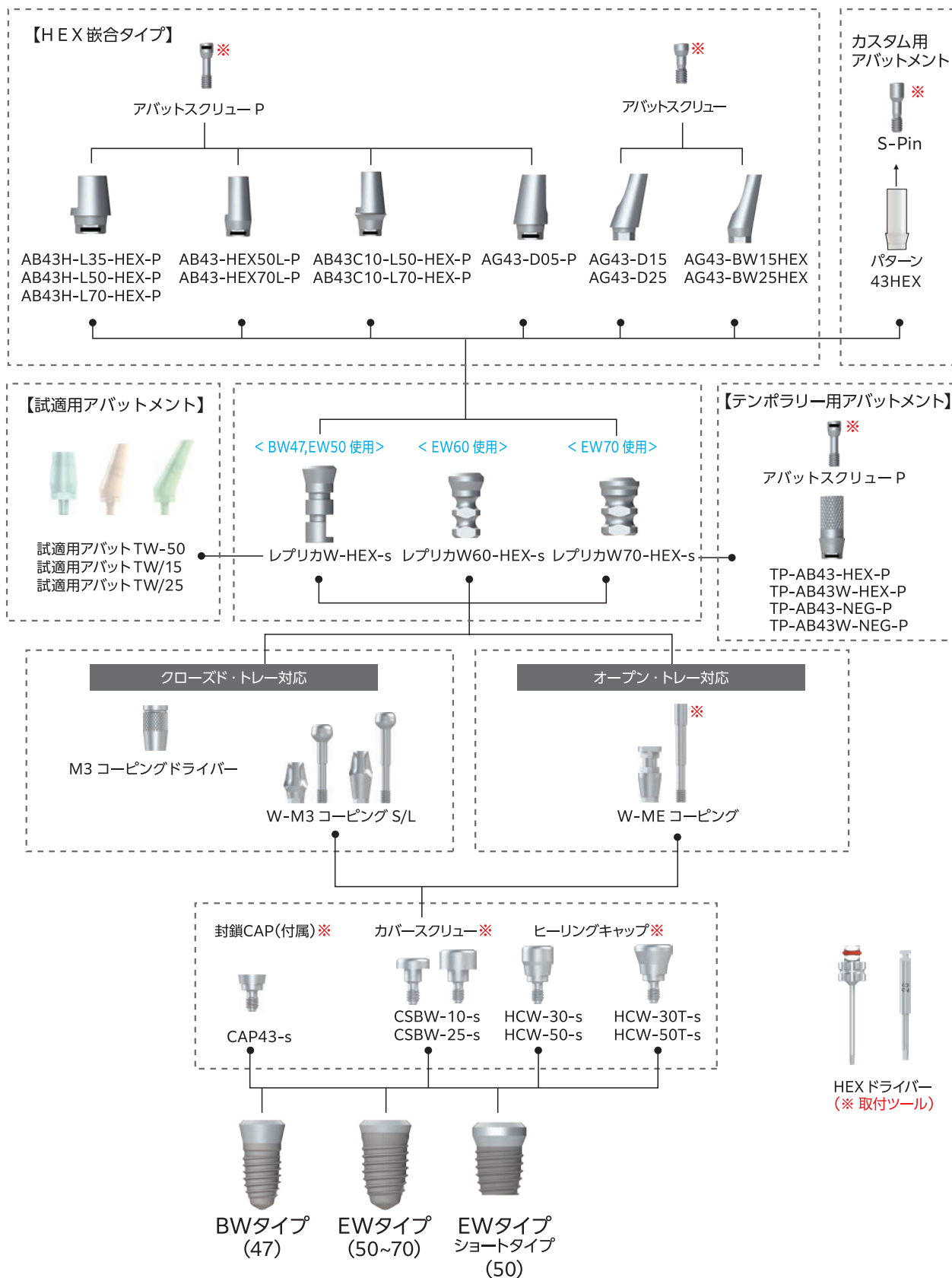

アバットメントレベル印象

パターン


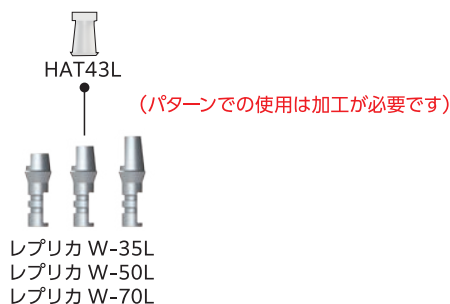


印象パーツ

EW60,70,EW50ショート
対応不可



直接印象

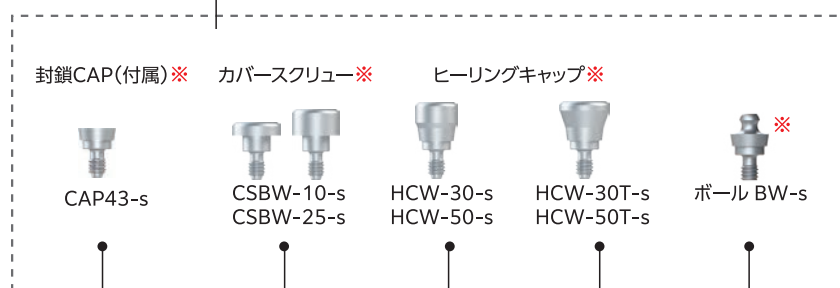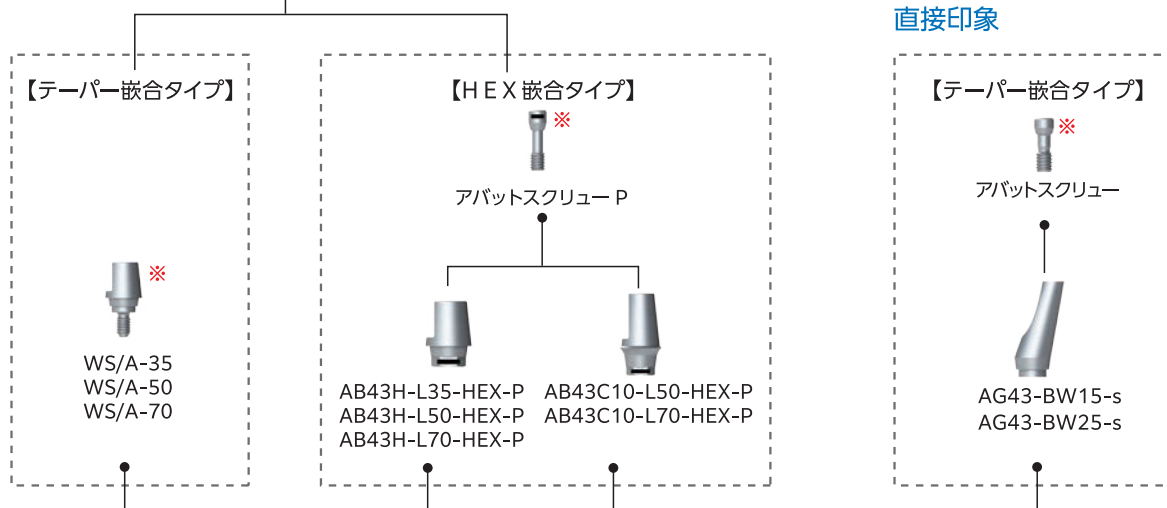

AII-type

ワンピースタイプ

1ピースタイプのインプラントです。支台部に2面カットを付与しています。また、歯肉貫通部との境界部にはマイクロスレッドを設けています。

材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値:40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

φ3.3



製品名	埋入径 / 埋入長 / 支台長
AII 3008-07	φ3.0 / 8.0mm / 7.0mm
AII 3008-09	φ3.0 / 8.0mm / 9.0mm
AII 3010-07	φ3.0 / 10.0mm / 7.0mm
AII 3010-09	φ3.0 / 10.0mm / 9.0mm
AII 3012-09	φ3.0 / 12.0mm / 9.0mm
AII 3012-11	φ3.0 / 12.0mm / 11.0mm

φ4.0



製品名	埋入径 / 埋入長 / 支台長
AII 4008-07	φ4.0 / 8.0mm / 7.0mm
AII 4008-09	φ4.0 / 8.0mm / 9.0mm
AII 4010-07	φ4.0 / 10.0mm / 7.0mm
AII 4010-09	φ4.0 / 10.0mm / 9.0mm
AII 4012-09	φ4.0 / 12.0mm / 9.0mm
AII 4012-11	φ4.0 / 12.0mm / 11.0mm

φ5.0



製品名	埋入径 / 埋入長 / 支台長
AII 5008-07	φ5.0 / 8.0mm / 7.0mm
AII 5008-09	φ5.0 / 8.0mm / 9.0mm
AII 5010-07	φ5.0 / 10.0mm / 7.0mm
AII 5010-09	φ5.0 / 10.0mm / 9.0mm
AII 5012-09	φ5.0 / 12.0mm / 9.0mm
AII 5012-11	φ5.0 / 12.0mm / 11.0mm

試適用アバットメント


B/BS/BSN/C/E/St/Me-type用(ノーマルタイプ)

	製品名	仕様	金額
	試適用アバット TB-50 (3 個入)	高さ5.0mm / ストレート 材質 アクリル	
	試適用アバット TB/15 (3 個入)	高さ9.0mm / 角度15° 材質 アクリル	
	試適用アバット TB/25 (3 個入)	高さ9.0mm / 角度25° 材質 アクリル	
	試適用 C アダプター 20	高さ2.0mm 材質 純チタン	
	試適用 C アダプター 30	高さ3.0mm 材質 純チタン	

BW/EW-type用(ワイドタイプ)


	製品名	仕様	金額
	試適用アバット TW-50 (3 個入)	高さ5.0mm / ストレート 材質 アクリル	
	試適用アバット TW/15 (3 個入)	高さ9.0mm / 角度15° 材質 アクリル	
	試適用アバット TW/25 (3 個入)	高さ9.0mm / 角度25° 材質 アクリル	

Drills & Tools

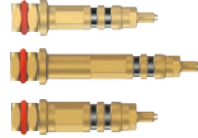	製品名	仕様	金額
	ラウンドバーφ1.4	φ1.4mm / 全長34.0mm 植立孔の位置決めマーキングに使用。	
	リンデマンドリル	最大部φ2.1mm / 全長31.5mm 皮質骨を貫通させるために使用。	
	ガイドドリル20	φ2.0mm / 全長34.7mm インプラント埋入長に合わせた植立孔の深さと 植立方向の決定を行う。	
	スパイラルドリル25	φ2.5mm / 全長34.7mm φ3.0mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリル28	φ2.8mm / 全長34.7mm φ3.3mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリル32	φ3.2mm / 全長34.7mm φ3.7mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリル35	φ3.5mm / 全長34.7mm φ4.0mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリル38	φ3.8mm / 全長34.7mm φ4.3mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリル41	φ4.1mm / 全長 34.7mm φ4.6mmφ4.7mm インプラント最終ドリル	
	スパイラルドリル45	φ4.5mm / 全長34.7mm φ5.0mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリル475	φ4.75mm / 全長34.7mm	
	スパイラルドリル56	φ5.6mm / 全長29.5mm φ6.0mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリル66	φ6.6mm / 全長29.5mm φ7.0mmインプラント最終ドリル	
	ドリルストッパー7 ドリルストッパー9 ドリルストッパー11 ドリルストッパー13	ガイドドリル20 スパイラルドリル25～475に使用可 赤字はドリル露出の長さを示します。	
	ドリルストッパー6 ドリルストッパー8 ドリルストッパー10 ドリルストッパー12 ドリルストッパー14	ガイドドリル20 スパイラルドリル25～475に使用可 赤字はドリル露出の長さを示します。	
	Tap30-33 Tap37-40 Tap46-50 Tap60-70	全長35.0mm 骨が硬い場合に、植立孔入口をタップ形成し、 インプラントを挿入しやすくする。手動の際は 、ドリルホルダー10を装着してご使用のこと。	
	デプスメジャー	全長28.0mm φ2.0mm、φ2.8mmの骨穿孔部の深さや 方向の確認を行う。	
	CK-40 CK-48	全長30.0mm 2次オペ時歯肉を円形にカットする。	
	WR/Mount-N-S WR/Mount-N-L WR/Mount-W-S	全長S:21mm L:27mm W:21mm レンチに取り付け、インプラントを埋入するための ツール。 N : B、BS、BSN、C、E、St、Me -type用 W : BW、EW -type用	

	製品名	仕様	金額
	CA/Mount-N-S	全長S:27.7mm L:33.7mm W:27.7mm コントラヘッドに取り付け、インプラントを 埋入するためのツール。 N : B、BS、BSN、C、E、St、Me -type用 W : BW、EW -type用	
	CA/Mount-N-L		
	CA/Mount-W-S		
	WR/HEXドライバー-18	全長18:18.0mm 24:24.0mm 30:30.0mm キャップ、アバットスクリュー等をレンチで締結する ツール。	
	WR/HEXドライバー-24		
	WR/HEXドライバー-30		
	CA/HEXドライバー-20	全長20:20.0mm 26:26.0mm 32:32.0mm コントラヘッドに取り付け、キャップ、アバットメント スクリュー等を締結するツール。	
	CA/HEXドライバー-26		
	CA/HEXドライバー-32		
	ボーントリミングN20	全長N20:20mm N26:26mm インプラント上部に被っている骨を除去する ためのドリルです。(B・BS・C・E・St・Meタイプ用) ボーンガイドピン付き。	
	ボーントリミングN26		
	ドリルエクステンション16	全長27.0mm コントラ用ドリルを延長します。	
	エクステンション10	全長14.0mm WR/Mount、WR/HEXドライバーに接続 して使用する延長ツール。	
	ドリルホルダー10	全長14.0mm コントラ用ドリル、ツール類を手回しで使用 するためのツール。	
	マウントN	全長19.8mm スクリュー固定式マウント。 N : B、BS、BSN、C、E、St、Me W : BW、EW	
	マウントW		
	AチェッカーS	全長S:13.0mm M:15.0mm L:17.0mm 支台部 S:7.0mm M:9.0mm L:11.0mm ガイドドリル20の穿孔部に立てて方向や クリアランスの確認を行う。	
	AチェッカーM		
	AチェッカーL		
	Allホルダー30	全長14.5mm Allタイプインプラントを埋入する際、 直接支台部に被せて使用。 30 : φ3.0 40 : φ4.0 50 : φ5.0	
	Allホルダー40		
	Allホルダー50		
	DSハンドレンチ	WR/Mount、WR/HEXドライバー、Allホルダー 等に取り付けるハンドレンチ。	
	DSラチェットレンチ	WR/Mount、WR/HEXドライバー、 Allホルダー等に取り付けるツール。	
	DSトルクラチェットレンチ	最大測定トルク 40Ncm	
	DSトルクラチェットレンチ70	最大測定トルク 70Ncm	

Drills & Tools

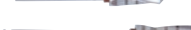	製品名	仕様	金額
	CAアダプター22	全長22.0mm	
	PLUSリムーバーS	全長S: 23.60mm	
	PLUSリムーバーL	全長L: 29.60mm	
	M3コーピングドライバー	M3コーピングを締め付けるためのツールです。	
	ランセットドリル	最大部φ2.0mm / 全長34.0mm 皮質骨を貫通させるために使用します。	
	ガイドドリル15L	φ1.5mm / 全長37.0mm ストッパー付きです。	
	スパイラルドリルC 20S	φ2.0mm / 全長S: 32.0mm L: 37.0mm	
	スパイラルドリルC 20L	インプラント埋入長に合わせた植立孔の 深さと植立方向の決定を行います。	
	スパイラルドリルC 25S	φ2.5mm / 全長S: 32.0mm L: 37.0mm	
	スパイラルドリルC 25L	φ3.0mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリルC28S	φ2.8mm / 全長S: 32.0mm L: 37.0mm	
	スパイラルドリルC28L	φ3.3mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリルC32S	φ3.2mm / 全長S: 32.0mm L: 37.0mm	
	スパイラルドリルC32L	φ3.7mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリルC35S	φ3.5mm/全長S: 32.0mm L: 37.0mm	
	スパイラルドリルC35L	φ4.0mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリルC38S	φ3.8mm / 全長S: 32.0mm L: 37.0mm	
	スパイラルドリルC38L	φ4.3mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリルC41S	φ4.1mm / 全長S: 32.0mm L: 37.0mm	
	スパイラルドリルC41L	φ4.6mmインプラント最終ドリル φ4.7mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリルC45S	φ4.5mm / 全長S: 32.0mm L: 37.0mm	
	スパイラルドリルC45L	φ5.0mmインプラント最終ドリル	
	スパイラルドリル475S	φ4.75mm / 全長32.0mm	
	ホールソウ5.35	φ5.35 / 全長35.0mm	
	ホールソウ6.35	5.35: φ6.0mmインプラント専用ドリル φ6.35 / 全長35.0mm 6.35: φ7.0mmインプラント専用ドリル	
	エンドミル5.55	φ5.55 / 全長35.0mm	
	エンドミル6.55	5.55: φ6.0mmインプラント専用ドリル φ6.55 / 全長35.0mm 6.55: φ7.0mmインプラント専用ドリル	
	ドリルストッパーC 20,25,28,32,35,38, 41,45,475	スパイラルドリルC専用 ドリルサイズに対応するものをご使用ください。	

マルチピースアバット専用ツール

	製品名	仕様	金額
	MPホルダー	全長23.7mm MP用のアバットメントキャリー	
	CA-MPドライバー	全長20mm / MPアバットメント用 テーパー嵌合タイプ、HEX嵌合ストレート用ネジ等 を締結するためのツール。	
	WR-MPドライバー	全長20mm / MPアバットメント用 テーパー嵌合タイプ、HEX嵌合ストレート用ネジ等 を締結するためのツール。	

TBP-System専用ツール

	製品名	仕様	金額
	WR/TBPドライバー26	全長26 : 26.0mm 30 : 30.0mm 34 : 34.0mm TBP-System専用スクリューをレンチで締結するための ツール。	
	WR/TBPドライバー30		
	WR/TBPドライバー34		
	CA/TBPドライバー28	全長28 : 28.0mm 32 : 32.0mm 36 : 36.0mm コントラヘッドに取り付けTBP-System専用スクリューを レンチで締結するためのツール。	
	CA/TBPドライバー32		
	CA/TBPドライバー36		



ツールボックス

オートクレープの場合
(121℃で 20 分間行い、十分に乾燥させること。
また 135℃以上にならないよう注意すること。)




フリーボックス

オートクレープの場合
(121℃で 20 分間行い、十分に乾燥させること。
また 135℃以上にならないよう注意すること。)

ツールボックス
(補綴用)

オートクレープの場合
(121℃で 20 分間行い、十分に乾燥させること。
また 135℃以上にならないよう注意すること。)

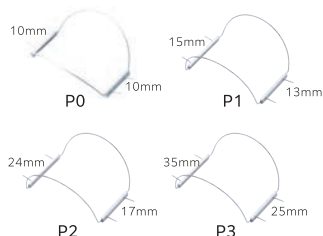I.G.P.フラップホルダー
P0 P1 P2 P3

メインフレーム・スプリングは症例に合わせ、
大きさを選択のこと。術者の視野を確保し、
手術操作を容易にする。
※オートクレープほか滅菌可能
※ステンレス製



I.G.P.ピンセット

フラップホルダー専用

Others

—インプラント周辺製品—

骨補填材

ArrowBone- β -Dental

γ 線滅菌済

再使用禁止

高度管理医療機器（クラスⅣ）



AG-1

AG-2

ArrowBone- β -Dental AG-1
ArrowBone- β -Dental AG-2

いずれのサイズも

5箱×1セット／

3箱×1セット／

成分： β -リン酸三カルシウム

内容量：顆粒 0.5g $\approx$ 1.0cc

顆粒サイズ

AG-1：250-1000 μ m

AG-2：1000-2000 μ m

気孔率：75%

歯面研磨材

β パウダー

γ 線滅菌済

再使用禁止



β パウダー／

成分： β -リン酸三カルシウム

平均粒子径：45 μ m

内容量：3g×5包

用途：歯面研磨及び清掃

余剰セメント除去シート

TCガムプロテクト



TCガムプロテクト

20枚1シート／



実寸タテ12mm×ヨコ20mm

パンチ穴直径3.5mm

インプラント手帳



インプラント手帳
10冊×1セット /

MYTIS NAVIGATION SYSTEM



■ 診断はパノラマからCTシミュレーションへ

● MYTIS MARKER

MYTIS MARKER は「インプラント断面」をはじめ、インプラント臨床医が考案した様々な機能を搭載。より精度高いインプラントシミュレーションを実現します。

● MYTIS GUIDE

MYTIS MARKER のシミュレーション結果を反映することで精度の高い手術を実現。手術時間を短縮し、患者様の負担も軽減します。

● MYTIS MARKER

MYTIS MARKER ラインナップ	価格	CTデータ 直接変換	歯列データ 合成	インプラント シミュレーション	データ 作成発注	ガイド 作製発注
DIRECT +	導入費	○	○	○	○	○
	年間ライセンス費 (初年度無料)					
NETWORK ※Networkのご利用にはDirect+が必要です。 ※Direct+で作成した症例データを読込可能。	導入費	×	×	○	○	○
	年間ライセンス費					
BASIC ※iCATにデータ作成発注したデータのみ読込可能。 ※Direct+で作成した症例データは読込不可。	導入費	×	×	○	○	○
	年間ライセンス費					

※Direct・Networkは1ライセンス、1PCとなります。Basicはインストールの台数に制限はありません。

※バージョンアップ費はいずれも無料です。

英数字

A

AB35-HEX50L-P	12
AB35C10-L35-HEX-P	19
AB35C10-L50-HEX-P	19
AB35C10-L70-HEX-P	19
AB35C20-L35-HEX-P	19
AB35C20-L50-HEX-P	19
AB35C20-L70-HEX-P	19
AB35C30-L35-HEX-P	19
AB35C30-L50-HEX-P	19
AB35C30-L70-HEX-P	19
AB35E-L35-HEX-P	12
AB35E-L50-HEX-P	12
AB35E-L70-HEX-P	12
AB43C10-L50-HEX-P	28
AB43C10-L70-HEX-P	28
AB43-HEX50L-P	28
AB43-HEX70L-P	28
AB43H-L35-HEX-P	28
AB43H-L50-HEX-P	28
AB43H-L70-HEX-P	28
AIIホルダー 30	42
AIIホルダー 40	42
AIIホルダー 50	42
A チェッカー S	42
A チェッカー M	42
A チェッカー L	42
AII3008-07	39
AII3008-09	39
AII3010-07	39
AII3010-09	39
AII3012-09	39
AII3012-11	39
AII4008-07	39
AII4008-09	39
AII4010-07	39
AII4010-09	39
AII4012-09	39
AII4012-11	39
AII5008-07	39
AII5008-09	39
AII5010-07	39
AII5010-09	39
AII5012-09	39
AII5012-11	39
AG35-B15HEX	12
AG35-B15-s	12
AG35-B25HEX	12
AG35-B25-s	12
AG35C10-HEX15-P	19
AG35C10-HEX25-P	19
AG35-C15-s-P	19

AG35C20-HEX15-P	19
AG35C20-HEX25-P	19
AG35-C25-s-P	19
AG35C30-HEX15-P	19
AG35C-D05-P	19
AG35C-D15-P	19
AG35C-D25-P	19
AG35-D05-P	12
AG35-D15	12
AG35-D25	12
AG43-BW15HEX	28
AG43-BW15-s	28
AG43-BW25HEX	28
AG43-BW25-s	28
AG43-D05-P	28
AG43-D15	28
AG43-D25	28
ArrowBone-β-Dental AG-1	45
ArrowBone-β-Dental AG-2	45

B

B3306Sf	9
B3308Sf	9
B3310Sf	9
B3312Sf	9
B3314Sf	9
B3706Sf	9
B3708Sf	9
B3710Sf	9
B3712Sf	9
B3714Sf	9
B4006Sf	9
B4008Sf	9
B4010Sf	9
B4012Sf	9
B4014Sf	9
B4306Sf	9
B4308Sf	9
B4310Sf	9
B4312Sf	9
B4314Sf	9
B4606Sf	9
B4608Sf	9
B4610Sf	9
B4612Sf	9
B4614Sf	9
BS3708Sf	10
BS3710Sf	10
BS3712Sf	10
BS4008Sf	10
BS4010Sf	10

BS4012Sf	10
BS4308Sf	10
BS4310Sf	10
BS4312Sf	10
BS4608Sf	10
BS4610Sf	10
BS4612Sf	10
BS/A-35	12
BS/A-50	12
BS/A-70	12
BSN3308Sf	10
BSN3310Sf	10
BSN3312Sf	10
BSN3314Sf	10
BW4708Sf	27
BW4710Sf	27
BW4712Sf	27
Bタイプ用N-M3コーピングS印象セット	13
Bタイプ用N-M3コーピングM印象セット	13
Bタイプ用N-M3コーピングL印象セット	13
Bタイプ用N-MEコーピングS印象セット	13
Bタイプ用N-MEコーピングM印象セット	13
Bタイプ用N-MEコーピングL印象セット	13

C

C3308Sf	17
C3310Sf	17
C3312Sf	17
C3314Sf	17
C3708Sf	17
C3710Sf	17
C3712Sf	17
C3714Sf	17
C4008Sf	17
C4010Sf	17
C4012Sf	17
C4014Sf	17
C4308Sf	17
C4310Sf	17
C4312Sf	17
C4314Sf	17
C4608Sf	17
C4610Sf	17
C4612Sf	17
C4614Sf	17
CA アダプター 22	43
CA/HEX ドライバー 20	42
CA/HEX ドライバー 26	42
CA/HEX ドライバー 32	42
CA/Mount-N-S	42
CA/Mount-N-L	42

CA/Mount-W-S	42
CA-MP ドライバー	44
CA/TBP ドライバー 28	44
CA/TBP ドライバー 32	44
CA/TBP ドライバー 36	44
CAP35-s	9,10,11,17,18
CAP43-s	27
CK-40	41
CK-48	41
CSB-10-s	9,10,11
CSB-25-s	9,10,11
CSBW-10-s	27
CSBW-25-s	27
CSE-10-s	10,11
CSE-25-s	10,11
Cタイプ用N-M3コーピングS印象セット	23
Cタイプ用N-M3コーピングM印象セット	23
Cタイプ用N-M3コーピングL印象セット	23
Cタイプ用N-MEコーピングS印象セット	23
Cタイプ用N-MEコーピングM印象セット	23
Cタイプ用N-MEコーピングL印象セット	23

D

DS トルクラチェットレンチ	42
DS トルクラチェットレンチ 70	42
DS ハンドレンチ	42
DS ラチェットレンチ	42
Dscan-MP	25
Dscan-N-S	15,16,25
Dscan-N-L	15,16,25
Dscan-W-S	30

E

E3310Sf	11
E3312Sf	11
E3314Sf	11
E3708Sf	11
E3710Sf	11
E3712Sf	11
E3714Sf	11
E4008Sf	11
E4010Sf	11
E4012Sf	11
E4014Sf	11
E4308Sf	11
E4310Sf	11
E4312Sf	11
E4314Sf	11
E4608Sf	11
E4610Sf	11
E4612Sf	11

E4614Sf	11
EW5005Sf	27
EW5006Sf	27
EW5008Sf	27
EW5010Sf	27
EW5012Sf	27
EW6006Sf	27
EW6008Sf	27
EW6010Sf	27
EW7006Sf	27
EW7008Sf	27
EW7010Sf	27
Eタイプ用N-M3コーピングS印象セット	14
Eタイプ用N-M3コーピングM印象セット	14
Eタイプ用N-M3コーピングL印象セット	14
Eタイプ用N-MEコーピングS印象セット	14
Eタイプ用N-MEコーピングM印象セット	14
Eタイプ用N-MEコーピングL印象セット	14

H

HAT35L(10 個入)	23
HAT43L(10 個入)	29
HC-30-s	18
HC-30ST-s	18
HC-30T-s	18
HC-30TW-s	18
HC-50-s	18
HC-50ST-s	18
HC-50T-s	18
HC-50TW-s	18
HCW-30-s	27
HCW-30T-s	27
HCW-50-s	27
HCW-50T-s	27

I

I.G.P. フラップホルダー	
P0,P1,P2,P3	44
I.G.P. ピンセット	44

M

Me4008Sf	18
Me4010Sf	18
Me4012Sf	18
Me4308Sf	18
Me4310Sf	18
Me4312Sf	18
Me5008Sf	18
Me5010Sf	18
Me5012Sf	18
MP-AB35C10-HEX	20

MP-AB35C10-s	20
MP-AB35C20-HEX	20
MP-AB35C20-s	20
MP-AB35C30-HEX	20
MP-AB35C30-s	20
MP-AB35C40-HEX	20
MP-AB35C40-s	20
MP-AB35C50-HEX	20
MP-AB35C50-s	20
MP-AG35C25-HEX17	20
MP-AG35C35-HEX17	20
MP-AG35C35-HEX30	20
MP-AG35C45-HEX17	20
MP-AG35C45-HEX30	20
MP-AG35C55-HEX17	20
MP-AG スクリュー(2 個入)	20
MP-CAD シリンダー 35	25
MP-CAD シリンダー 50	25
MP-CAD シリンダー 70	25
MP-CAP-47	20
MP-CAP-67	20
MP- シリンダー 33	20
MP- シリンダー 43	20
MP- シリンダー スクリュー(2 個入)	20
MP コーピング-OPT	21
MP パターン	21
MP レプリカ	21
MP ホルダー	44
M3 コーピングドライバー	43
MYTIS NAVIGATION SYSTEM	46

N

N-M3コーピングS	13,14,23
N-M3コーピングM	13,14,23
N-M3コーピングL	13,14,23
N-MEコーピングS	13,14,23
N-MEコーピングM	13,14,23
N-MEコーピングL	13,14,23
N-OPTコーピングS	24
N-OPTコーピングL	24
N-CLTコーピングS	24
N-CLTコーピングL	24

P

PLUS リムーバー S	43
PLUS リムーバー L	43

S

S-Pin	15,16,25,30
St4008Sf	18
St4010Sf	18

St4012Sf	18
St4014Sf	18
St4308Sf	18
St4310Sf	18
St4312Sf	18
St4314Sf	18
St5008Sf	18
St5010Sf	18
St5012Sf	18

T

Tap30-33	41
Tap37-40	41
Tap46-50	41
Tap60-70	41
TB-BH-P	15
TB-BN-P	15
TB-CH-P	25
TB-CN-P	25
TB-EH-P	16
TB-EN-P	16
TB-WH-P	30
TB-WN-P	30
TBPアバットメント	22
TBPスクリューP	22
TCガムプロテクト	45
TP-AB35-HEX-P	15,16,25
TP-AB35-NEG-P	15,16,25
TP-AB35B-HEX-P	15
TP-AB35B-NEG-P	15
TP-AB35E-HEX-P	16
TP-AB35E-NEG-P	16
TP-AB43-HEX-P	30
TP-AB43-NEG-P	30
TP-AB43W-HEX-P	30
TP-AB43W-NEG-P	30

W

W-M3コーピングS印象セット	29
W-M3コーピングL印象セット	29
W-MEコーピング印象セット	29
W-M3コーピングS	29
W-M3コーピングL	29
W-MEコーピング	29
WR/HEXドライバー18	42
WR/HEXドライバー24	42
WR/HEXドライバー30	42
WR/Mount-N-S	41
WR/Mount-N-L	41
WR/Mount-W-S	41

WR-MPドライバー	44
WR/TBPDドライバー26	44
WR/TBPDドライバー30	44
WR/TBPDドライバー34	44
WS/A-35	28
WS/A-50	28
WS/A-70	28

β

βパウダー	45
-------	----

五十音順

ア

アバットスクリュー	12,28
アバットスクリューP	12,19,28

イ

インプラント手帳	46
----------	----

エ

エンドミル5.55	43
エンドミル6.55	43
エクステンション10	42

カ

ガイドドリル15L	43
ガイドドリル20	41

キ

技工用MP-AGスクリュー (2個入)	21
技工用MPシリンダースクリュー (2個入)	21
技工用TBPスクリューP (2個入)	22

シ

試適用Cアダプター20	40
試適用Cアダプター30	40
試適用アバットTB/15 3個入	40
試適用アバットTB/25 3個入	40
試適用アバットTB-50 3個入	40
試適用アバットTW/15 3個入	40
試適用アバットTW/25 3個入	40
試適用アバットTW-50 3個入	40

ス

スパイラルドリル 25	41
スパイラルドリル 28	41
スパイラルドリル 32	41
スパイラルドリル 35	41
スパイラルドリル 38	41

スパイラルドリル 41	41
スパイラルドリル 45	41
スパイラルドリル 475S	43
スパイラルドリル 56	41
スパイラルドリル 66	41
スパイラルドリル C 20S	43
スパイラルドリル C 20L	43
スパイラルドリル C 25S	43
スパイラルドリル C 25L	43
スパイラルドリル C 28S	43
スパイラルドリル C 28L	43
スパイラルドリル C 32S	43
スパイラルドリル C 32L	43
スパイラルドリル C 35S	43
スパイラルドリル C 35L	43
スパイラルドリル C 38S	43
スパイラルドリル C 38L	43
スパイラルドリル C 41S	43
スパイラルドリル C 41L	43
スパイラルドリル C 45S	43
スパイラルドリル C 45L	43

ツ

ツールボックス	44
ツールボックス (補綴用)	44

テ

デプスメジャー	41
---------	----

ト

ドリルエクステンション 16	42
ドリルストッパー 6	41
ドリルストッパー 7	41
ドリルストッパー 8	41
ドリルストッパー 9	41
ドリルストッパー 10	41
ドリルストッパー 11	41
ドリルストッパー 12	41
ドリルストッパー 13	41
ドリルストッパー 14	41
ドリルストッパー C20	43
ドリルストッパー C25	43
ドリルストッパー C28	43
ドリルストッパー C32	43
ドリルストッパー C35	43
ドリルストッパー C38	43
ドリルストッパー C41	43
ドリルストッパー C45	43
ドリルストッパー C475	43
ドリルホルダー 10	42

ハ	
パターン 35HEX	15,16,25
パターン 43HEX	30

フ	
フリーボックス	44

ホ	
ボール B-s	12
ボール BW-s	28
ボール C20-s	19
ホールソウ 5.35	43
ホールソウ 6.35	43
ボートリミング-N20	42
ボートリミング-N26	42

マ	
マウント N	42
マウント W	42

ラ	
ラウンドバー φ1.4	41
ランセットドリル	43

リ	
リンデマンドリル	41

レ	
レプリカ B-HEX-s	13
レプリカ B-HEX-s (3 個入)	13
レプリカ B-HEX-3D	15
レプリカ C-HEX-s	23
レプリカ C-HEX-s (3 個入)	23

レプリカ C33-HEX-s	23
レプリカ C-HEX-3D	25
レプリカ E-HEX-s	14
レプリカ E-HEX-s (3 個入)	14
レプリカ E-HEX-3D	16
レプリカ N-35L	23
レプリカ N-50L	23
レプリカ N-70L	23
レプリカ W-HEX-3D	30
レプリカ W-35L	29
レプリカ W-50L	29
レプリカ W-70L	29
レプリカ W60-HEX-s	29
レプリカ W70-HEX-s	29
レプリカ W-HEX-s	29
レプリカ W-HEX-s (3 個入)	29

アローインプラント	高度管理医療機器	歯科用骨内インプラント材	承認番号：21500BZZ00187000
マイティスアタッチメント	高度管理医療機器	歯科用インプラントシステム	承認番号：21100BZZ00066000
アローボーン-β-デンタル	高度管理医療機器	吸収性歯科用骨再建インプラント材	承認番号：22500BZX00553000
アローインプラント用インスツルメント	一般医療機器	歯科用インプラント手術器具	届出番号：13B1X00145000001
アロー F I T パーツ	一般医療機器	歯科インプラント技工用器材	届出番号：13B1X00145000002
βパウダー	一般医療機器	歯面研磨材	届出番号：13B1X00145000005
I.G.P. フラップホルダー	一般医療機器	歯科用開創器	届出番号：13B1X00145000011
アローインプラント用サージカルドリル	一般医療機器	手術用ドリルビット	届出番号：13B1X00145000012
アローインプラント用サージカルバー	一般医療機器	整形外科用バー	届出番号：13B1X00145000013
アローインプラント用ドリル延長ツール	一般医療機器	手術用ドリルアタッチメント	届出番号：13B1X00145000014
I.G.P. ピンセット	一般医療機器	ピンセット	届出番号：13B1X00145000015
C A アタッチメント	一般医療機器	手術用ドリルアタッチメント	届出番号：13B1X00145000027
マイティスガイド用インスツルメント	一般医療機器	整形外科用バー	届出番号：13B1X00145000028
T C ガムプロテクト	一般医療機器	歯科用ラバーダム	届出番号：13B1X00145000029
デジタル技工用パーツ	一般医療機器	歯科インプラント技工用器材	届出番号：13B1X00145000030

製造販売元・販売元：株式会社ブレンベス 住所：〒140-0014 東京都品川区大井1-49-15 YK-17ビル6階
電話番号：03-3778-0745 FAX 番号：03-3778-4910

マイティスアローインプラント用インスツルメント	一般医療機器	整形外科用バー	届出番号：13B2X00094000106
スパイラルドリルC	一般医療機器	整形外科用バー	届出番号：13B2X00094000129
マイティスインプラント用インスツルメント	管理医療機器	電動式歯科用インプラント手術器具	承認番号：21900BZX00406000
マイティスガイド用ドリル	一般医療機器	整形外科用バー	届出番号：13B2X00094000190

製造販売元：株式会社デンテック 住所：〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5

ランドマーカー	管理医療機器	汎用画像診断装置 ワークステーション用プログラム	認証番号：227AHBZX00029000
---------	--------	-----------------------------	-----------------------

製造販売元：株式会社アイキャット 住所：大阪府大阪市淀川区西中島 3-19-15 第3 三ツ矢ビル 3F



株式会社ブレンベース



本社 東京都品川区大井 1-49-15
YK-17 ビル 6 階
電話 03-3778-0745
FAX 03-3778-4910
E-mail mail@brain-base.com
URL <https://www.brain-base.com>

大阪支社 大阪府大阪市中央区本町橋 2-23
第七松屋ビル 6 階
電話 06-6943-8864
FAX 06-6948-8874

