

ダイレクション・ソニック 超音波洗浄機


EXV-N3



インフェクションコントロールに安心できる、
力強く繊細な洗浄効果


＜定価＞ 382,000 円（税別）

- ☆周波数と出力が絶えず変化するスウィープシステム
- ☆3つの振動体のマッチング方式であらゆる方向に洗いムラの無い振動でソフトなものも洗浄可能に！

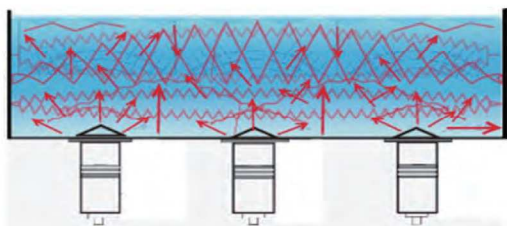

見えない汚れを油性マジックに見立ててインスツルメントに塗り付けて乾燥。その後、中性洗剤を少量混ぜた液体で超音波洗浄を行う。プラスチックコップ内での洗浄効果は驚きの速さで確認された。確実に汚れを除去できます。

洗浄力テスト

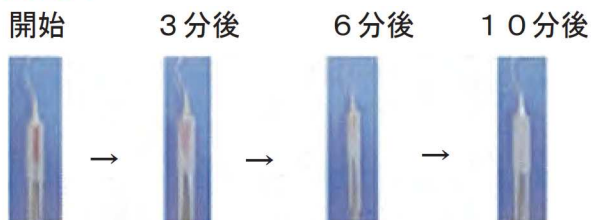

- ☆特殊形状発振体が洗浄槽を振動させず水に直接超音波振動を照射する。
- ☆水深依存症を限りなく抑えることで水深 20 cmでも確実な洗浄を可能にしました。

- ★容器としてプラスチック類のコップやペットボトル等を使用出来る。ソフトなプラスチック類も洗浄可能に。
- ★基本セットトレイ、インスツルメント類も立てたまま浸透洗浄できる水深、洗浄効率を向上させました。

特殊形状振動装置



水深依存症を限りなく抑えてインスツルメントを立てたまま洗浄を可能に！



製造販売元：株式会社ビィ・ソニック


販売元：株式会社ブレンベース 東京都品川区大井 1-49-15 アクセス大井町ビル6階 電話：03-3778-0745

① 定在波の影響を作らないシステムと独立特殊形状振動体が超音波洗浄機の改革を実現しました。

- ★E X V-N3 は洗浄槽内に突出した特殊形状発振体が 水に直接振動を照射して定在波を制御しています。
- ★カッティングウェーブを作り洗いムラも抑えます。
- ★デンチャークリーナーの効果を引き出します。
- ★外科用バキュームチップ内や中空ドリル内、細かな器具の汚れの洗浄効果が得られます。
- ★水深依存症の影響も無く、トレー・器具類も立てて浸漬洗浄が出来ます。

水面までムラ無く強力なパワー洗浄

①
定在波：振動が一つの腹と節のある波に安定して
腹ではパワーが有り腹ではパワーが消えてなくなる現象（洗いムラの原因）

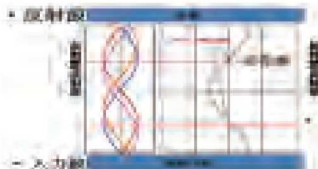


洗浄力確認の為、割り出し後デンチャーを使用しました。
石膏溶解液を使用しても今まで不可能な石膏除去をカッティングウェイブが可能にしました。
診療器具類はさらに効果が有ります。
★振動がペットボトルを通過して石膏を溶解！



E X V-3 洗浄サイクル設置歯科医院様とご意見を一部ご紹介いたします。

設置歯科医院様は100件以上 / 1年
職業感染防止にスタッフの安全と簡素化を実現、専用ソニック酵素でコスト削減・安心な洗浄システムを構築！

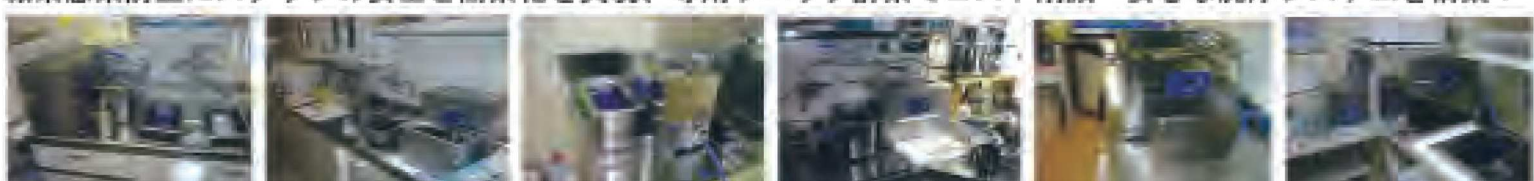

Y 歯科医院：今までにない洗浄力とスタッフの安全と時短でコストが削減できるシステムで分院3軒にも設置しました。
I 歯科医院：スタッフの安全を見直し大変評判がいいです。洗浄時間も短縮できるシステムに時間的余裕も取れて大満足です。



仕様

電源電圧：AC100V、50/60Hz
消費電力：130W
外形寸法：横 350× 幅 220× 高さ 325
(排水口突起部、電源コード突起部含まず)
内側寸法：横 300× 幅 160× 高さ 200
本体重量：10.7 kg

標準装備

- 1. B E S O N I C E X V-3
 - ・本体・排水ホース・電源コード
 - ・保護ホルダー・排水アミ
- 2. オプションパーツ
 - ・トレーホルダー
 - ・カゴ
 - ・ステンレストレー
 - ・本体強化プラスチック蓋
 - ・予備洗浄タンク・計量器
 - ・バスケット大・中・小
- A、専用洗浄液
 - ・洗浄ソニック酵素 4リットル入り

ご注文・お問合せは



株式会社ブレンベース



TEL 0120-25-4929
FAX 0120-4929-37